

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Straight)

f KÄYTTÖOHJEET

CE 0086

Manufacturer:
Smiths Medical International Ltd.
St. Crispin Way, Haslingden,
Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Tel: +44 (0)1706 233800

Distributed by:
Smiths Medical ASD, Inc.
201 West Queen St,
Southington, CT 06489, USA.
Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:
Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.
61 Brandl Street, Eight Mile Plains,
Brisbane, QLD 4113, Australia.
Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com

smiths medical

CCN.004/008/015 REV.001 06/12

- f** **Suomi**
-  **Varoitus**
-  Ei saa käyttää uudelleen
-  Älä steriloï uudelleen
-  Luettelonumero
-  Eräkoodi
-  Valmistuspäivä
-  Käytettävä ennen
-  Valmistaja
-  Ei sisällä luonnonkumi lateksia
-  Määrä
-  Steriloitu etyleenioksidilla
-  Nestepolun osat ei-pyrogeenisia
-  Lämpötilarajoitus
-  Tämä puoli ylös
-  Helposti särkyvä, käsiteltävä varovasti
-  Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut
-  Pidettävä kuivana
-  Suojattava auringonvalolta

Suomi

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (suora)

KÄYTTÖOHJEET

Nämä käyttöohjeet koskevat seuraavia Jelco™in tuotteita:

7130 - 7138 ja 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14 G - 24 G


7260 - 7269 ja 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14 G - 24 G

Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta käytöstä. Lue käyttöohjeiden koko sisältö, mukaanlukien varoitukset ja varotoimenpiteet ennen tuotteen käyttöönottoa. Varoitusten, varotoimenpiteiden ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavaa vahinkoa potilaalle.

HUOMAA: JAA TÄMÄ OHJE KAIKKIIN TUOTTEEN KÄYTTÖPISTEISIIN.

1. KUVAUUS:

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ koostuu sisäänviejäneulasta ja kiinteästä neulan kärjen suojuksesta. Laitteen osat: (1) neulan viisto kärki, (2) neula, (3) katetri, (4) katetrin kanta, (5) kärjen suojuus, (6) säiliö, (7) tulppayksikkö, (8) suojarahkki, (9) neulan kannan kotelo.

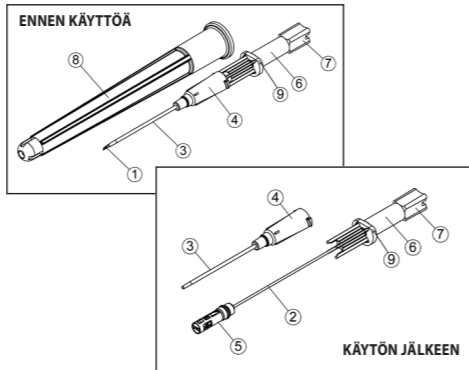

KATETRIN KOKO (G) JA LUOKITUS

G	14G	16G	18G	20G	22G	24G
Väri	Oranssi	Harmaa	Vihreä	Vaaleanpunainen	Sininen	Keltainen

Tämä kertakäyttöinen laite toimitetaan steriilissä ja pyrogeenittomassa pakkauksessa. Röntgenpositiivisen suonen sisäisen katetrin valmistukseen käytetyt materiaalit eivät sisällä lateksia, PVC:tä ja DEHP:tä.

2. KÄYTTÖAIHEET:

2.1 Laskimoon tai valtimoon oikein asetetun Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ -katetrin kautta voidaan ottaa verinäytteitä, valvoa verenpainetta ja antaa nesteitä.

2.2 Kärjen suojuus lukittuu neulan päälle, kun neula otetaan pois. Tämä vähentää tahattomien neulanpistojen vaaraa.

2.3 Näitä katetreja voidaan käyttää kaikille potilaille, kunhan otetaan huomioon potilaan koko, infuusionesteen sopivuus ja hoidon kesto.

2.4 14 - 24 G:n katetrin kanssa voidaan käyttää automaattista injektoria, jonka paine on enintään 300 psi.

3. VASTA-AIHEET:

Ei tunnettuja vasta-aiheita.

4. VAROITUKSIA:

4.1 Jotta katetria käytetään oikein, lääkärin on perehdyttävä injektointiin ja noudatettava käyttöohjeita. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja potilaalle tai lääkärille.

4.2 Vältä veritulppien muodostumista:

- **ÄLÄ LEIKKAA KATETRIA** äläkä käytä teräviä instrumentteja katetrin lähellä.
- **Älä koskaan aseta sisäänviejäneulaa uudelleen katetrin sisään, sillä se saattaa rikkoa katetrin.**

4.3 Vältä tahattomia neulanpistoja:

- **NEULAA EI SAA TAIVUTTAA** katetrin asettamisen, pujottamisen ja poistamisen aikana.
- **Jos pistäminen ei onnistu, kiinnitä turvalaite ja hävitä sekä neula että katetri.**
- **Välineen lukittumisvika on epätodennäköinen, mutta jos niin käy, vie tämä terävä väline sille tarkoitettuun jäteastiaan.**

4.4 Neulaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ohjainvaijerin kanssa - sen käyttö estää kärjen turvasuojuksen toiminnan.

4.5 Kärjen suojusta ei saa käsitellä ennen käyttöä eikä käytön jälkeen.

5. HUOMIO:

5.1 Tuote on steriili, myrkytön ja pyrogeeniton, ellei pakkaus ole auennut, kastunut tai vahingoittunut. Hävitä laite, jos pakkaus on auennut, kastunut tai vahingoittunut.

5.2 Auki pysyminen on varmistettava, ennen kuin laitetta käytetään automaattisen injektorin kanssa. Jos käytettävän automaattisen injektorin paine on suurempi kuin 300 psi, laite voi vahingoittua tai alkaa vuotaa.

Katetria ei saa taivuttaa eikä tukkia automaattisen injektorin käytön aikana. Varmista, että injektori on kalibroitu oikein ja pysähtyy automaattisesti suurimman sallitun paineen (300 psi) ylityessä.

6. VAROTOIMET:

6.1 Laite vähentää tahattomien pistojen vaaraa. Terveysthuoltohenkilöstön tulisi näiden ohjeiden lisäksi noudattaa CDC- ja OSHA-standardeja (Yhdysvalloissa) tai vastaavia paikallisia veren välityksellä leviäviä taudinaiheuttajia koskevia määräyksiä, kun suonen sisäisen katetrin käyttö aloitetaan ja kun katetri pidetään paikallaan ja hävitetään. Näin vältetään verelle altistumisesta aiheutuvia riskejä.

6.2 Noudata katetrin asettamista, paikallaan pitämistä ja poistamista koskevia laitoksen sääntöjä ja käytäntöjä.

6.3 Katetri on sisäänviejäneulaa lyhyempi. Siksi verta saattaa virrata katetriin, ennen kuin katetrin kärki on kokonaan verisuonessa. Vie tarvittaessa katetria ja neulaa yhdessä hieman eteenpäin, jotta katetri varmasti työnnytty kokonaan verisuonen sisään. Jotta pistos ei vahingossa läpäise suonen takaseinämää, laske neulaa, kunnes se on samansuuntainen ihon kanssa.

6.4 Estä vuodot varmistamalla, että infuusion ja kannan liitos on tarpeeksi tiukka.

6.5 Varmista, että katetri on tukevasti paikallaan potilaassa. Jos katetri ei ole tukevasti paikallaan, suoniyhteys saattaa katketa.

7. KÄYTTÖOHJEET:

Suonen sisäistä katetria asetettaessa, käytettäessä ja poistettaessa on noudatettava varotoimia veren välityksellä leviävillä taudinaiheuttajille altistumiseen liittyvien riskien vuoksi.

7.1 Valitse pistoskohta ja valmisteile se pistosta varten laitoksen käytäntöjen mukaan. Aseta kiristysside.

7.2 Irrota suojarahkki vetämällä suoraan ulospäin ja tarkasta laite. Varmista, että väristä tunnistettava katetrin kanta on tukevasti paikallaan. Tarkista, että terän viisto puoli on ylöspäin.

7.3 Pidä laitteesta kiinni sen läpikuultavan, lieriönmuotoisen säiliön kohdalta. Tarkista, että neulan kannan kotelon litteä osa ja terän viisto puoli ovat ylöspäin.

7.4 Aseta katetri verisuoneen vetämällä ihoa hieman ja työntämällä neula ihoon ja verisuoneen sopivassa kulmassa.

7.5 Kun neula on työnnyt verisuoneen, verta alkaa virrata säiliöön.

7.6 Pienennä kulmaa ja vie katetria hieman eteenpäin, jotta se varmasti työnnytty verisuonen sisään.

7.7 Irrota kiristysside.

7.8 Ennen kuin irrotat neulan, paina verisuonta sormella distaalisesti katetrin kärjestä ja kiinnitä katetrin kanta. Irrota neula vetämällä suoraan taaksepäin. Kärjen suojuus kiinnittyy automaattisesti neulan kärjen päälle.

HUOMAA: Kun suojattu neula poistetaan katetrin kannasta, tuntuu hieman vastusta.

7.9 Huomautus: Älä työnnä kärjen suojusta uudelleen kantaan, kun se on irrotettu.

7.10 Kiinnitä infuusioletku ja haavaside laitoksen käytäntöjen mukaan.

7.11 Vie laite heti pistoja ja vuotoja kestävään, kertakäyttöisille teräville välineille tarkoitettuun jäteastiaan.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, Jelco designmerkki ja Smiths Medical designmerkki ovat Smiths Medical' in tavaramerkkejä. ®- merkki tarkoittaa, että tavaramerkit on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa sekä eräissä muissa maissa. Kaikki muut mainitut nimet ja merkit ovat omistajiensa tavaramerkit, tavaramerkkejä tai palvelumerkkeitä. Smiths Medicalin ja Intuitive Surgicalin välillä ei ole yhteyttä.

© 2012 Smiths Medical. Kaikki oikeudet pidätetään.

f

Kertakäyttötuote.

Ei saa käyttää uudelleen: Lääkinnälliset tarvikkeet vaativat materiaalin erityisominaisuuksia toimiakseen halutulla tavalla. Nämä ominaisuudet on vahvistettu vain yhtä käyttökertaa varten. Yritykset käsitellä tarvikkeita uudelleenkäyttöä varten voi vaurioittaa tarviketta tai johtaa toiminnon huonontumiseen.

Steriili kunnes yksittäispakkaus avataan tai vaurioituu.

Hävitettävä yhden käyttökerran jälkeen. Älä steriloï uudestaan.