



FI ⚠ Huomio!
📖 Lue turvallisuusohjeet hemoglobiini-mikrokyvettien varastointia ja käsittelyä varten

Hemoglobiini-mikrokyvetit on tarkoitettu yksinomaan hemoglobiinin määrittämiseen kapillaariverestä ja laskimoverestä, niitä käsitellään seuraavilla laitteilla: Hemo_Control, Hemo_Control Manager, Hemo_Vet, Hemo_Vet Manager. Vain pätevä ammattihenkilöstö saa käyttää niitä.

📖 Katso lisätietoja vastaavan laitteen käyttöohjeesta.

Kyvetit varastoidaan alkuperäispakkauksessa lämpötilassa 15°C – 30°C. Aukaisemattomat purkit ovat käyttökelpoisia merkittyyn säilyvyyspäivämäärän asti. Purkin avaamisen jälkeen kyvetit säilyvät oikein käsiteltyinä ja oikein määritetyissä olosuhteissa 3 kuukautta.

Ota vain yksi kyvetti purkista kerralla. Sulje purkki jälleen huolellisesti heti kyvetin ottamisen jälkeen (**katso kuva 1.**). Varmista, että kyvettipurkin kansi on aina täysin suljettu (**katso kuva 2.**).

Jos kansi ei ole täysin suljettu (**katso kuva 3.**), kosteus voi päästä purkkiin ja heikentää kyvetissä olevien reagenssien suorituskykyä. Tällaisten kyvettien käyttö voi johtaa väärin tuloksiin. Älä käytä kyvettejä purkista, joka ei ole ollut oikein suljettu!

📖