



VASTASYNTYNEIDEN PITUUSMITTARI AMMATTIKÄYTTÖÖN MALLI WH80



Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä

HAKEMISTO

1. TEKNISET ERITELMÄT JA KÄYTTÖ	2
2. BABYTWO-VAUVAVAA'AN PITUUSMITTARIN KOKOONPANO	2
3. MITTAUS.....	3



HUOMIO!

Käyttäjien on luettava huolellisesti tämä opas, noudatettava sen sisältämiä ohjeita ja tutustuttava laitteen oikeaoppiseen käyttöön ja huoltoon.

- Säilytä tätä opasta ja vaatimustenmukaisuusvakuutusta tiedonhakuun ja henkilöstön koulutuksen apuvälineenä
- Tuotteen paremman ja pidemmän keston varmistamiseksi se on hyvä puhdistaa huolella säännöllisesti.
- Laite on puhdistettava pehmeällä, veteen tai mietoon pesuaineeseen kostutetulla liinalla, välttäen liuottimien tai hankaavien aineiden käyttöä.
- Laitteen pitkäaikaisen äyttämättömyyden aikana poista paristot päätteestä.
- Kuljetuksen aikana varo altistamasta laitetta iskuille tai liialliselle mekaaniselle kuormitukselle.
- Korjauksen tai teknisen tuen tapauksessa käänny oman jälleenmyyjäsi tai valtuutetun tukikeskuksen puoleen ottamalla yhteyttä: **service2@wunder.it** tai **sales@wunder.it**

1. TEKNISET ERITELMÄT JA KÄYTTÖ


TEKNISET TIEDOT

MITTAUSALUE	35~80cm
JAKAUTUMA	1mm
MITAT	W87 x L30 x H7cm
PAINO	700g
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	10°C~40°C


2. BABYTWO-VAUVAVAA’AN PITUUSMITTARIN KOKOONPANO

Asenna pituusmittari seuraavasti:

A) Kiinnitä pituusmittarin pidike punnitustasoon kahdella mukana toimitetulla ristipääruuvilla (Kuva a)	Kuva A	
B) Aseta pituusmittari punnitustasolle aiemmin kiinnitettyyn tukeen (Kuva b)	Kuva B	
C) Asennus on nyt valmis (Kuva c)	Kuva C	

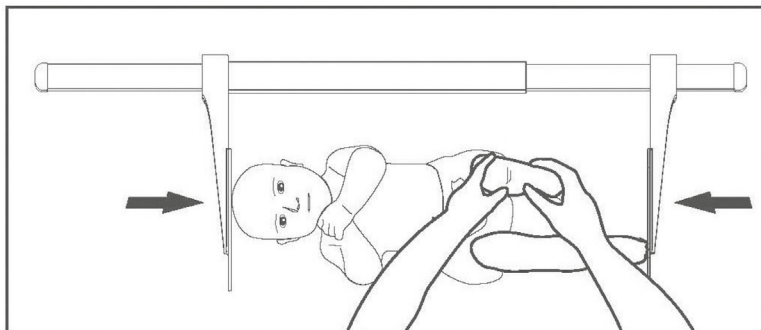3. MITTAUS

1. Nojaa lapsen pää kevyesti vasemmalla puolella olevaan kapulaan
2. Venytä lapsen jalkoja

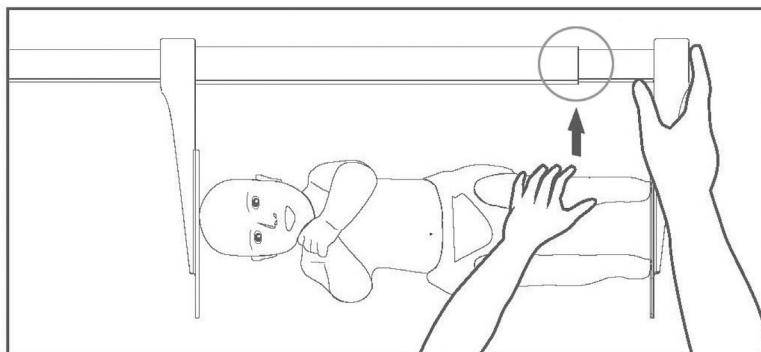

3. Siirrä oikeaa kapulaa, kunnes se koskettaa lapsen jalkoja
4. Lapsen pituus luetaan pituusmittarin punaisesta viivasta



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it