

SCHERMO FACCIALE ANTI-NEBBIA MONOUSO - ANTI-FOG DISPOSABLE FACE SHIELD - ÉCRAN FACIAL ANTI-BUÉE JETABLE - PANTALLA FACIAL DESECHABLE ANTINIEBLA - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL ANTI-FOG - ANTI-BESCHLAG-EINWEG-GESICHTSSCHILD - ΑΝΤΙΟΜΙΧΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - JEDNORAZOWA OSŁONA TWARZY ANTYFOGOWA - ECRAN FACIAL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ANTI-ABURIRE - JEDNORÁZOVÝ OBLIČJOVÝ ŠTÍT PROTI ZAMLŽOVÁNÍ - ANSIKTSVISIR MED ANTI-IMBILDNINGSFUNKTION FR ENGÅNGSBRUK - KERTAKÄYTTÖINEN HUURTEENESTOKA-SVOSUOJA - JEDNORAZOVÝ TVÁROVÝ ŠTÍT ODOLNÝ VOČI ZAHMLIEVANIU - ANTICONDENS GELAATSSCHERM VOOR EENMALIG GEBRUIK - JEDNOKRATNI VIZIR PROTIV MAGLJENJA - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - DUGFRI ANSIGTSSKÆRM TIL ENGANGSBRUG - ЛИЦЕВ ЩИТ ПРОТИВ ЗАМЪГЛЯВАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - NERASOJA-NTIS VIENKARTINIS APSAUGINIS VEIDO SKYDELIS - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS PRETAIZSVĪŠANAS SEJAS AIZSARGS - UDUVASTANE ŪHEKORDNE NĀOKAITSE - TÅKEHEMMENDE ANSIKTSSKJERM TIL ENGANGSBRUK - دح او ةرم لام عتس الل بابض لل داض م هج و عرد

SUOMALAINEN Kuvaus: Huurteenestokasvosuoja on valmistettu PET-kalvosta, jossa on suojakalvo, vaahtomuovituki ja joustonauha.
Käyttöaihe: Huurteenestokasvosuojaa käytetään kasvojen suojaamiseksi mahdolli-selta kontaminaatiolta veren patogeeneilta, kehon nesteiltä tai haitallisten kemikaalien roiskeilta tutkimuksen tai hoidon aikana.
Vasta-aiheet: Ei ole.
Tuotteen haittavaikutukset: Tällä tuotteella ei ole haittavaikutuksia.
Varoitus:

1. Erittäin korkealle ympäristölle altistaminen saattaa johtaa huurteenestovaikutuksen menetykseen.
2. Käyttö tulee keskeyttää vaurion tai käytön aikaisen löystymisen tapauksessa.
3. Älä koske linssien keskiosaan käytön aikana.
4. Kasvojen ihon kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvat materiaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita herkissä käyttäjissä.

Käyttö:

1. vaihe: Poista sisäosan suojakalvo.
2. vaihe: Vedä joustonauhasta ja aseta päähän.

Säilytys: Säilytä tuotetta kuivassa paikassa lämpötilassa 0-30 °C.

Pidä kaukana auringonvalosta.

GIMAN TAKUUEHDOT Gimana 12 kuukauden B2B-vakiotakuuta sovelletaan à l'abri de la lumière directe du soleil.

