


- I Semi-maschere filtranti monouso  
 GB Single-use filtering half-masks  
 D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken  
 F Demi-masques filtrants jetables  
 E Semimáscaras filtrantes desechables  
 P Semimáscaras filtrantes de utilização única  
 TR Tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri  
 NL Halvegeleatsmasker met filter voor eenmalig gebruik  
 S Filterande halvmasker för engångsbruk  
 FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit  
 CZ Filtrační polomaska na jedno použití  
 PL Maski ochronne jednorazowego użycia  
 GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης  
 HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrijebu

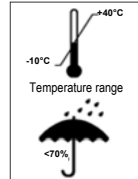

Max. Relative humidity  
 CONDIZIONI DI STOCCAGGIO  
 STORAGE CONDITIONS  
 CONDITION DE STOCKAGE



SUOMI	KÄYTTÖOHJEET
<p><b>TÄRKEÄÄ:</b> Seuraavassa kuvailut suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit jaetaan 3 luokkaan - FFP1, FFP2 ja FFP3. Tarkista ennen käyttöä, mihin luokkaan naamari kuuluu standardin EN 149:2001+A1:2009 mukaan, sekä soveltuvuus käyttötyhteyteen. Luokka on merkitty pakkaukseen ja puolinaamarin. Tuotteen viimeinen käyttöpäivä on merkitty sen pakkaukseen.</p> <p><b>KÄYTTÖTARKOITUS:</b> suojaus pölyiltä ja kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta (esim. öljysumu).</p>	
<p>FFP3 ■■■■■ FFP2 ■■■■■ FFP1 ■■■■■</p>	
<p>Tarkista ennen käyttöä, että naamari on ehjä. Jos huomaat repeämiä ja/tai tahroja, pyydä valtionaamari. Merkintään sisältyvä viite NR tarkoittaa, että naamaria ei voida käyttää uudelleen. Se tulee heittää roskikseen työvuoron päätyttyä. Symboli D tarkoittaa, että naamarit ovat läpäisseet tukkeutumatta toimivuustestin, joka tehtäin dolomiittipölyllä. Suodattava puolinaamari FFP3 tai FFP2 tarjoaa myös luokan FFP1 sisältämän suojauksen.</p> <p><b>NAAMARIN SOVITUSOHJEET</b></p> <p>7. Työnää sormi naamarin sisäpuolelle. Taivuta nenäsilta somen ympärille antaaksesi sille nenän muodon.        8. Pidä naamaria kädessä ja aseta kuminauhan alempi osuus päähän niskaan taakse, niin että se asettuu korvien alapuolelle.        9. Nosta kuminauhan ylempi osuus ja aseta se pään yläosaan korvien yläpuolelle.        10. Muotoile mahdollinen nenäsilan kiinnike kummallakin kädelläsi nenän ympärille ja säädä kuminauhan ylemmän ja alemman osuuden kireyttä erityisen soljen (jos kuuluu varustukseen) avulla, jotta naamari asettuu tiivistä kasvoja vasten.        11.(a) Venttiillittömän naamarin asianmukaisen asetuksen testaus: aseta kätesi naamarin päälle kuten kuvassa 5 ja hengitä ulos voimakkaasti. (b) Venttiillillä varustetun naamarin asianmukaisen asetuksen testaus: aseta kätesi naamarin päälle kuten kuvassa 5 ja hengitä sisään voimakkaasti. Jos ilmaa tulee ulos naamarin reunoilta tai virtaa sen sisälle reunoilta, aseta puolinaamari uudelleen kasvoille ja kiristä tarvittaessa kuminauhan mahdollisen soljen/hihnojen avulla.        12. Vaihda naamari välittömästi, jos koet hengityksen olevan vaikeaa, jos naamari vaurioituu tai jos se ei asetu asianmukaisesti kasvoja vasten.</p> <p>Näiden ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää, jotta hengityksensuojaimen käyttö on turvallista.</p> <p><b>VAROITUKSET: [HS - Henkilönsuojain]</b></p> <p>Ettei naamari asetu tiivistä kasvoja vasten, älä mene potentiaalisille vaara-alueille.        Ettei tämän tiedotuksen ohjeita noudateta, henkilönsuojaimen käyttö saattaa aiheuttaa loukkausta tai menettymisen.        On erittäin tärkeää valita asianmukainen hengityksensuojain terveyden suojaamiseksi. Ota yhteys teollisuushygienian koulutettuun henkilöön tai työsuojelusasiantuntijaan ennen henkilönsuojaimen käyttöä saadaksesi selville sen sopivuuden käyttötarvikkeeseen.        Tämä tuote ei anna happea. Käytä sitä ainoastaan asianmukaisesti ilmastoidussa tilassa, jossa hapensaanti on riittävä elämän ylläpitämiseksi. Naamarin käyttöpömpäristön happea koskevat rajoitukset saattavat vaihdella valtioiden välillä. Tarkista käyttövaltiossa määritellyt parametrit. Eleco s.r.l. ei suosittele kuitenkaan käyttöä tiloissa, joiden happipitoisuus on alle 19,5 %. Älä käytä, jos epäpuhtauksien pitoisuudet ovat välittömästi vaarallisia terveydelle tai hengelle. Älä käytä räjähdysvaarallisessa tilassa. Poistu työllästä välittömästi, jos (a) hengittäminen muuttuu vaikeaksi tai (b) koet ahdistusta tai huimausta. Parha. viiksel yms. sekä hengitysvaikeudet tai -sairaudet saattavat vähentää suodattavien puolinaamarien tehoa. Älä muuta tai korjalle suodattavaa puolinaamaria millään tavoin. Ainoastaan kertakäyttöön. Ei tarvitse huolta. Heitä puolinaamari roskien yhtenä käyttökerran jälkeen. Säilytä käyttämättömät puolinaamarit ehjässä pakkauksessaan auringonvalolta suojatussa tilassa. - Mallin tunnistuskoodi on tuotteen pakkauksessa.</p>	