



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO COLLO E SPALLE

NECK AND SHOULDER HEATING PAD

COUSSIN CHAUFFANT COU ET ÉPAULES

ALMOFADA DE AQUECIMENT DO PESCOÇO E OMBROS

NACKEN- UND SCHULTERWÄRMEKISSEN

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΩΜΟΥΣ

**PODUSZKA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA KARKU
I RAMION**

ZAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK NA KRK A RAMENA

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR PENTRU UMERI ȘI GÂT

VÄRMEDYNA FÖR NACKE OCH AXEL

WARMTEKUSSEN NEK EN SCHOULDERS

KAULAN JA OLKAPÄIDEN LÄMPÖTYYNY

GIMA 28674

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.

No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China

Kevin@yjdjie.net

Made in China

REF SS02C(60*62)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



SUOMALAINEN

Käyttöopas SS02C(60*62)

TÄRKEÄÄ TIETOA! SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN!

Lue käyttöopas ja erityisesti turvallisuusohjeet huolella ennen tämän laitteen käyttöä ja pidä opas tallessa tulevaa tarvetta varten.

Jos annat tämän laitteen jollekin muulle, on tärkeää, että annat myös nämä ohjeet.

Tämä käyttöopas kuuluu tälle laitteelle. Se sisältää tärkeää tietoa käynnistyksestä ja käytöstä. Lue käyttöopas huolella. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai laitteen vaurioitumiseen.



VAROITUS
Näitä varoituksia tulee noudattaa käyttäjän tapaturman välttämiseksi.



VAROVAISUUTTA
Näitä huomioita tulee noudattaa laitteen vaurioitumisen välttämiseksi.



HUOMIO
Nämä huomiot antavat sinulle hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.



luokan II laite



Tuote on EU-direktiivin mukainen



Noudata käyttöohjeita



Tuotekoodi



Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti



Eränumero



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely



Älä puhko lämpötyynyä!



Älä käytä lämpötyynyä, kun se on taitettuna!



Hyvin pienet lapset (0–3-vuotiaat) eivät saa käyttää tuotetta!



Käytä lämpötyynyä vain sisätiloissa!



Lämpöpehmuste voidaan pestä käsin! Voit silittää tyynynpäällisen normaalissa pesuohjelmassa maks. 30 °C:een lämpötilassa!



Ei saa kloorata!



Älä kuivaa lämpötyynyä kuivausrummussa! Tyynynpäällistä ei saa laittaa kuivaimeen!



Älä silitä lämpötyynyä! Voit silittää tyynynpäällisen alhaisessa lämpötilassa!



Ei saa kuivapestä!

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisteja koskevat tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan ja heille on annettu ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Ennen laitteen liittämistä teholahteeseen varmista, että arvokilvessä ilmoitettu syöttöjännite soveltuu verkkojännitteeseen.
- Tarkista sähköinen olkapääpehmuste ennen kutakin käyttökertaa kulumien tai vaurion varalta.
- Älä käytä, jos havaitset sähköisessä olkapääpehmusteessa, kytkimessä tai johdoissa kulumista, vaurioita tai merkkejä virheellisestä käytöstä.
- Palauta toimittajalle.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain toimittaja, valtuutettu jälleenmyyjä tai pätevä henkilökunta.
- Sähköistä olkapääpehmustetta tulee käyttää vain sen ohjekirjassa kerrotun käyttötarkoituksen mukaan.
- Käytä vain sähköisenä olkapääpehmusteena.
- Älä käytä sähköistä olkapään pehmustetta pienillä lapsilla tai vammaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat hoitoa tai eivät tunne kuumuutta.
- Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Sähköistä olkapääpehmustetta ei saa käyttää taitettuna, rypistettynä tai patjan ympärillä olevana.
- Käytön aikana ohjauskytkintä ja johtoa ei saa asettaa sähköisen olkapääpehmusteen päälle eikä alle eikä peittää mitenkään.
- Sähköiseen olkapääpehmusteeseen tai sen lähelle ei saa laittaa nuppineuloja tai muita teräviä esineitä.
- Älä koskaan jätä sähköistä olkapääpehmustetta päälle ilman valvontaa.
- Laitte on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön eikä sitä tule käyttää sairaaloissa.
- Älä koskaan koske veteen pudonneeseen sähköiseen olkapääpehmusteeseen. Kytke se irti verkkovirrasta välittömästi.
- Älä käytä sähköistä olkapääpehmustetta kosteassa tai märässä ympäristössä tai jos sähköinen olkapääpehmuste itsessään on kostea. Voit käyttää sitä vasta kun se on kokonaan kuiva.
- Älä koskaan altista ohjauskytkintä tai johtoja minkäänlaiselle kosteudelle.
- Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista.
- Älä koskaan kanna, vedä tai käännä sähköistä olkapääpehmustetta virtajohdosta äläkä päästä johtoa sotkeutumaan.
- Älä korjaa sähköistä olkapääpehmustetta itse, jos se vaurioituu tai siinä on toimintahäiriö.
- Korjaukset saa tehdä vain valtuutettu ja erikoistunut jälleenmyyjä tai muu soveltuvasti pätevä henkilökunta.
- Sähköistä olkapääpehmustetta saa käyttää vain erityisen ohjausyksikön kanssa.
- Ei saa kuivapestä.
- Puhdista olkapääpehmuste pesemällä se käsin enintään 30 °C:eesa (suositeltu).

- Konepese olkapääpehmuste (enintään) 30°C:essä alhaisella mekaanisella vaikutuksella ja linkouksella sillä voimakas linkous voi vahingoittaa sisäisiä johtoja.
- Kun varastoit laitteen, anna sen jäähtyä ennen taittamista. Kun varastoit sähköisen olkapääpehmusteen, älä laita sen päälle mitään esineitä vääntymisen ennaltaehkäisemiseksi.

KÄYTTÖ

- Liitä sähköinen olkapääpehmuste irrotettavalla virtaliittimellä. Liitä virtajohto pistorasiaan.
- Sähköinen olkapääpehmuste lämpenee nopeammin, kun asetat sen aluksi korkeaan lämpötilaan.
- Suosittelemme matalan lämpötilatason valintaa, kun olkapääpehmustetta käytetään usean tunnin ajan.
- Aseta sähköinen olkapääpehmuste olkapäällesi ja napita se kunnonlla, kun lämpötila on sopiva.

Lämpötila-asetukset

Taso: 0=Pois päältä (ilman merkkivaloa)

1=Alhainen lämpö (merkkivalon kanssa)

2=Keskisuuri lämpö (merkkivalon kanssa)

3=Suuri lämpö (merkkivalon kanssa)

Automaattinen sammutusturvallisuustoiminto

Sähköinen olkapääpehmuste sammuu automaattisesti

90 minuutin jälkeen. Jos haluat laittaa

sähköisen olkapääpehmusteen takaisin päälle, aseta lämpötila-asetus ensin tasolle "0" ja valitse sitten haluamasi lämpötilatase noin 5–10 minuutin kuluttua.

TÄRKEÄÄ: SAMMUTA OLKAPÄÄPEHMUSTE, KUN LÄMMITYSTÄ EI TARVITA.

Irrota virtapistoke aina pistorasiasta, kun et käytä sitä.

ÄLÄ peitä millään materiaalilla, kuten tällä tai tyynyllä. Älä kohdistaa painetta kytkimeen.

PUHDISTUS JA HOITO

- Irrota virtapistoke aina pistorasiasta ennen sähköisen olkapääpehmusteen puhdistusta.
- Ennen pesua kytke se irti verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä kokonaan.
- Irrota ohjauskytkinysikkö sähköisestä olkapääpehmusteesta alapuolen liittimestä.
- **TÄRKEÄÄ:** Älä koskaan upota virtajohtoa tai ohjauskytkinysikköä veteen tai nesteeseen, sillä takuu ei kata siitä syntyviä vaurioita.
- Puhdista olkapääpehmuste pesemällä se käsin enintään 30°C:essä (suositeltu).
- Voit myös pestä olkapääpehmusteen pesukoneessa enintään 30°C:een lämpötilassa pienellä mekaanisella vaikutuksella ja linkouksella. Tuotteen käyttöä pidentämiseksi käsinpesua suositellaan.
- Kuivaa sähköinen olkapääpehmuste asettamalla sen kosteutta imevälle pyyhkeelle tai matolle. Kun sähköinen olkapääpehmuste on täysin kuiva, liitä takaisin irrotettava tehonsäädin. Sähköistä olkapääpehmustetta saa käyttää vain mukana toimitetun ohjausyksikön kanssa.

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan



Hävittäminen: Tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käyttäjien on hävitettävä romutettavat laitteet viemällä ne sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen.