



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINTURA RISCALDANTE

WAIST WRAP HEATING PAD

CEINTURE CHAUFFANTE

ALMOFADA D AQUECIMENTO D ENROLAR À CINTURA

HEIZWICKELKISSEN FÜR DIE HÜFTE

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ

**PAS ŁĘDŹWIOWY ELEKTRYCZNY
ROZGRZEWAJĄCY**

ZAHŘÍVACÍ BEDERNÍ PÁS

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR CU CUREA PE TALIE

VÄRMEDYNA MED MIDJEBAND

WARMTEGORDEL BUIK EN RUG

VYÖTÄRÖLLE KIEDOTTAVA LÄMPÖTYYNY

REF SS02A(29*69) (GIMA 28675)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



SUOMALAINEN

Käyttöopas SS02A(29*69)

TÄRKEÄÄ TIETOA! SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN!

Lue käyttöopas ja erityisesti turvallisuusohjeet huolella ennen tämän laitteen käyttöä ja pidä opas tallessa tulevaa tarvetta varten. Jos annat tämän laitteen jollekin muulle, on tärkeää, että annat myös nämä ohjeet.

Tämä käyttöopas kuuluu tälle laitteelle. Se sisältää tärkeää tietoa käynnistyksestä ja käytöstä. Lue käyttöopas huolella. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai laitteen vaurioitumiseen.


VAROITUS

Näitä varoituksia tulee noudattaa käyttäjän tapaturman välttämiseksi.


VAROVAISUUTTA

Näitä huomioita tulee noudattaa laitteen vaurioitumisen välttämiseksi.


HUOMIO

Nämä huomiot antavat sinulle hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.



luokan II laite



Tuote on EU-direktiivin mukainen



Noudata käyttöohjeita



Tuotekoodi



Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti



Eränumero



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely



Älä puhko lämpötyynyä!



Älä käytä lämpötyynyä, kun se on taitettuna!



Hyvin pienet lapset (0–3-vuotiaat) eivät saa käyttää tuotetta!



Käytä lämpötyynyä vain sisätiloissa!



Lämpöpehmuste voidaan pestä käsin! Voit silittää tyynynpäällisen normaalissa pesuohjelmassa maks. 30 °C:een lämpötilassa!



Ei saa kloorata!



Älä kuivaa lämpötyynyä kuivausrummussa! Tyynynpäällistä ei saa laittaa kuivaimeen!



Älä silitä lämpötyynyä! Voit silittää tyynynpäällisen alhaisessa lämpötilassa!



Ei saa kuivapestä!

TURVALLISUUSTIETOA

- Tarkista lämpöpehmuste ennen kutakin käyttökertaa kulumien tai vaurion varalta.
- Älä käytä, jos havaitset laitteessa, kytkimessä tai johdoissa kulumista, vaurioita tai merkkejä virheellisestä käytöstä tai jos laite ei toimi.
- Ennen laitteen liittämistä teholahteeseen varmista, että arvokilvessä ilmoitettu syöttöjännite soveltuu verkkojännitteeseen.
- Älä taita tai rypistä lämpöpehmustetta käytön aikana.
- Älä puhko pehmustetta äläkä laita nuppineuloja tai muita pistäviä tai teräviä esineitä pehmusteeseen.
- Älä käytä laitetta lapsiin tai henkilöihin, jotka ovat vammaisia, nukkuvat tai eivät tunne kuumuutta (nämä henkilöt eivät kykene reagoimaan ylikuumenemistapauksessa).
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, sillä he eivät kykene reagoimaan ylikuumenemisen tapauksessa.
- Laitetta eivät saa käyttää nuoret, yli 3-vuotiaat lapset, ellei vanhempi tai huoltaja ole säätänyt ohjausyksikköä sopivasti tai ellei lapsi ole saanut riittävästi tietoa ohjausyksikön oikeaoppisesta käytöstä.
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisteja koskevat tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan ja heille on annettu ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Älä koskaan käytä pehmustetta ilman valvontaa.
- Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön eikä sitä tule käyttää sairaaloissa.
- Älä nukahda lämpöpehmusteen käytön aikana.
- Lämpötyynyn pidentynyt käyttö korkeassa asetuksessa voi johtaa ihon palovammoihin.
- Älä peitä pehmustetta millään muilla tyynyillä. Ohjauskytkintä ei saa peittää tai asettaa pehmusteen päälle tai alle yksikön toimiessa.

- Älä istu lämpöpehmusteen päälle. Aseta pehmuste sen sijaan käsiteltävän kehonosan päälle tai sitä vasten. Käyttötarkoituksena on vain selän ja niskan käsittely.
- Älä koskaan koske veteen pudonneeseen lämpöpehmusteeseen. Kytke yksikkö irti verkkovirrasta välittömästi.
- Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista.
- Älä koskaan kannna, vedä tai käännä lämpöpehmustetta virtajohdosta äläkä päästä johtoa sotkeutumaan.
- Älä käytä märkää lämpöpehmustetta ja käytä sitä vain kuivassa tilassa (ei kylpyhuoneessa tai vastaavissa ympäristöissä).
- Ohjaimia ja johtoja ei saa altistaa minkäänlaiselle kosteudelle.
- Jos vika ilmenee, älä yritä korjata yksikköä itse. Korjaukset saa tehdä vain valtuutettu ja erikoistunut jälleenmyyjä tai muu soveltuvasti pätevä henkilökunta.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vain valmistaja, tämän huoltoedustaja tai vastaavasti pätevät henkilöt saavat vaihtaa sen vaarojen välttämiseksi.
- Vaurioitunut virtajohto tulee vaihtaa samantyyppiseen virtajohtoon.
- Lämpöpehmustetta saa käyttää vain mukana toimitetun säätimen

kanssa (SS02).

- Kun varastoit lämpöpehmusteen, anna sen jäähtyä ennen kuin taitat sen.
- Jos sinulla on terveyttä koskevia huolenaiheita, käänny lääkärin puoleen ennen lämpöpehmusteen käyttöä.
- Älä käytä lämpöpehmustetta turvonneissa, vaurioituneissa tai tulehtuneissa kehonosissa.
- Jos sinulla on jatkuvaa kipua lihaksissa ja nivelissä, kerro siitä lääkärillesi. Jatkuva kipu voi kieliä vakavasta sairaudesta.
- Jos tunnet kipua tai epämiellyttävää tunnetta yksikön käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi

PUHDISTUS JA HUOLTO

Lämpöpehmuste

- Ennen pehmusteen puhdistusta kytke se irti verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä vähintään kymmenen minuutin ajan.
- Lämpöpehmuste on varustettu irrotettavalla johdolla. Irrota pistoke ja poista johto lämpöpehmusteesta.
- Voit pestä lämpöpehmusteen varoen käsin. Paras tapa on asettaa lämpöpehmuste haaleaan veteen, jossa on vähän mietoa pesuainetta, ja puristaa se sitten varoen kuivaksi.
- Huuhtelee lämpöpehmuste monta kertaa kaiken pesuaineen poistamiseksi.
- Säilytä yksikköä puhtaassa ja kuivassa paikassa tasaisena ilman, että sitä peittäisi tai sen päällä olisi mitään.
- Käytä laitetta vasta kun se on kokonaan kuiva.

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan



Hävittäminen: Tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käyttäjien on hävitettävä romutettavat laitteet viemällä ne sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen.