


Käyttöohjeet

HEINE otoskoopit BETA 200® ja K180®

Lue nämä ohjeet tarkoin ennen otoskoopin käyttöönottoa ja säilytä laitteen lähistöllä.

 Tämä tuote on hävitettävä erilliskeräyksellä maakohtaisia sähkö- ja elektroniikka-romun kierrätysohjeita noudattaen.

Tietoa turvallisuudesta

Käyttö: HEINE otoskooppia käytetään korvan alueen, yms. ulkoiseen tutkimiseen.

Turvallisuus käytettäessä: Käytä vain lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja kahvoja. HEINE otoskooppia saa käyttää korvan tutkimiseen vain, kun siinä on kärki, tai spekola kiinnitettynä. Ilmanpaine-tutkimuksen yhteydessä tulee paineilmaa käyttää varoen.

Huom.: Laitteen toiminta voidaan taata vain käytettäessä HEINE:n alkuperäisiä ladattavia akkuja tai alkaaliparistoja.

Laitteen käyttö

Instrumentilla saa tutkia korvaa vain, jos siinä on asennettuna SANALON S, tai AllSpec -kärki.

- Työnnä kärki (1) instrumentin päähän (2) ja kierrä vähän matkaa myötäpäivään, jotta se lukittuu paikoilleen.
- Kun linsin ikkuna (4) on suljettuna, antaa linssi suunnilleen kolminkertaisen suurennuksen.
- Otoskooppiin (5) on mahdollista liittää palkeet ilmanpainetutkimusta varten. Linsin ikkuna avautuu laitteen huollon helpottamiseksi.

Valaistus: HEINE otoskooppia voidaan käyttää valaistukseen, (esim. ihoa, tai suuta tutkittaessa) joko kärjen, tai spekulin kanssa, tai ilman. Vältä koskettamasta vahingoittunutta kudosta laitteella.

Lampun vaihtaminen

Huom.: laitteen toiminta on taattu vain, käytettäessä aitoja HEINE XHL-polttimoita.

- Irrota otoskooppi kahvasta ja vedä polttimo (6) ulos. Varmista, että uusi polttimo on oikeaa tyyppiä ennen kuin asetat sen paikoilleen.
- Aseta otoskooppi takaisin kahvaan.

Sterilointi ja puhdistus

Otoskoopin päin voi puhdistaa ulkoisesti pehmeällä kankaalla ja sisäosat alkoholiin kastetulla pumpulitupolla. Laitteen voi myös steriloida kaasulla.

SANALON S kärjet voidaan desinfioida tavallisilla desinfiointiainehilla ja ne kestävät keittämisen. Ne voidaan myös steriloida niin usein kuin on tarpeen, kuitenkin korkeintaan 170 °C lämpötilassa.

AllSpec kärjet ja Kertakäyttöiset spekulat tulee hävittää käytön jälkeen. Älä yritä puhdistaa niitä, sillä ne saattavat vahingoittaa ja vahingoittaa potilasta.

Takuu

Poiketen tavanomaisesta kahden vuoden takuusta, myönämme laitteelle viiden vuoden takuun tehdastoimituksesta (pois lukien kulutustarvikkeet kuten polttimet, suppilot ja akut). Takaamme laitteen moitteettoman toiminnan, kun laitetta käytetään asianmukaisesti valmistajan ohjeita noudattaen. Laitteessa takuuaikana esiintyvät materiaali-, valmistus- tai rakenneviat korjataan veloitusetta. Havaittaessa tuotteessa vika ostajan tulee osoittaa, että laitteen takuu on voimassa. Takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, huolimattomasta käytöstä tai muiden kuin alkuperäisten HEINE- varaosien käytöstä tai muiden kuin valtuutetun huoltohenkilökunnan tekemistä muunnoksista tai korjauksista.


Takuu raukeaa moitteettoman toiminnan osalta, jos HEINE tuotetta muokataan osilla tai lisäosilla, jotka eivät kuulu alkuperäiseen HEINE spesifikaatioon ja edelleen mitätöi takuun minkä tahansa tällaisesta modifikaatiosta tai muutoksesta aiheutuneen vaati-muksen osalta.

Takuu raukeaa, jos laitteelle on tehty huoltotöitä muilla kuin Heinen valtuuttamilla henkilöillä tai käyttäjä ei noudata laitteen mukana tulleita käyttöohjeita.

Laitteen **rikkoutumisesta** aiheutuneita välillisiä kustannuksia ei huomioida. Korjaustapauksissa ota yhteys laitteen myyjään.

Myyjä

Päivä

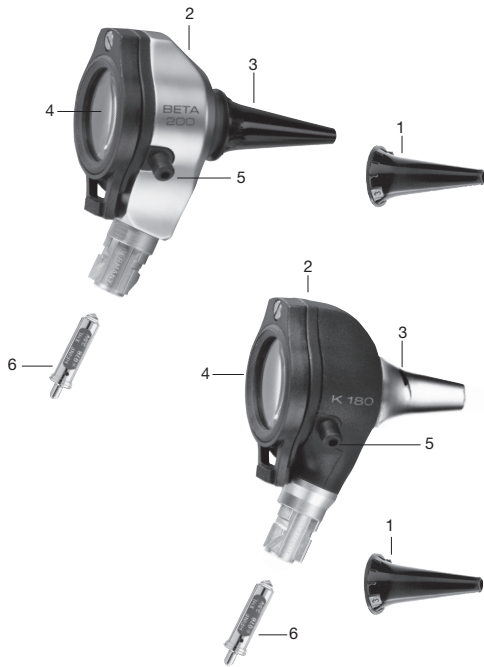

CE 93/42/EWG/CEE/EEC



HEINE AllSpec® Tip dispenser

En ren och ny örontratt till varje patient > Rätt storlek, synlig och alltid nära till hands.

HEINE AllSpec® Tip-dispenser

Voor elke patient een nieuwe schone tip > de juiste maat, goed zichtbaar en direct bij de hand

HEINE AllSpec® suppiloteline

Uusi, puhdas suppilo jokaiselle potilaalle > Oikea suppilokoko, aina näkyvillä ja helposti saatavissa

Dispensador de espéculos HEINE AllSpec®

Para cada paciente um novo espéculo > o tamanho certo, visível e sempre ao alcance dos seus dedos