

FI KÄYTTÖOHJE

Avaa pakkaus ja ota palovammaside pakkauksesta. Levitä geeliä runsaasti palovamma-alueelle ja kiinnitä side kevyesti käyttäen esimerkiksi sideharsoa apuna. Anna geelin vaikuttaa enintään 3 tuntia.

Kemialliset palovammat

Huuhdellaan niiden käyttöohjeiden mukaan, jotka on kyseisestä aineesta annettu.

Kun palovammakohta on huuhdeltu kemikaaleista, voidaan BurnFree käsittely aloittaa.