

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. KÄÄNNY LÄÄKÄRIN PUOLEEN ENNEN KÄYTTÖÄ.

VASTA-AIHEET: Ei tarkoitettu henkilöille, joiden paino on yli 242 lbs (110 kg) - Ei tarkoitettu käytettäväksi jäisillä tai liukkailla alustoilla. - Ei tarkoitettu henkilöille, joilla on lateksiallergia.

OHJEOPAS: Avaa keppi pitämällä sitä kahvasta ja antamalla taitettavien osien avautua maata kohti. Kaatumisen estämiseksi muista aina tarkistaa, että yksittäiset varren osat (kuva 1) ovat tiukasti lukittuina paikoillaan.

VAROITUS ÄLÄ pura kepin runkoa. Kepin sisällä on joustonaru. Sisällä olevan joustonarun hallitsematon vapautuminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja suojaamattomille kehonosille ja erityisesti silmille. Jos joustonaru katkeaa, rispaantuu tai vaurioituu, lopeta käyttö.

ÄLÄ vedä narua tarvittavaa enemmän osien purkamiseksi tai kokoamiseksi.

KEPIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN: Höllennä kierrelukitusta kääntämällä sitä myötäpäivään usean kierroksen verran. Paina lukituspainiketta ja vedä kahvaa ylöspäin pidentämiseksi tai paina kahvaa alaspäin lyhentämiseksi. Muista kiristää uudelleen kierrelukitus, kun olet säätänyt kepin haluamallesi korkeudelle.

VAROITUS Kaatumisen ennaltaehkäisemiseksi varmista aina, että yksittäiset osat on lukittu tiukasti paikoilleen ja että lukituspainike on kokonaan aktivoitu. Varmista aina, että kepin kääntyvä jalka on kierretty tiukasti keppiin kaatumisen estämiseksi.

KEPIN TAITTAMINEN: Keppi voidaan helposti taittaa kätevästi matkustuskokoon erottamalla 4 erillistä varren osaa toisistaan. Tartu kuhunkin varren osaan lähellä niveltä ja vedä ne erilleen. Yksittäiset varren osat taittuvat siististi kasaan.



KEPIN VALOJEN KÄYTTÖ: Kepin kahvan päällä oleva painike aktivoi valot. Kun painiketta painetaan kerran, kepin edessä oleva valo aktivoituu; kun sitä painetaan uudelleen, se sytyttää myös kahvan alaosan punaisen valon. Kolmas painallus sammuttaa ne. Etuvaloa voidaan kiertää valon kohdistamiseksi haluttuun kohtaan.

SOS-SIGNAALI: SOS-signaalin aktivoimiseksi paina kahvan sivussa olevaa painiketta; nyt pohjan valo vilkkuu ja kepeistä kuuluu hälytysääni.

PARITOJEN VAIHTO: Avaa kahvan takana oleva paristokotelo. Poista vanhat paristot ja hävitä ne asiantmukaisesti. Kun käytät 2 AAA-paristoa, aseta ne oikeaoppisen napaisuuden mukaan (plusnapa ulkopuolelle, jossa jousi on). Sulje paristokotelon kansi. Tarkista keppi säännöllisesti kuluminen merkkien, mukaan lukien joustavan narun rispaantumisen tai kumijalkojen kuluminen varalta. Jos havaitset kuluminen merkkejä, lopeta käyttö heti.

VAROITUS Älä käytä erikseen vanhoja ja uusia paristoja. Älä käytä alkalisia vakio (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja keskenään.

GIMAN TAKUUEHDOT: Giman 12 kuukauden B2B-vakiotakuuta sovelletaan.

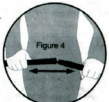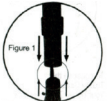

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Довезено от/Dovezeno od/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/مستورد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

