

**BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKŁÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KERKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATINĖRĖSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL**

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tekniset parametrit:

- mitat (P*L*K): Mitat taittamattomana: 196*50*18 (cm) Mitat taitettuna: 106*50*15 (cm)
- Taitettuna pyörätuoliksi: Selkänojan korkeus: 136 cm Istuimen korkeus: 52 cm
- Nettopaino:9 kg Bruttopaino:11 kg
- Kantokyky: 159 kg



Käyttö:

- Kuvassa yksi näytetysti: Kun paarit-pyörätuoli on auki, on käytettävä turvavyötä, kun potilas on paareilla.
- Taita paarit pyörätuoliksi, kuten näytetty kuvassa 2. Taita se ensin ja nosta sitä sitten ylöspäin nuolen suuntaan, jotta saavutat asennon kuvasta 3. Kiinnitä turvapidike (varmistaa, että pidike 2 kiinnittyy turvapulttiin 1).
- Alla olevassa kuvassa näytetään tukijalat: myös toinen, pyörällinen malli on saatavilla. Tuotteen suorituskyky, käyttö, käyttötarkoitus jne. ovat samat
- Kuten kuvassa 4 näytetään, kun paarit ovat taitettuina, niitä on helpompi kuljettaa suljetuissa tiloissa (kun paarit ovat kuvassa 3 näytetyssä tilassa, irrota turvapidike, nojaa jalka pyörien viereiseen tankoon ja nosta selkänojan pehmustettua tankoa ylöspäin tuodaksesi paarit kuvan 1 kokoonpanoon; nyt ne voidaan taittaa).

Käyttötarkoitus:

Tuotetta voidaan käyttää vaikeapääsyisillä alueilla, kuten kapeilla tai mutkaisilla käytävillä tai portailla monissa kerroksissa.

Kunnossapito

- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta (desinfointi mukaan lukien).
- Tarkista säännöllisesti, ovatko osat löystyneet.

Tärkeää

Varmista aina, että turvavyö on hyvässä kunnossa käytön aikana ja että pidike on kiinnitetty kunnolla turvapulttiin, kun paareja käytetään pyörätuolina.

Säilytys ja kuljetus:

- Tätä tuotetta tulee säilyttää syöpymättömässä ympäristössä ja kosteudelta suojassa.
- Tuotetta voidaan kuljettaa tavallisilla kuljetusajoneuvoilla.
- Nouda pakkauksen kuvia säilytystä ja kuljetusta varten

Pakkaus ja lisävarusteet:

- Tämä tuote on pakattu pahvilaatikkoon.
- Lisävaruste: Vaatimustenmukaisuustodistus, käyttöopas.

	Valmistaja		Säilytä kuivassa ja viileässä		Tuoja:
	Tuotekoodi		Ei-steriili		Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti
	Eränumero		Lääkinällinen laite		Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
	Lue käyttöohjeet		Valmistuspäivämäärä		
	Lääkinällinen laite, joka vastaa asetusta (EU) 2017/745				

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-vakiotakuuta sovelletaan.