



CISEAUX POUR MATÉRIEL MÉDICAL

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Dispositifs

Ciseaux pour matériel médical (non stériles, en acier inoxydable).

Caractéristiques du produit

Le produit est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité spécifique pour la production d'instruments médicaux, selon les normes ISO et ASTM.

Pré-nettoyage

Retirez les dépôts grossiers à l'aide d'une éponge de laparotomie et d'eau stérile pendant la procédure.

Nettoyage manuel

Pour minimiser le risque pour le personnel effectuant le nettoyage manuel, il est nécessaire de toujours éviter les éclaboussures et de générer des embruns. Le personnel effectuant le nettoyage manuel doit toujours porter des EPI appropriés.

Les dispositifs doivent être :

- 1) Nettoyés à l'aide d'un chiffon non pelucheux, imprégné d'une solution détergente appropriée, suivi d'un chiffon propre, humide et non pelucheux ; puis
- 2) Séchés à l'aide d'un autre chiffon propre et non pelucheux. Des lingettes imprégnées d'alcool peuvent être utilisées après un processus de nettoyage manuel.

Détergents: Utiliser des détergents spécifiques : ne pas utiliser de détergent à vaisselle courant.

Désinfection

Les instruments à revêtement en poudre/papier GIMA ne sont pas autoclavables, mais peuvent être nettoyés/désinfectés avec des désinfectants tels que Endo Star (désinfectant pour instruments de haut niveau) ou toute autre solution désinfectante/stérilisante supérieure.

Manipulation au point d'utilisation

Ne peuvent être utilisés que dans le but pour lequel ils ont été conçus, uniquement par un personnel qualifié.

Stockage et entretien

Les produits doivent être stockés à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'eau, dans un environnement sûr, sec et frais.

Mise en garde

Ne pas utiliser l'instrument rouillé. Se laver les mains avec un savon antibactérien ou utiliser un désinfectant pour les mains approuvé avant l'utilisation.
Pour un usage professionnel uniquement - désinfecter avant utilisation.

Conclusion

Ce dispositif médical est classé classe I selon le règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) 2017/745.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto PT Código produto		IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante DE Hersteller PT Fabricante		IT Non sterile GB Non-sterile FR Pas stérile ES No estéril PT Não estéril DE Nicht steril		IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical DE Medizinprodukt ES Producto sanitario PT Dispositivo médico
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso DE Gebrauchsanweisung beachten		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabrico DE Herstellungsdatum		IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote DE Chargennummer		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745				IT - Rappresentante autorizzato nel Regno Unito GB - Authorized Representative in the UK FR - Représentant autorisé au Royaume-Uni ES - Representante autorizado en el Reino Unido PT - Representante autorizado no Reino Unido DE - Autorisierter Vertreter im Vereinigten Königreich		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Unique device identifier PT - Identificador exclusivo do dispositivo FR - Identifiant unique de l'appareil DE - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) ES - Identificador de dispositivo único				IT - Rappresentante autorizzato in Svizzera GB - Authorized Representative in Swiss FR - Représentant autorisé au Suisse ES - Representante autorizado en Suíço PT - Representante autorizado no Suíço DE - Autorisierter Vertreter im Schweizer		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen

REF 20520 - 20521 - 20522 - 20529
20531 - 20532 - 20533 - 20534