



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BLOUSE SMMS STANDARD JETABLE

FRANÇAIS

Nom de produit Blouse SMMS standard jetable

Code produit FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

Taille du produit Unité : cm

CODE GIMA	21046	21047	21048	21049
CODE FULL GUARD	FGS-SG-SM50-M	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Tailles	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Longueur (Épaule à ourlet)	120	120	130	140
Largeur (monocouche)	140	150	150	160
Longueur de ceinture	65	65	65	69
Manche longue	58	59	59	61
Écart	±2	±2	±2	±2

Modèle produit Type de blouse. M/L/XL/XXL

Structure et composition Le produit utilise un tissu non tissé SMMS 50g. Ce produit est composé d'un devant, d'un dos, d'une manche, de liens et d'une manchette. Le processus technologique est le suivant : découpe, soudure par ultrasons, attachement, velcro, manchette, pliage, scellage.

Utilisation prévue Ces articles sont stérilisés par la méthode EO et sont utilisés comme barrière contre la pénétration des liquides et des microbes entre le patient et la salle d'opération, les autres dispositifs chirurgicaux et le personnel de la salle

d'opération.

Contre-indication Les produits ne peuvent être utilisés qu'une seule fois immédiatement après l'ouverture de l'emballage. Si l'emballage est endommagé, le produit est humide ou moisi. Ne les utilisez pas.

Comment utiliser le produit Ouvrir l'emballage et sortir le produit, secouer doucement la blouse, soulever les côtés du col, insérer les mains dans les manches, étendre les bras vers l'avant et attacher les ceintures.

Stockage Il doit être stocké dans une salle blanche avec une humidité relative ne dépassant pas 80 %, sans gaz corrosif, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

⚠ Mise en garde

1. Ce produit est un produit jetable, ne pas réutiliser.
2. Ce produit est à usage unique, ne jamais partager votre produit avec un autre.
3. Il est interdit d'utiliser ce produit si l'emballage ou les produits sont endommagés.

Notice: Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.





















Validité 3 ans.

Date de production Voir la date sur l'emballage

Date de péremption Voir la date sur l'emballage


CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

 REF	Code produit		À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
 LOT	Numéro de lot		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Fabricant		Date de fabrication		Dispositif médical
 STERILE EO	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène		Date d'échéance		Ne pas utiliser si le colis est endommagé
	Limite d'humidité		Consulter les instructions d'utilisation		Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser
	Limite de température		Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Fragile, manipulez avec soin
	Ce côté vers le haut		Identifiant unique de l'appareil		

M21046-M-Rev.5-04.25



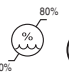



GIMA 21046
GIMA 21047
GIMA 21048
GIMA 21049


 Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic
Development Zone, Xianning City, Hubei
Province, China
Made in China


REF FGS-SG-SM50-M
FGS-SG-SM50-L
FGS-SG-SM50-XL
FGS-SG-SM50-XXL

EC REF ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com




STERILE EO MD