



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

50 g/m²

BLOUSES CHIRURGICALES RENFORCÉES - STÉRILE

FRANÇAIS

Nom de produit Blouse médicale renforcée en SMMS jetable (Stérile)

Code produit FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L, FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

Taille du produit Unité : cm

CODE GIMA	21052	21053	21054	21055
CODE FULL GUARD	FGS-RF-SM50-M	FGS-RF-SM50-L	FGS-RF-SM50-XL	FGS-RF-SM50-XXL
Tailles	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Longueur (Épaule à ourlet)	120	120	130	140
Largeur (monocouche)	140	150	150	160
Longueur de ceinture	65	65	65	69
Manche longue	58	59	59	61
Écart	±2	±2	±2	±2

Modèle produit Type de blouse. M/L/XL/XXL

Structure et composition Le produit utilise un tissu non tissé SMMS 50g. Ce produit est composé d'un devant, d'un dos, d'une manche, de liens et d'une manchette. Le processus technologique est le suivant : découpe, soudure par ultrasons, attachement, velcro, manchette, pliage, scellage.

Utilisation prévue Les produits sont principalement utilisés pour l'isolation générale dans les cliniques externes, les salles, les salles d'inspection, les salles de nettoyage, les laboratoires, etc. Ils sont destinés à être utilisés par les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les cliniques pour maintenir un bon niveau d'hygiène et contribuer au contrôle des infections.

Contre-indication Les produits ne peuvent être utilisés qu'une seule fois immédiatement après l'ouverture de l'emballage. Si l'emballage est endommagé, le produit est humide ou moisi. Ne les utilisez pas.

Comment utiliser le produit Ouvrir l'emballage et sortir le produit, secouer doucement la blouse, soulever les côtés du col, insérer les mains dans les manches, étendre les bras vers l'avant et attacher les ceintures.

Stockage Il doit être stocké dans une salle blanche avec une humidité relative ne dépassant pas 80 %, sans gaz corrosif, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

⚠ Mise en garde

1. Ce produit est un produit jetable, ne pas réutiliser.
2. Ce produit est à usage unique, ne jamais partager votre produit avec un autre.
3. Il est interdit d'utiliser ce produit si l'emballage ou les produits sont endommagés.

Notice: Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Validité 3 ans.

Date de production Voir la date sur l'emballage

Date de péremption Voir la date sur l'emballage

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

Code produit	À conserver à l'abri de la lumière du soleil	À conserver dans un endroit frais et sec	Dispositif médical
Numéro de lot	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745	Date d'échéance	Limite de température
Fabricant	Date de fabrication	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Ce côté vers le haut
Limite d'humidité	Ne pas utiliser si le colis est endommagé	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	Fragile, manipuler avec soin
Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser	Consulter les instructions d'utilisation	Attention : lisez attentivement les instructions (avertissements)	Identifiant unique de l'appareil

GIMA 21052
GIMA 21053
GIMA 21054
GIMA 21055



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

FGS-RF-SM50-M
FGS-RF-SM50-L
FGS-RF-SM50-XL
FGS-RF-SM50-XXL



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

Importé par:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



STERILE EO MD



CE 0123