



Punchs à biopsie jetables

- Lames tubulaires en acier inoxydable sans soudure avec poignée PP et sans piston
- Manche cannelé pour une prise en main et un contrôle assurés
- Identification de la taille sur chaque punch
- Utiliser pour l'incision, la dissection et/ou le comblement des tissus, essentiellement cutanés
- Les punches sont stériles et à usage unique
- Domaine cliniques : dermatologie, gynécologie, pédiatrie

Dimensions :

BP-10F	1.0mm	◦	BP-35F	3.5mm	○
BP-15F	1.5mm	◦	BP-40F	4.0mm	○
BP-20F	2.0mm	○	BP-50F	5.0mm	○
BP-25F	2.5mm	○	BP-60F	6.0mm	○
BP-30F	3.0mm	○	BP-80F	8.0mm	○

Longueur de la lame : 7 mm

Conditionnement : chaque punch est contenu dans un emballage blister, 20 pcs par boîte de distribution, 50 boîtes par carton d'expédition.

Manipulation sans risque

- Conserver tout nouveau produit dans un lieu sec, propre et sûr
- Éviter les températures élevées, l'humidité élevée et l'exposition directe à la lumière du soleil, ne pas mouiller et conserver à température ambiante
- Ne pas conserver avec les produits chimiques ou dans un lieu exposé aux gaz
- Il est nécessaire de vérifier la période d'utilisation sur chaque emballage (conservation 5 ans)
- En vérifiant la période d'utilisation sur chaque emballage et boîte, jeter les produits dont la période d'utilisation est expirée
- Avant chaque utilisation, vérifier que le produit ne présente pas de : composants détachés, tordus, cassés, fendus, usés ou fracturés
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou défectueux. Mettre le produit à l'écart s'il est endommagé
- Réutilisation interdite
- Restérilisation interdite
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Ne pas utiliser si l'asepsie du produit semble compromise par une rupture de l'emballage
- Examiner l'intégrité de l'emballage ainsi que la présence de perforations avant l'ouverture.



kai industries co.ltd, 1110 Oyana, Seki City, Gifu Pref., 501-3992, Japon



kai Europe GmbH, Kottendorfer Straße 5, 42697 Solingen, Allemagne

CE0197

Le produit est conforme aux exigences de la Directive 93/42EEC