

iHealth®

Wireless Body Analysis Scale

FR Balance d'Analyse Corporelle
Connectée

IT Bilancia pesapersona con
analisi corporea wireless

ES Báscula inalámbrica de
análisis corporal

DE Drahtlose Körperanalysewaage

PT Balança de Análise Corporal
sem Fios

NL Draadloze weegschaal voor
lichaamsanalyse

GR Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης



OWNER'S MANUAL

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

ES MANUAL DE USUARIO

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

PT MANUAL DO PROPRIETÁRIO

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

TABLE DES MATIÈRES

USAGE PRÉVU	1
NOTE IMPORTANTE POUR LES UTILISATEURS	1
CONTRE-INDICATION	1
MÉMOIRE HORS LIGNE	2
SPÉCIFICATIONS	2
SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES	3
EXPLICATION DES SYMBOLES	4

USAGE PRÉVU

La balance d'analyse corporelle connectée iHealth est un instrument électronique de précision ne devant être utilisé que par des adultes. Cette balance emploie une méthodologie entièrement électronique et des capteurs de pression afin de mesurer les composants du corps humain de manière automatisée et non-invasive. Les résultats s'affichent et sont stockés sur un iPod touch, un iPhone, ou un iPad avec mention de la date et de l'heure.

NOTE IMPORTANTE POUR LES UTILISATEURS

Les femmes enceintes doivent consulter leur médecin avant utilisation. Certains troubles physiques peuvent affecter les niveaux d'hydratation, pouvant conduire à des résultats imprécis. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre médecin.

Rangez toujours la balance d'analyse corporelle connectée iHealth dans un endroit sec. Afin de garantir des résultats précis, maintenez la balance à distance des champs magnétiques car ces derniers peuvent avoir un impact indésirable ou potentiellement endommager la balance.

CONTRE-INDICATION

N'utilisez jamais ce produit en combinaison avec des appareils électroniques médicaux tels que :

⚠ (1) Les implants électroniques médicaux comme les pacemakers.

⚠ (2) Les systèmes électroniques d'assistance vitale comme les cœurs/poumons artificiels.

⚠ (3) Les appareils médicaux électroniques portatifs comme les électrocardiographes.

Ce produit pourrait causer un dysfonctionnement de ces appareils, représentant un risque considérable pour la santé des utilisateurs.



MÉMOIRE HORS LIGNE

La balance peut stocker jusqu'à 200 résultats de poids par utilisateur. Lorsque la mémoire pour un utilisateur est pleine, les nouvelles mesures effacent les plus anciennes.

SPÉCIFICATIONS

1. Nom du produit : Balance d'Analyse Corporelle Connectée iHealth
2. Modèle : HS6
3. Classification : alimentation interne, pièces appliquées de type BF (quatre électrodes)
4. Alimentation : 4x  Piles AAA 1,5 V
Autonomie : environ 3 mois pour une utilisation quotidienne
5. Plage de mesures :
Poids corporel : 11 lb-400 lb/5 kg-180 kg
Graisse corporelle : 5,0 %-65,0 %
Température : 5 °C - 40 °C (41°F-104°F)
Humidité : 20 - 85 % HR
Résolution d'échelle : à 0,2 lb/0,1 kg près
6. Précision :
Poids corporel : $\pm 1,1$ lb/0,5 kg (11-110 lb / 5 kg-50 kg) ;
 ± 1 % (110-400 lb/50 kg-180 kg)
Graisse corporelle : ± 1 %
7. Température en fonctionnement : 41°F-104°F (5 °C - 40 °C)
8. Humidité en fonctionnement : 20 - 85 % HR
9. Température de stockage et transport : -4°F-131°F (-20 °C - 55 °C)
10. Humidité de stockage et transport : ≤ 90 % HR

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. N'utilisez pas la balance sur un sol inégal, une surface souple ou un tapis car cela pourrait donner lieu à des résultats imprécis.
2. Cette balance d'analyse corporelle connectée a été conçue pour les adultes. Les bébés ou jeunes enfants ou toute personne incapable de se tenir debout sans assistance ne doivent pas utiliser cette balance.
3. Évitez d'utiliser cette balance près de champs magnétiques puissants, tels qu'un four à micro-ondes, etc.
4. Cette échelle conservera ses caractéristiques de sécurité et de performance pendant au moins 10 000 mesures ou deux ans d'utilisation.
5. ⚠ Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
 - (2) Cet appareil doit supporter toute interférence, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

GARANTIE

La balance d'analyse corporelle connectée iHealth est garantie dépourvue de défauts de matériaux et de main-d'œuvre pendant 1 an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions fournies. Les garanties ci-dessus ne s'étendent qu'à l'acheteur particulier originel. Si nous le jugeons bon, nous réparerons ou remplacerons sans frais tout produit couvert par les garanties susmentionnées. La réparation ou le remplacement constitue notre seule responsabilité et votre seul remède en vertu des garanties ci-dessus.

EXPLICATION DES SYMBOLES



Symbole pour « LE MANUEL D'UTILISATEUR DOIT ÊTRE LU »



Symbole pour « ATTENTION »



Symbole pour « PIÈCES APPLIQUÉES DE TYPE BF »



Symbole pour « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » – Les rebus de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler ce produit dans une installation de recyclage. Pour des conseils en matière de recyclage, veuillez consulter votre distributeur ou votre autorité local(e) ».



Symbole pour « FABRICANT »



Symbole pour « MAINTENIR AU SEC »



Symbole pour « Année de fabrication »

Par la présente, [iHealth Lab Inc.], déclare que ce [HS6 CORE] est conforme aux exigences essentielles et autres dispositifs pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité à la directive 1999/5/CE peuvent être téléchargés en cliquant sur le lien suivant : <https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>



ANDON HEALTH CO., LTD.



No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District,
Tianjin 300190, China. Tel: 86-22-60526161

iHealth est une marque commerciale d'iHealth Lab Inc.

Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs détenteurs respectifs.