
DISPOSITIVO ASPIRA VELENO
POISON EXTRACTION TOOL
POMPE À VENIN
DISPOSITIVO PARA ASPIRACIÓN DE VENENO

FRANÇAIS

Unstinger™ est une pompe à vide manuelle de seconde génération à utiliser après des morsures ou des piqûres d'insectes communs (abeilles, moustiques, guêpes).

COMMENT UTILISER Unstinger™

Dès que possible après la morsure, positionner Unstinger™ au-dessus de la zone concernée et appliquer une légère pression afin de s'assurer que l'adhérence à la peau est optimale. Utiliser uniquement l'embout d'adaptation rouge en fonction du type de morsure ou de la zone concernée.

Commencez à aspirer en retirant lentement les ailettes du piston rouge et maintenant un vide constant: la substance injectée dans votre corps par la morsure (poison, salive, etc.) sera bientôt extraite. Après que le piston a atteint son point limite, l'action peut être répétée plusieurs fois.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS

- Unstinger™ n'est pas un jouet et les petits composants peuvent facilement être avalés par les jeunes enfants. Par conséquent, il est recommandé de ne pas laisser votre Unstinger™ sans surveillance si des nouveau-nés ou de jeunes enfants sont aux alentours.
- L'utilisation de Unstinger™ n'exclut jamais la nécessité de consulter un médecin au cas d'allergie ou de sensibilité particulière aux piqûres de certains insectes/animaux.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

REF Unstinger™ (Gima 24395)

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Denmark
