




# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## GONIOMETRO DA 7" ROBINSON 180° 180° ROBINSON GONIOMETER 7" GONIOMÈTRE 7" 180° ROBINSON 180° GONIÓMETRO ROBINSON 180° - 7"

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso

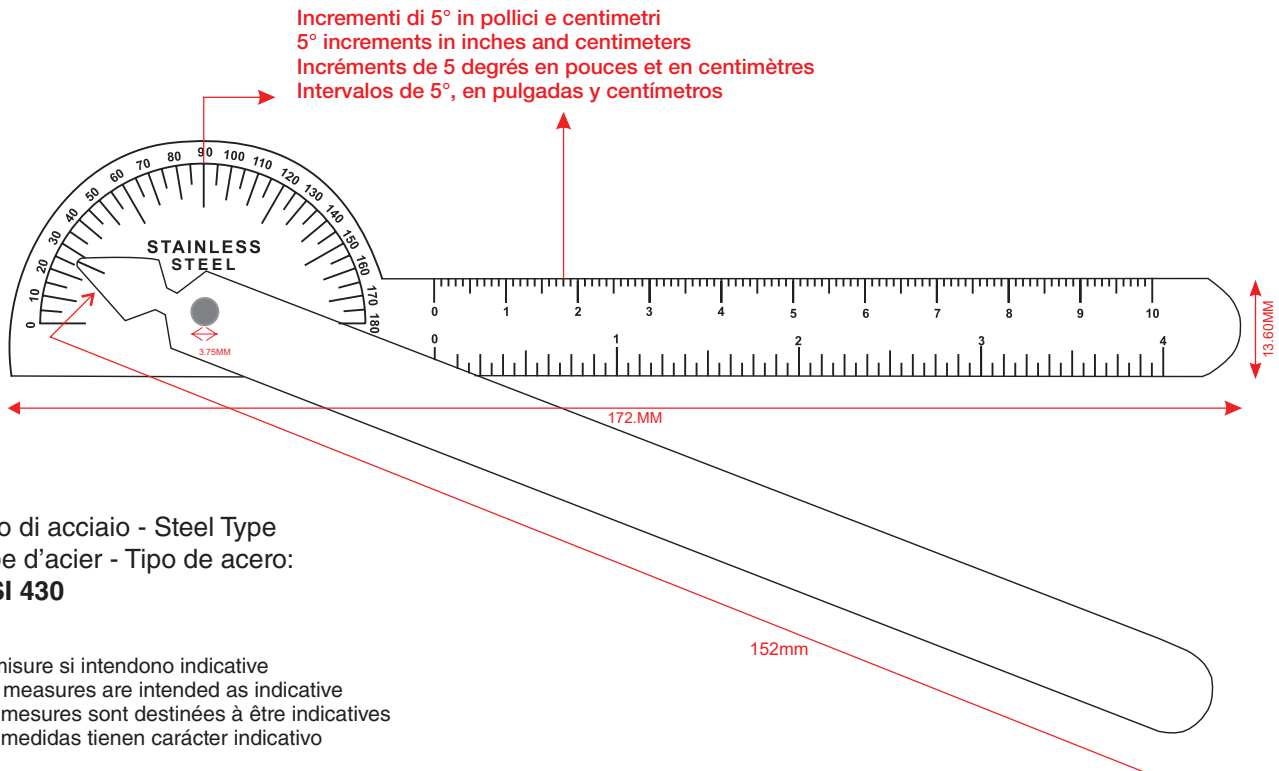

Tipo di acciaio - Steel Type  
Type d'acier - Tipo de acero:  
**AISI 430**

Le misure si intendono indicative  
The measures are intended as indicative  
Les mesures sont destinées à être indicatives  
Las medidas tienen carácter indicativo

### GIMA 24902

Fabbricante, Manufacturer, Fabricante, Fabricante:  
JIMCO INDUSTRIES  
4-KM Aimen Abad Road Near Akbar Abad Chowk Bhadal,  
Sialkot-51310-Punjab - Pakistan - info@jimcoind.com  
Made in Pakistan

**REF** RE-210-10

Importato da / Imported by / Importé par/ Importado por:  
Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## FR - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Un goniomètre mesure l'amplitude de mouvement des articulations des doigts (métacarpophalangiennes et interphalangiennes) et d'autres petites articulations comme les orteils. Un goniomètre mesure l'amplitude de mouvement (ROM) de diverses articulations. La tête à 180 degrés est marquée par pas de 5 degrés. Mesures du bras en pouces et en centimètres. Tension entre les bras est contrôlée par le bouton actionné par le pouce.





## INDICATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS

Ces appareils sont conçus pour une utilisation professionnelle par des opérateurs qualifiés possédant les compétences nécessaires. L'utilisation du produit implique un contact direct avec la peau du patient; porter toujours des gants de protection, ne pas utiliser sur la peau terne, manipuler soigneusement pour éviter toute abrasion accidentelle.

Nettoyer et stériliser avant chaque utilisation; utilisez une solution désinfectante non agressive neutre (PH7), ne pas utiliser de solutions contenant des ions de chlorure ou une teneur élevée en alcool. Ce produit est destiné à fournir des mesures indicatives faciles à lire.

## CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

Simboli / Symbols / Symboles / Símbolos				
	<b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) <b>ES</b> Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		<b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar	<b>LOT</b> <b>IT</b> Numero di lotto <b>GB</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot <b>ES</b> Número de lote
	<b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> Consult instructions for use <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation <b>ES</b> Consultar las instrucciones de uso		<b>IT</b> Conservare in luogo fresco e asciutto <b>GB</b> Keep in a cool, dry place <b>FR</b> À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco	<b>REF</b> <b>IT</b> Codice prodotto <b>GB</b> Product code <b>FR</b> Code produit <b>ES</b> Código producto