

WATCH FOR NURSES
OROLOGI DA INFERMIERE
MONTRES INFIRMIERES
RELOJ DE ENFERMERÍA
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS
KRANKENSCHWESTERUHREN
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ

طريقة استخدام الساعات الخاصة بالممرضين والممرضات

n'est pas encore activé, dès que la languette protectrice de la pile sera retirée, l'aiguille ne pourra se mouvoir que dans un sens.

Pour mettre en fonction votre montre, dégagez-la de son corps en silicone puis enlevez la languette protectrice située sur le remontoir.
Tirez sur le remontoir et tournez-le pour régler l'heure puis repoussez le remontoir pour le bloquer.
Remettez le corps de la montre du côté opposé à l'épingle de fixation.

Nettoyage

Enlever la montre de son support en silicone et nettoyer la partie en silicone avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool à 70°.
Pour le corps de la montre passer un chiffon humide, la montre est étanche.

POIDS: 28 grammes

PILE: bouton SR626SW (après usure de la pile, jeter celle-ci dans un bac de collecte prévu à cet effet, reportez vous à la procédure collecte des piles).

DUREE DE LA PILE: 2 ans environ

CHANGEMENT DE LA PILE: a l'arrière de la montre, il y a une encoche permettant d'ouvrir le boîtier et d'accéder à la pile. Soulevez la partie arrière grâce à un outil pointu et fin. Enlevez la protection blanche en plastique et retirez la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérez la nouvelle en respectant la polarité, le "+" vers le haut. Remettez la protection blanche et refermez le boîtier.

GARANTIE: 1 an

Mode d'emploi des montres infirmières

Nous vous remercions d'avoir choisi notre modèle de montre infirmière silicone et espérons que son utilisation vous donnera entière satisfaction.

Vous pouvez remarquer avant la mise en fonctionnement de la montre que l'une des aiguilles peut bouger. Ceci est du au fait que l'entraînement du mouvement

REF 25534 - 25535 - 25536 - 25537 - 25538

