
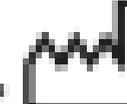
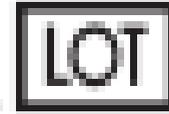
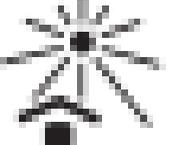
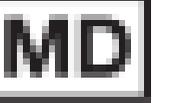
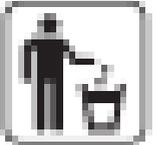


**FR Mode d'emploi** (): Indicateur de température corporelle à cristaux liquides microencapsulés (). Au premier usage, enlever la pellicule transparente du front de l'indicateur. Placer l'indicateur pendant 15 secondes sur le front sec, en le tenant par les deux extrémités. La lettre N indique l'absence de fièvre. Si un chiffre apparaît, la température correspond à la valeur visible. Si deux nombres sont visibles, la température est une valeur intermédiaire. Si la température augmente, consulter un médecin. Utiliser l'indicateur à température ambiante, sous une luminosité adéquate et sous la surveillance d'un adulte pour les enfants au-dessous de 13 ans. Nettoyer l'indicateur en le frottant doucement avec de l'eau savonneuse pendant au moins 30 secondes ou avec des désinfectants pour la peau sans alcool (ne pas tremper). Usage externe sur une peau saine. N'exposer pas aux rayons du soleil () , tenir à l'écart des sources de chaleur, de l'alcool et des solvants. (Edition du 17 juin 2020).

Explication des symboles :

  $\text{€0051}$  Marquage CE et identification de l'organisme notifié.  Identifie le nom du fabricant (peut être suivi de la date de fabrication).  Identifie la date de fabrication.  Identifiez le nom du distributeur.  Numéro de lot du produit.  Modèle d'appareil.  Consultez la notice d'utilisation.  Ne pas exposer au soleil ou aux sources UV.  Dispositif médical.  Ne pas jeter dans l'environnement. Éliminer consciemment.  Matériau poly laminé. Collection indifférenciée.  $^{\circ}\text{C}$  Degrés centigrades.  Symbole de support.

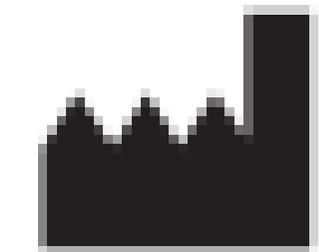

Made by: I.P.S. S.r.l. - Via Civesio, 6 - 20097 San Donato Milse (Mi) - Italy +39 025279641

[www.ips-srl.it](http://www.ips-srl.it)