



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCHERMO FACCIALE ANTI-NEBBIA MONOUSO - ANTI-FOG DISPOSABLE FACE SHIELD - ÉCRAN FACIAL ANTI-BUÉE JETABLE - PANTALLA FACIAL DESECHABLE ANTINEBLA - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL ANTI-FOG - ANTI-BESCHLAG-EINWEG-GESICHTSSCHILD - ΑΝΤΙΟΜΙΧΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - JEDNORAZOWA OSŁONA TWARZY ANTYFOGOWA - ECRAN FACIAL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ANTI-ABURIRE - JEDNORÁZOVÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT PROTI ZAMLŽOVÁNÍ - ANSIKTSVISIR MED ANTI-IMBILDNINGSFUNKTION FR ENGÅNGSBRUK - KERTAKÄYTTÖINEN HUURTEENESTOKA-SVOSUOJA - JEDNORAZOVÝ TVÁROVÝ ŠTÍT ODOLNÝ VOČI ZAHMLIEVANIU - ANTICONDENS GELAATSSCHERM VOOR EENMALIG GEBRUIK - JEDNOKRATNI VIZIR PROTIV MAGLJENJA - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - DUGFRI ANSIGTSSKÆRM TIL ENGANGSBRUG - ЛИЦЕВ ЦИТ ПРОТИВ ЗАМЪГЛЯВАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - NERASOJANTIS VIENKARTINIS APSAUGINIS VEIDO SKYDELIS - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS PRETAIZSVĪŠANAS SEJAS AIZSARGS - UDUVASTANE ŪHEKORDNE NĀOKAITSE - TÅKEHEMMENDE ANSIKTSKJERM TIL ENGANGSBRUK - دح او ةرم لام عتس الل بابض لل داض م هج و عرد

FRANÇAIS Description: L'écran facial anti-buée est composé d'une pellicule en PET et d'une pellicule protectrice, avec un support en mousse et une bande élastique.

Indications pour l'utilisation: L'écran facial anti-buée protège le visage entier contre la contamination potentielle par des pathogènes du sang, des fluides sanguins ou des éclaboussures de produits chimiques dangereux, lors de l'inspection et du traitement.

Contre-indications: Aucune.

Effets secondaires du produit: Ce produit ne provoque aucun effet secondaire.

Avertissements:

1. L'exposition à un milieu très humide peut causer une perte d'efficacité de l'effet anti-buée.
2. Suspendre l'utilisation en cas de dommage ou de négligence lors de l'utilisation.
3. Pendant l'utilisation, ne pas toucher le centre de la lentille.
4. Les matériaux pouvant entrer en contact avec la peau de l'utilisateur pourraient provoquer des réactions allergiques chez les sujets sensibles.

Fonctionnement :

Étape 1: Retirer la pellicule protectrice interne.

Étape 2: Tirer la bande élastique et mettre sur la tête.

Stockage : Stocker le produit dans un lieu sec à une température comprise entre 0 et 30 °C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

