

---

**LACCIO EMOSTATICO JETPULL**  
**JETPULL TOURNIQUET**  
**GARROT JETPULL**  
**TORNIQUETE JETPULL**  
**VENENSTAUER JETPULL**

---

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.


Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.


Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

---


**GIMA 25722 - 25723 - 25724****HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH**In den Faltern 13  
65232 Taunusstein  
Made in Germany**25722 - 25723 - 25724****Gima S.p.A.**Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

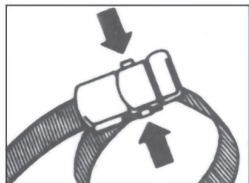


- IT** Aprire
- GB** Open
- FR** Ouvrir
- ES** Abrir
- DE** Öffnen

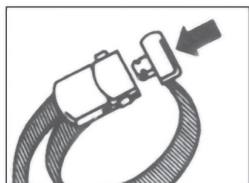

- IT** Chiudere
- GB** Close
- FR** Fermer
- ES** Cerrar
- DE** Anlegen

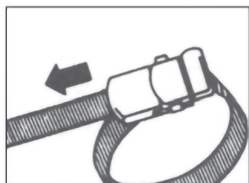

- IT** Stringere
- GB** Tighten
- FR** Tirer
- ES** Apretar
- DE** Festziehen

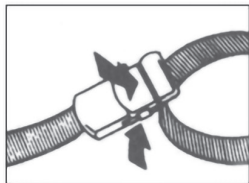

- IT** Rilasciare lentamente
- GB** Slow release
- FR** Desserrer légèrement
- ES** Lenta liberación
- DE** Langsam lösen/

---

**FRANÇAIS**

Ce dispositif comporte un mécanisme de sécurité en deux étapes:

1. Dégager le garrot en tirant la clé striée vers le bas.
2. Presser les boutons latéraux de poussoir.









La fermeture s'ouvre automatiquement.

Notre garrot peut être lavé en machine jusqu'à 90°C ou peut être traité avec des désinfectants appropriés sans alcool.

**CONDITIONS DE GARANTIE GIMA**

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

---

	<p><b>IT</b> Codice prodotto  <b>GB</b> Product code  <b>FR</b> Code produit  <b>ES</b> Código producto  <b>DE</b> Erzeugniscode</p>
	<p><b>IT</b> Numero di lotto  <b>GB</b> Lot number  <b>FR</b> Numéro de lot  <b>ES</b> Número de lote  <b>DE</b> Chargennummer</p>
	<p><b>IT</b> Fabbricante  <b>GB</b> Manufacturer  <b>FR</b> Fabricant  <b>ES</b> Fabricante  <b>DE</b> Hersteller</p>
	<p><b>IT</b> Data di fabbricazione  <b>GB</b> Date of manufacture  <b>FR</b> Date de fabrication  <b>ES</b> Fecha de fabricación  <b>DE</b> Herstellungsdatum</p>
	<p><b>IT</b> Distributore  <b>GB</b> Distributor  <b>FR</b> Distributeur  <b>ES</b> Distribuidor  <b>DE</b> Verteiler</p>
	<p><b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745  <b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745  <b>FR</b> Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745  <b>ES</b> Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745  <b>DE</b> Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745</p>
	<p><b>IT</b> Dispositivo medico  <b>GB</b> Medical Device  <b>FR</b> Dispositif médical  <b>ES</b> Producto sanitario  <b>DE</b> Medizinprodukt</p>
	<p><b>IT</b> Leggere le istruzioni per l' uso  <b>GB</b> Consult instructions for use  <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation  <b>ES</b> Consultar las instrucciones de uso  <b>DE</b> Gebrauchsanweisung beachten</p>