

Modèles d'appareil

7830.01.001 sans toise
7831.01.001 avec toise

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques relatives à l'alimentation en tension sont indiquées sur le bloc d'alimentation secteur.

Température de travail : 5 - 35°C
Température de stockage : -20 - 65°C
Plage de pesée : 220 kg
Echelon numérique : 100 g

Remarque

Si l'appareil est soumis à des influences électrostatiques ou électromagnétiques, comme par exemple lors de son utilisation à proximité immédiate de matériel radio ou d'un téléphone portable, la valeur affichée peut varier. Une fois que l'influence perturbatrice a cessé, le produit peut à nouveau être utilisé de manière conforme, une remise en marche peut cependant être nécessaire.

Les courants d'air, les vibrations, les variations brusques de température et le rayonnement solaire peuvent également influencer les résultats de la pesée.

Le pèse-personnes est conforme à la classe de protection IP 20. Une humidité excessive de l'air, de la vapeur, des liquides et de forts encrassements doivent pour cette raison toujours être évités. Dans le cas contraire, les composants de mesure sont endommagés et vous risquez de perdre vos droits à la garantie.

Cet appareil est antiparasité conformément à la directive européenne 2004/108/CE.

Entretien et service

Le pèse-personnes ne nécessite pas d'entretien régulier. Il convient toutefois de vérifier la précision du pèse-personnes à intervalles réguliers. La fréquence du contrôle dépend de l'utilisation et de l'état du pèse-personnes.

En cas de divergences constatées, veuillez contacter votre commerçant ou le service après-vente Soehnle Professional

Nettoyage

Il suffit de nettoyer le pèse-personnes avec un chiffon humide et un détergent habituel, disponible dans le commerce. Ne pas utiliser de produit abrasif.

Élimination

Selon les connaissances actuelles, le pèse-personnes à colonne ne contient pas de substances nocives à l'environnement.

Garantie / responsabilité

En cas de défaut dû à Soehnle Professional sur le produit livré, la société Soehnle Professional est habilitée à éliminer le défaut ou à livrer un produit de rechange. Les pièces remplacées sont la propriété de Soehnle

Professional. Si l'élimination du défaut ou la livraison d'un produit de remplacement échoue, les prescriptions légales s'appliquent. La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat. Veuillez conserver la facture à titre de justificatif. En cas de problème, veuillez contacter votre commerçant ou le service après-vente Soehnle Professional.

La société décline toute responsabilité pour les dommages dus aux raisons suivantes :

stockage ou utilisation inadaptés ou non conformes, montage ou mise en service incorrects effectués par le client ou tiers, usure naturelle, modifications ou interventions, manipulation négligente ou incorrecte, sollicitation excessive, influences chimiques, électrochimiques, électriques ou humidité, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la responsabilité de Soehnle Professional.

Si des influences d'exploitation, climatiques ou autres entraînent une modification importante des conditions ou de l'état du matériel, la garantie pour le bon fonctionnement de l'ensemble de l'appareil devient caduque. La garantie individuelle de la société Soehnle Professional assure l'absence de défauts sur le produit livré pendant toute la durée de la garantie.

Conservez l'emballage d'origine pour un éventuel renvoi de la marchandise ultérieurement.


Mise en service

Enficher le câble du bloc d'alimentation au dos de la plate-forme pour alimenter le pèse-personnes en courant.

Pesée

Monter tout simplement sur le pèse-personnes (il n'est pas nécessaire d'allumer le pèse-personnes ni d'appuyer légèrement dessus).

Mesure de la taille et affichage de la valeur IMC

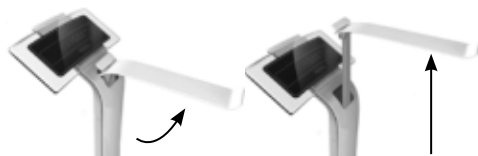

Relever prudemment la toise et la pousser vers le haut. Poser ensuite la partie supérieure sur la tête de la personne à peser. L'écran affiche la taille en cm et puis automatiquement l'indice de masse corporelle.

Tarage

La touche de fonction au dos de l'écran permet de tarer le pèse-personnes. Appuyer sur la touche, la valeur "0,0 kg" apparaît à l'écran et le pèse-personnes est prêt pour la pesée.

Fonction Mère/enfant

- Un adulte monte sur le pèse-personnes
> Affichage par ex. «47,6 kg»
- Appuyer sur la touche de fonction.

- > Affichage passe à «0,0 kg»
- L'adulte peut descendre du pèse-personnes...
> Affichage «47,6 kg»
- ... et puis remonter à nouveau sur le pèse-personnes en tenant l'enfant dans les bras.
> Ceci permet d'obtenir le poids de l'enfant, par ex. «5,1 kg»

Une fois que les deux sont de nouveau redescendus du pèse-personnes, l'écran affiche dans notre exemple «-47,6 kg». Le pèse-personnes peut être remis à «0,0 kg» en appuyant sur la touche de fonction. Le pèse-personnes ne retourne pas automatiquement à «0,0 kg» afin de pouvoir effectuer plusieurs tarages consécutifs.

Mise hors marche

Le pèse-personnes se met automatiquement hors marche si l'écran affiche «0,0 kg» pendant env. 15 secondes.

Commutation des unités

L'unité configurée par défaut est «kg». Pour afficher le poids en une autre unité sur le pèse-personnes, procéder comme indiqué ci-dessous :

- Débrancher la fiche secteur.
- Appuyer sur la touche de fonction, la maintenir enfoncée et brancher en même temps la fiche secteur.
- L'affichage passe à l'unité «lb»

Pour repasser à l'affichage en "kg", répéter le procédé décrit ci-dessus.

Messages d'erreur

- Err 5** **Remise à zéro**
- pas d'arrêt > contrôler la stabilité du sol, contacter le service après-vente
- Err 6** **Tarage**
- pas d'arrêt > Ne pas bouger
- poids affiché négatif > couper l'alimentation en courant pour un court instant
- **surcharge, le poids est supérieure au poids maximal**
> décharger le pèse-personnes
- **sous-charge**
> contacter le service après-vente
- □** **La valeur affichée sur le pèse-personnes à la mise en marche n'est pas zéro**
> décharger le pèse-personne > redémarrage
> contacter le service après-vente
- Err 77** **Toise pas en position de référence à la mise en marche**
> rabattre complètement la toise à la mise en marche et l'enfoncer

Toucher de fonction

Toucher de fonction

Interface de service après-vente
Option :
interface USB

