

GLASANZEIGE

für folgende Waagenmodelle

User manual for the following models

7771, 7708, 7778






Krankenstuhlwaage 7771



Lifterwaage 7778



Multifunktionswaage 7708

 Gebrauchsanweisung	02
 User Manual	17
 Mode d'emploi	27

AFFICHEUR EN VERRE

Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit Soehnle Professional. Ce produit présente toutes les caractéristiques de la technique la plus moderne et est optimisé pour une commande des plus faciles. Si vous avez des questions ou si votre appareil présente des problèmes qui ne sont pas traités dans le mode d'emploi, veuillez vous adresser à votre partenaire Soehnle ou consulter notre site Internet à l'adresse www.soehnle-professional.com.

1. MODELES DE BALANCES

7771.01.002 Fauteuil pèse-personne médical, homologuée

7708.01.001 Balance multifonction, alimentation sur secteur, homologuée

7708.01.002 Balance multifonction, accumulateur avec chargeur, homologuée

7778.01.002 Crochet peseur basic, accumulateur avec chargeur, homologuée

2. FONCTIONS

2.1 Installation de la balance et la mise en service

Installer la balance sur le lieu d'utilisation et veiller à une surface horizontale sur un sol plan et stable.

Raccorder le bloc d'alimentation pour alimenter la balance.
S'il vous plaît prêter attention à l'accessibilité libre de la prise.

Lors de la première mise en service des balances, charger préalablement la batterie pendant 5 heures !

2.2 Démarrage

Appuyer sur la touche ON/TARA à l'arrière de l'afficheur en verre.

2.3 Pesage

Se mettre debout ou s'asseoir sur la balance. Le poids apparaît automatiquement après le chargement de la balance.

2.4 Tarage

Placer les essuie-mains ou les coussins sur la balance et appuyer sur la touche ON/TARA. L'afficheur passe à zéro. Le tarage est possible dans toute la plage de pesée.

2.5 Pesage des jeunes enfants

Un adulte monte sur la balance.

> Afficheur, ex. : « 57,6 kg »

Appuyez sur la touche ON/TARA.

> L'afficheur passe à « 0,0 kg »

L'adulte descend de la balance ...

> Afficheur : « -57,6 kg »

... et puis remonter à nouveau sur la balance en tenant l'enfant dans les bras.

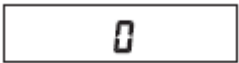
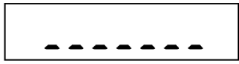
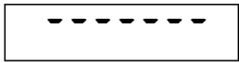
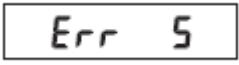
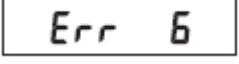

> Ceci permet d'obtenir le poids de l'enfant, par ex. « 5,1 kg »

2.6 Arrêt / Finir le service sûr

Afficheur avec bloc d'alimentation : L'affichage s'éteint automatiquement lorsque ce dernier affiche >>0,0 kg<< pendant env. 60 secondes. Pour arrêter complètement de tous les pôles l'afficheur, retirez la prise de la fiche. Le service est ainsi sûr fini.

Afficheur avec batterie : L'afficheur s'arrête automatiquement lorsque ce dernier affiche >>0,0 kg<< pendant env. L'afficheur est réactivé avec la touche ON/TARA située à l'arrière.

3. DEFAUTS – CAUSES ET SOLUTIONS

AFFICHAGE	CAUSES	SOLUTION
	Lors du démarrage, l'afficheur n'indique pas >>0,0 kg<<.	Déchargez la balance et redémarrez l'afficheur. Si le défaut persiste, contactez votre partenaire.
	Charge insuffisante : Seuls les tirets du bas apparaissent dans le champ d'affichage.	Arrêtez et redémarrez l'afficheur ou débranchez la prise. Si le défaut persiste, contactez votre partenaire.
	Surcharge : Seuls les tirets du haut apparaissent dans le champ d'affichage. La plage de pesée maximale est dépassée.	Décharger la balance ou arrêter et redémarrer la balance. Vérifiez la plage de pesée max.
	Aucun arrêt de la balance de la plate-forme de pesée.	Vérifiez la surface et la mise à niveau de la plate-forme de pesée. Si le message de défaut persiste après le réaligement, contactez votre partenaire.
	Aucun arrêt de la balance de la plate-forme de pesée.	Restez tranquille ou mettez le poids posé en position de repos. Si le problème persiste, relancez la balance.
	Batterie vide	Chargez la batterie

En cas de non-élimination du défaut ou d'autres messages de défaut, veuillez contacter votre partenaire.

4. CONSIGNES GENERALES

Les consignes générales et les avertissements figurent à la page 18

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Manfred-von-Ardenne-Allee 12
DE-71522 Backnang

Telefon: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 220
Telefax: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 211
info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com

470.060.031 11/2013 Technische Änderungen vorbehalten.