

seca

seca 725

Félicitations !

En achetant le pèse-bébé seca 725, vous êtes devenu le propriétaire d'un appareil de haute précision et robuste.

Depuis plus de 725 ans, seca met son expérience au service de la santé et, en sa qualité de leader du marché dans de nombreux pays du monde, définit sans cesse de nouvelles normes grâce à ses innovations dans le domaine du pesage et de la mesure.

Le pèse-bébé mécanique seca 725 a été conçu pour être utilisé dans les hôpitaux et les cabinets des pédiatres.

Il est constitué d'un bâti métallique peint en blanc et d'un plateau incurvé. Ces pièces peuvent être nettoyées aisément et garantissent un pesage du nourrisson sur le pèse-bébé en toute sécurité.

En outre, l'appareil seca 725 est équipé d'une barre à poids curseur à graduation par 5 g permettant une lecture facile.

Consignes de sécurité


Avant d'utiliser votre nouveau pèse-bébé, prenez le temps de lire les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez respecter les instructions du mode d'emploi.
- Ne laissez en aucun cas un nourrisson sans surveillance sur le pèse-bébé.
- Veillez à ce que le plateau soit nettoyé et désinfecté régulièrement afin d'éviter la propagation de maladies contagieuses.
- Ne laissez pas tomber le pèse-bébé et évitez les chocs.
- Ne faites effectuer les réparations que par du personnel autorisé.

Installation et mise en service du pèse-bébé


1. Déballage

Ouvrez la boîte et enlevez le plateau et le pèse-bébé.

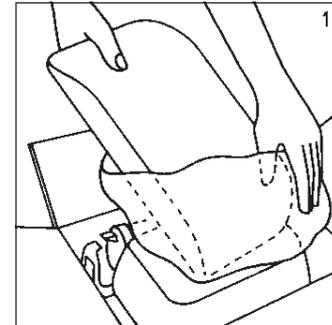


2. Enlèvement de la protection pour le transport

Enlevez le joint torique destiné à la fixation du poids mobile. Conservez ce joint pour les transports ultérieurs.

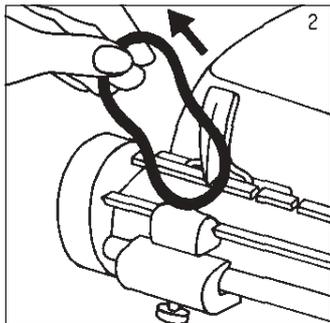


3. Fixation de la barre à poids curseur

Fixez la barre à poids curseur en faisant pivoter le dispositif de serrage vers le bas.

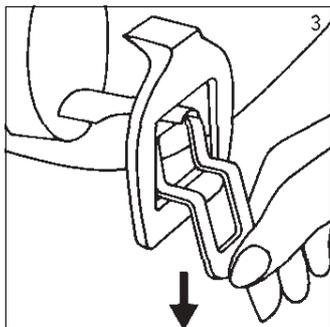


4. Installation du plateau sur le pèse-bébé

Placez le plateau au milieu du pèse-bébé. Les leviers de verrouillage doivent arriver sous le bâti.

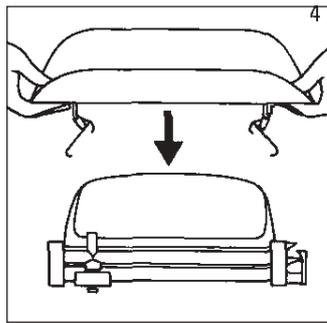


5. Fixation du plateau

Fixez le plateau au pèse-bébé en poussant les leviers de verrouillage vers le bas.

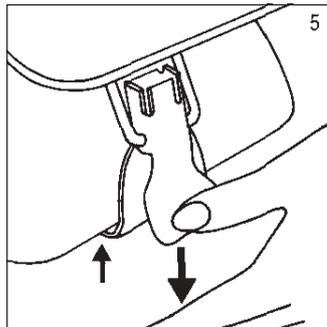


6. Relâchement du dispositif d'arrêt

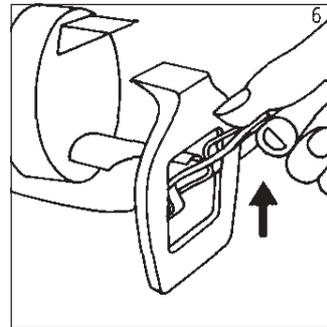

7. Tarage approximatif


Pour que le pèse-bébé indique le poids exact, il doit au préalable être réglé à la valeur de 0 kg.

A cette fin, faites coulisser les deux poids mobiles jusqu'à la position 0 le long de la barre à poids curseur. Si à ce moment l'indicateur et le contre-indicateur ne se trouvent pas l'un en face de l'autre, la valeur 0 doit être réglée à l'aide du poids de tarage. Pour ce faire, desserrez l'écrou moleté (voir schéma 8) et faites coulisser le poids de tarage le long de la barre jusqu'à ce que l'indicateur et le contre-indicateur se trouvent l'un en face de l'autre.

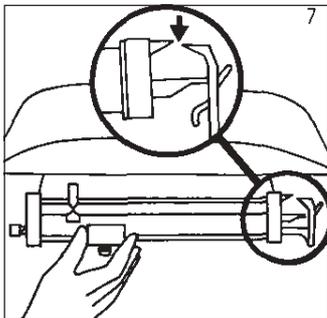


8. Fixation du poids de tarage

Fixez le poids de tarage à l'aide de l'écrou moleté. Le poids de tarage permet de tarer les objets posés sur le pèse-bébé, tels que les supports, etc., jusqu'à environ 3 000 g.

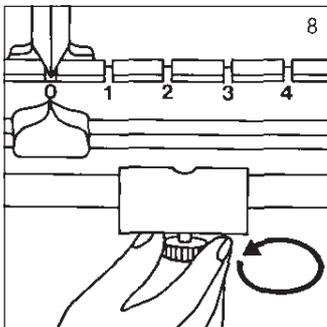

9. Réglage affiné

L'indicateur et le contre-indicateur peuvent être réglés avec précision en faisant tourner la vis de tarage affiné. Pour ce faire, il faut faire tourner la vis de tarage affiné vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur et le contre-indicateur se trouvent précisément l'un en face de l'autre.

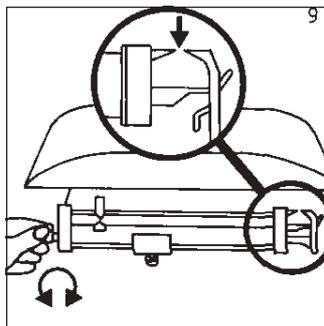

Utilisation

Lorsque le pèse-bébé a été installé conformément aux instructions du chapitre „Installation et mise en service du pèse-bébé“, la procédure de pesage peut commencer. A cette fin, installez le nourrisson sur le plateau et faites d'abord coulisser le poids mobile le plus grand jusqu'au poids exact approximatif. A l'aide du petit poids mobile, vous pouvez ensuite déterminer avec précision le poids exact. Il vous suffit pour cela de faire coulisser le petit poids mobile jusqu'à ce que l'indicateur et le contre-indicateur se trouvent l'un en face de l'autre. Pour terminer, lisez le poids indiqué sur la graduation de la barre à poids curseur.

Nettoyage

Nettoyez le bâti et le plateau si nécessaire à l'aide d'un nettoyant ménager ou d'un désinfectant courant. Veuillez respecter les indications du fabricant.

Que faire si...

... aucun poids ne s'affiche lorsque le pèse-bébé est chargé ?

- Vérifiez si le levier de protection pour le transport (voir schéma 6) est relâché.
- Vérifiez si la protection pour le transport, c'est-à-dire le joint torique, a été enlevée.

Données techniques

Charge maximale:	16 kg
Graduation:	5 g
Dimensions (lxhxp):	550 mm 190 mm 305 mm
Poids:	env. 6 kg
Limites de température:	+ 10° C à + 40° C
Précision:	+/- 0,25 %

Elimination

Si le pèse-bébé ne peut plus être utilisé, l'organisme d'enlèvement des déchets compétent pourra vous renseigner sur les mesures nécessaires à prendre pour une élimination appropriée.

Garantie

Une garantie de deux ans à compter de la date de livraison est accordée pour les défauts de matière et de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces amovibles, telles que les batteries, les câbles, les adaptateurs secteur, les accumulateurs etc. Les défauts couverts par la garantie sont réparés gratuitement sur présentation de la quittance d'achat par le client. Aucune autre demande de réparation ne peut être prise en compte. Les frais de transport sont à la charge du client si l'appareil n'est pas installé à la même adresse que celle du client. En cas d'endommagements dus au transport, le cas de garantie peut être invoqué uniquement si l'emballage d'origine complet a été utilisé pour les transports et si la balance a été immobilisée et fixée conformément à l'emballage initial. Tous les éléments de l'emballage doivent par conséquent être conservés.

Aucun cas de garantie ne peut être invoqué si l'appareil est ouvert par des personnes qui ne sont pas explicitement autorisées par seca.

Nous prions nos clients à l'étranger de bien vouloir contacter directement le revendeur de leur pays respectif pour les cas de garantie.

seca
Medizinische Waagen
und Messsysteme
Vogel & Halke GmbH & Co.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg, Germany
Tel +49 40 20 0000 0
Fax +49 40 20 0000 50
e-mail: info@seca.de
www.seca.com

seca ltd.
Medical Scales and
Measuring Systems
40 Barn Street
Birmingham B5 5QB
England
Tel. +44 121 643 9349
Fax +44 121 633 3403
e-mail: uk@seca.com
www.seca.com

seca eurl
Appareils de Pesée
et de Mesure
Champs à la Perdrix
21140 Semur-En-Auxois
France
Tél. +33 3 80 97 43 80
Fax +33 3 80 97 43 81
e-mail: fr@seca.com
www.seca.com

seca ag
Medizinische Waagen
und Messsysteme
Appareils de Pesée
et de Mesure
Schönmattstrasse 4
CH-4153 Reinach BL 1
Tel. +41 61 711 03 00
Fax +41 61 711 07 04
e-mail: ch@seca.com
www.seca.com

The logo for Seca, featuring the word "seca" in a bold, lowercase, red sans-serif font.

seca corporation
Medical Scales and
Measuring Systems
1352 Charwood Road
Suite E
Hanover, MD 21076, USA
Tel. +1 410 694 9330
Fax +1 410 694 9680
e-mail: us@seca.com
www.seca.com