

CRANIOMETRO
CRANIOMETER
CRANEÓMETRO
CRANIOMÈTRE

REF 70410 (27327)



METRICA S.p.A.
Via Grandi 18
20097 San Donato Milanese (Mi)
Made in Italy

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



0425



INTRODUCTION

La finalité de ce manuel est de fournir au client toutes les indications possibles sur le CRANIOMÈTRE, ainsi que les instructions pour l'utilisation et l'entretien qui permettent de préserver les performances et l'efficacité du CRANIOMÈTRE au fil du temps.

Le mode d'emploi doit être conservé en bon état et rangé dans un lieu accessible lui permettant d'être consulté rapidement

Le CRANIOMÈTRE peut subir des mises à jour, par conséquent des pièces différentes de celles illustrées peuvent le composer ; cette éventualité n'affecte en rien les explications contenues dans ce mode d'emploi, ni la sécurité du CRANIOMÈTRE.

FINALITÉ DE L'APPAREIL

Le CRANIOMÈTRE est un instrument dont la fonction est de mesurer en cm, avec une précision de ± 2 mm, et en pouces avec une précision de $\pm 1/8$ ", le diamètre du crâne d'un nouveau-né.


Plage de mesure de la circonférence crânienne 0-60 cm - tolérance ± 5 mm/graduation en mm

Plage de mesure du diamètre crânien 0-19 cm (le diamètre est donné par la circonférence divisée par π)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Déroulez entièrement le craniomètre et insérez la partie finale entre les ouverture au niveau de l'indicateur, en tenant ce dernier tourné vers la partie extérieure (voir figure 1).

L'utilisation du craniomètre est très simple : appliquez-le sur la tête du nouveau-né, tirez avec délicatesse sur l'extrémité qui dépasse jusqu'à le serrer autour du front : il suffit alors de lire les données au niveau de la flèche sur la partie avant du craniomètre.

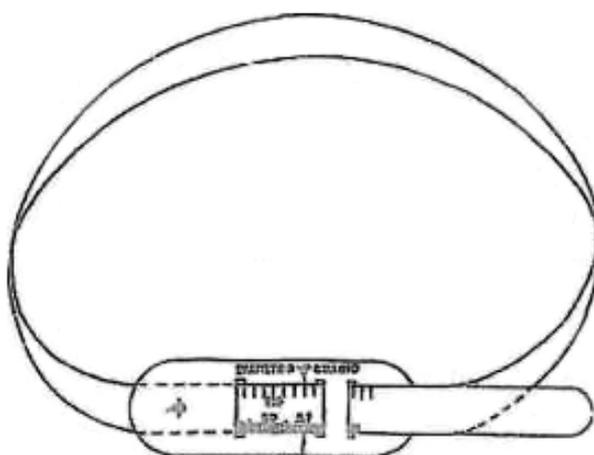

AVERTISSEMENTS

Nettoyer le CRANIOMÈTRE avec un chiffon humidifié par des substances ne nuisant pas au tissu (par exemple alcool, détergent pour les vitres).

Le CRANIOMÈTRE doit être conservé dans sa boîte dans un environnement non humide. Il est nécessaire de signaler au fabricant ainsi qu'à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe le siège social tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré.

	Code produit		Numéro de lot		Attention : Lire et respecter attentivement les instructions (mises en garde) d'utilisation
	Gardez à l'abri de la lumière du soleil		Conserver dans un endroit frais et sec		Lire le mode d'emploi
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Fabricant		
	Dispositif médical		Date de fabrication		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie B2B standard Gima de 12 mois s'applique.