



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO ALUMINIUM SUITCASE COUCH TABLE VALISE EN ALUMINIUM CAMILLA PLEGABLE EN MALETA DE ALUMINIO MARQUESA DE ALUMÍNIO DOBRAVÉL EM MALA KOFFERBETT AUS ALUMINIUM ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ-ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF 27406



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



ATTENTION ! En tant qu'utilisateur ou utilisatrice, veuillez lire et comprendre parfaitement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Aux termes de au règlement (UE) 2017/745, ce produit fait partie des DISPOSITIFS MÉDICAUX CLASSE I.

DESCRIPTION

Le présent article est une table pliante avec structure en aluminium, matelassage avec trou pour le visage et revêtement ignifuge de couleur bleue. Étudiée pour les visites à domicile ou pour les cabinets non équipés de lits fixes.



Dimensions	Ouverte 183x63x76 h cm Fermée 91,5x63x18 h cm Garnissage 91,5x63 cm (2 sections), 59x40 cm (section dossier inclinable) Boîte 94x21,5x66,5 h cm
Poids	13 kg (14,5 kg avec boîte)
Capacité de charge maximale	100 kg

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION



1. Coucher la valise avec le trou du côté supérieur.
2. Ouvrir la valise.
3. Ouvrir complètement les pieds de la table.
4. Tourner la table, uniquement quand les pieds sont complètement ouverts et fixes, dans la position correcte d'utilisation.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.
- Lors du réglage de la hauteur du canapé et du dossier, veillez à ce que personne n'insère les mains, les jambes ou d'autres personnes dans la zone de déplacement : **RISQUE D'ÉCRASEMENT !**
- Déplacer le lit sans le soulever du sol.
- Si le lit est équipé de roulettes, vérifier avant tout déplacement que les roulettes ne sont pas freinées.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôlez périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le garder au mieux, il est conseillé d'éviter toute exposition prolongée au soleil ; le contact avec des milieux salins et l'entrepose dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

Instructions de nettoyage du tissu :

Nettoyez avec un chiffon humidifié et savonné et rincer soigneusement à l'eau propre. N'utilisez pas de solvants d'eau de javel ni de détergents chimiques ou sprays pour faire briller.

Attention: En général, les couleurs claires du faux cuir ne peuvent pas être mises en contact avec des vêtements contenant des colorants non fixés (par exemple, des jeans et des dérivés) pour éviter les taches ou les auréoles impossibles à nettoyer.

SYMBOLES

	À conserver dans un endroit frais et sec
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Consulter les instructions d'utilisation
REF	Code produit
LOT	Numéro de lot
	Fabricant
	Date de fabrication
CE	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
MD	Dispositif médical
UDI	Identifiant unique de l'appareil

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

¡ATENCIÓN! Los operadores deben leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto. A efectos de el