

TAVOLINO SERVILETTO
OVERBED TABLE
TABLE DE LIT
MESA SOBRECAMA

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO



GIMA 27447

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China


Importato da/Imported by/Importé par/Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

REF SKH046-2

INSTALLATION DES ROULETTES

(L'image ne représente pas le produit réel avec exactitude, elle ne fait office que de référence)

Extrayez la rondelle élastique $\phi 10$ de l'emballage et installez-la avec les roulettes, comme illustré sur la figure ci-dessous

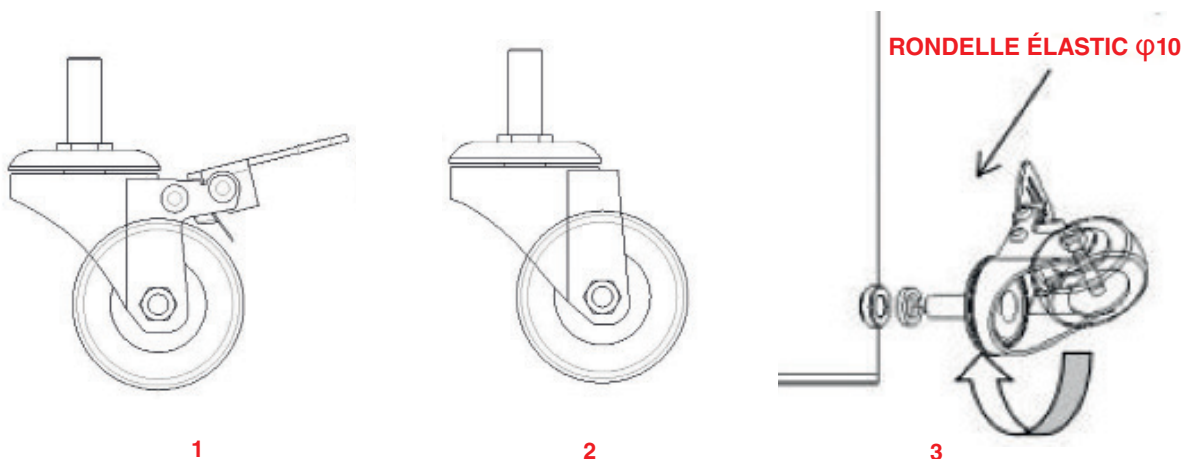


INSTALLATION DU COUDE DE BASE

(L'image ne représente pas le produit réel avec exactitude, et ne fait office que de référence pour les instructions d'installation)


Desserrez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme illustré sur la figure, jusqu'à ce qu'elle soit lâche (l'écrou ne doit pas tomber).

Fixez le tube interne vers le bas et faites-le correspondre avec la base. Une fois l'installation terminée, secouez le tube interne en avant et en arrière pour faciliter l'introduction de la vis.

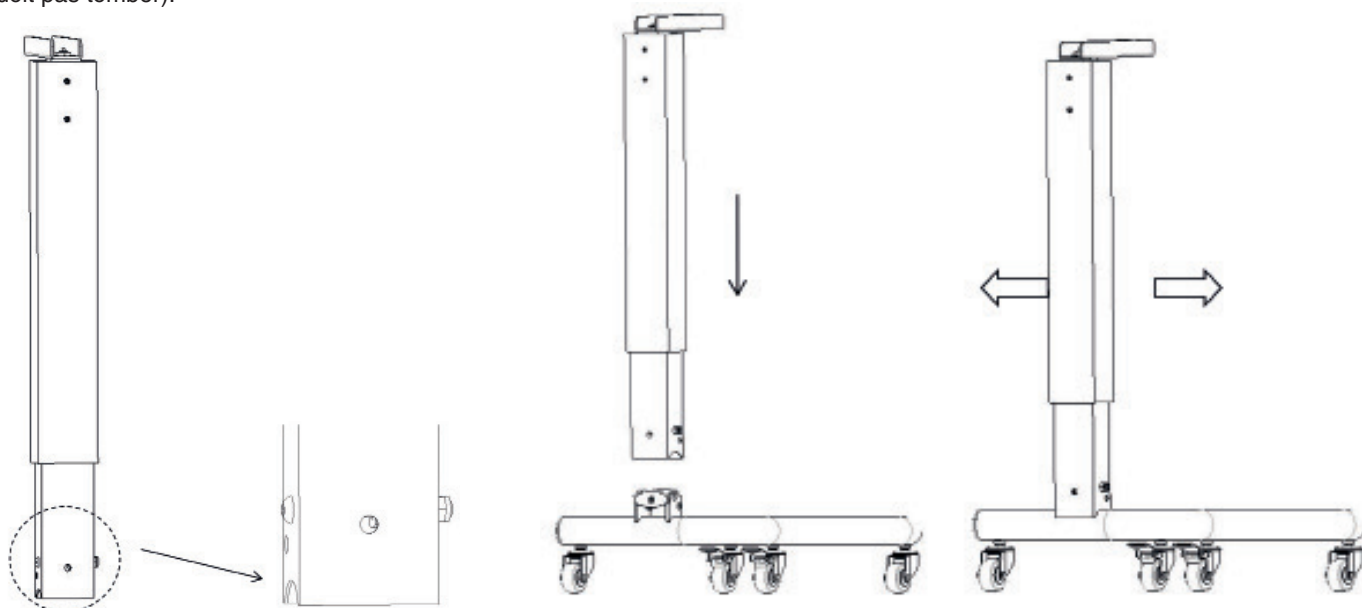



Extrayez de l'emballage la vis à six pans creux de l'élément rond M8*25, la rondelle plate $\phi 8$ et la rondelle élastique $\phi 8$; posez tout d'abord les vis des deux côtés du rehausseur, puis celles d'un côté du rehausseur.

Serrez à nouveau les vis M8*120 précédemment desserrées pour terminer l'installation.

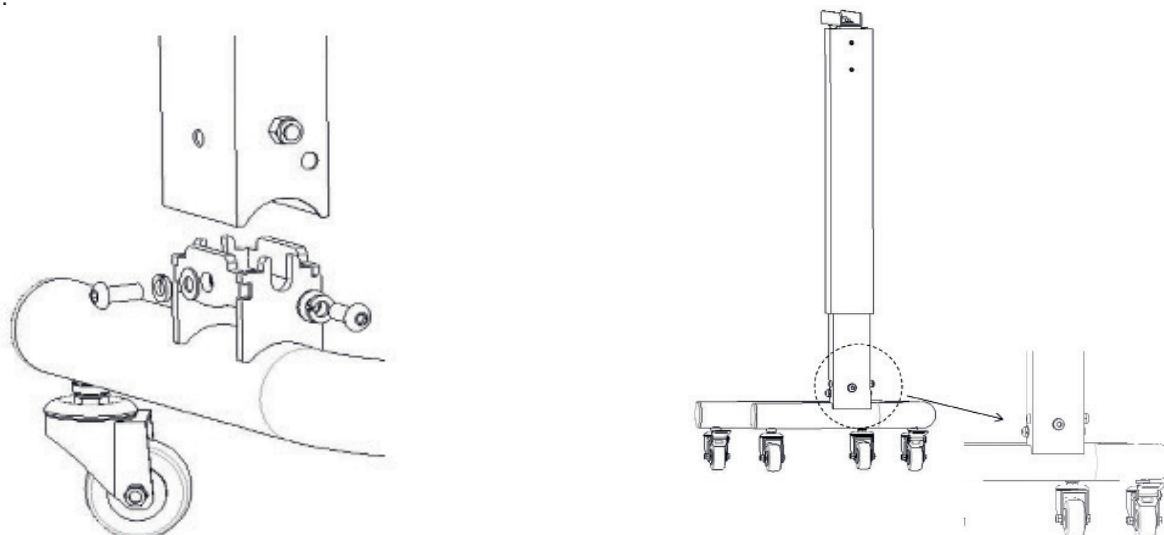


INSTALLATION DU SOCLE DE FIXATION

(L'image ne représente pas le produit réel avec exactitude, et ne fait office que de référence pour les instructions d'installation)
Posez le corps principal de la table de lit à l'envers sur un tissu de protection ; extrayez de l'emballage la vis à six pans creux M6*16, l'écrou M6, la rondelle plate $\phi 6$ et la rondelle élastique $\phi 6$.

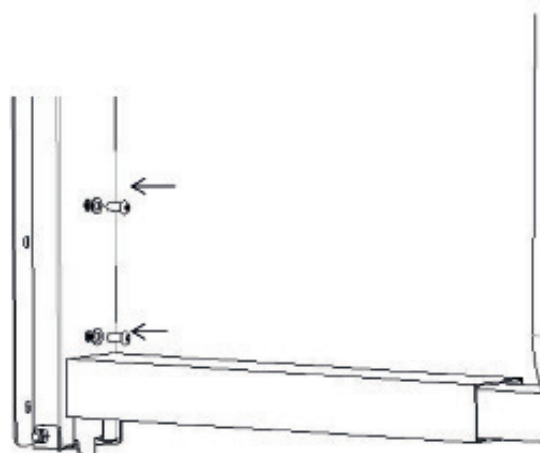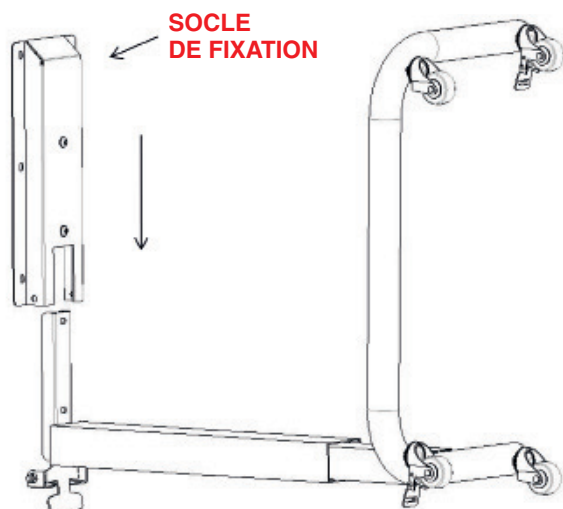


INSTALLATION DE LA POIGNÉE

(L'image ne représente pas le produit réel avec exactitude, et ne fait office que de référence pour les instructions d'installation)
Posez la vis à six pans creux M8*25 de l'élément circulaire et vissez l'écrou M8 dans le sens des aiguilles d'une montre.

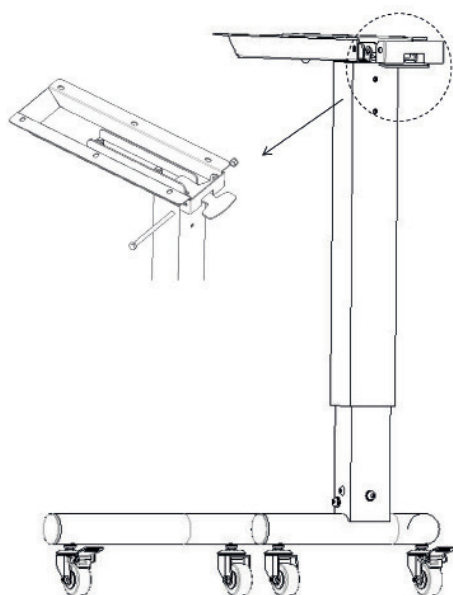

INSTALLATION DU PLATEAU


Extrayez de l'emballage la vis à six pans creux de l'élément rond M6*12, la rondelle plate $\phi 6$ et la rondelle élastique $\phi 6$ et vissez-les dans le sens des aiguilles d'une montre.

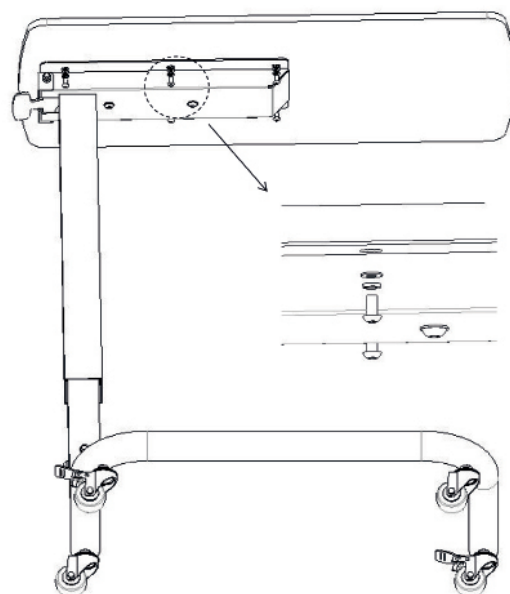

MÉTHODE D'UTILISATION DES ROULETTES


Blocage de la roulette

Une fois la table de lit dans la position désirée, appuyez sur le frein avec le pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un déclic, comme illustré sur la figure.

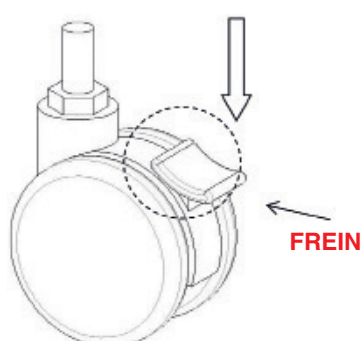


Déblocage de la roulette

Soulevez le frein avec le pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un déclic.

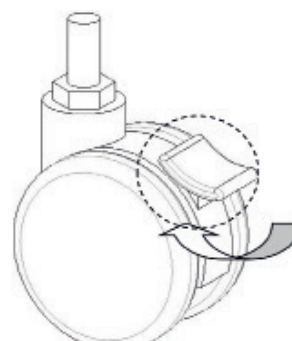

MÉTHODE DE LEVAGE

Maintenez la poignée d'une main et soulevez-la, puis appuyez sur la table de l'autre main pour abaisser celle-ci.
Maintenez la poignée d'une main et soulevez-la, puis soulevez le plateau de la table de l'autre main pour lever celle-ci.

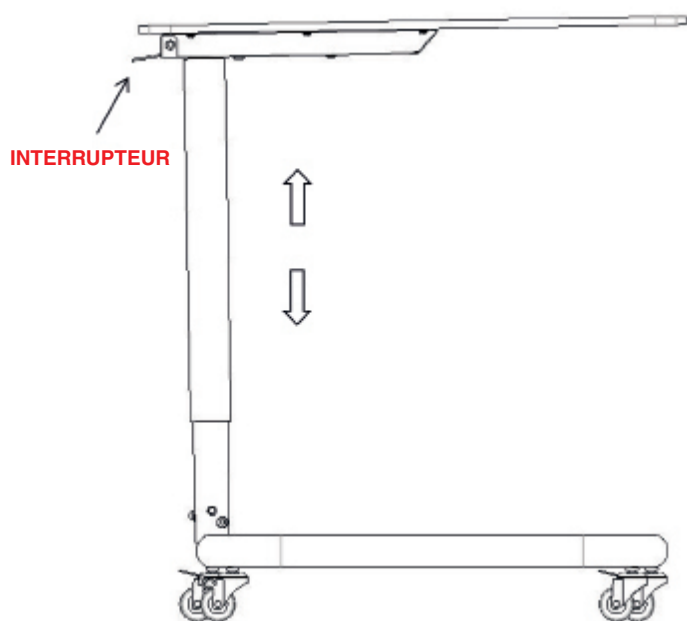


REEMPLACEMENT DES PIÈCES ET ENTRETIEN

Défauts fréquents	Causes probables	Solutions
Difficultés dans les mouvements	1. Les freins ne sont pas desserrés et les roulettes sont bloquées. 2. Les roulettes sont endommagées.	1. Déverrouillez la roulette 2. Remplacez la roulette

IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

3. L'emballage de la table de lit est pris en charge conformément au contrat ou à la norme de produit.
4. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez la table de lit de la lumière directe du soleil et de la pluie pendant son transport.
5. La table de lit doit être rangée dans les conditions suivantes:
 - f) Température ambiante : entre -40°C ~ 70°C
 - g) b) Humidité relative: ≤ 95 %.
 - h) c) Pression atmosphérique: 500hPa ~ 1060hPa
9. Explication des symboles:

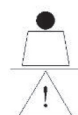

=45Kg La charge maximale est de 45 kg

MANUTENZIONE

1. Pour une utilisation de la table de lit en toute sécurité, il est nécessaire de procéder à des inspections régulières. Un contrôle des jointures est recommandé tous les six mois pour s'assurer qu'elles ne sont pas lâches et qu'elles fonctionnent normalement.
2. Lorsque le cadre de la table de lit est usagé et requiert un entretien, sa partie métallique ainsi que les parties en plastique du cadre de la table de lit peuvent être recyclées.
3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angles vifs ou des couteaux et nettoyez-le fréquemment puis séchez-le.
4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. Ne nettoyez pas la table de lit avec des produits chimiques alcalins ou corrosifs, ceux-ci pourraient faire rouiller la surface.
5. Contrôlez régulièrement les roulettes, elles ne doivent pas subir de chocs ou de surcharges qui pourraient les endommager.
6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner, le système de freinage pourrait être endommagé.
7. L'usure à la surface du pneu des roulettes est détectée par inspection visuelle. Des fils ou accumulations variées peuvent s'emmêler autour de la roulette, retirez les boulons et les écrous, nettoyez pour enlever les débris et contrôlez si le roulement de la roulette est endommagé. Si les pièces sont en bon état, vous pouvez les remonter et les utiliser.
8. En fonction du temps d'utilisation et de l'usure normale, vous pouvez remplacer les roulettes en vous assurant que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles ou des écrous de blocage pour vous faciliter le travail.
9. Si les roulettes sont équipées de freins, ceux-ci doivent être régulièrement contrôlés pour s'assurer de leur fonctionnement correct. Contrôlez les freins une fois par jour ou avant chaque emploi. Dans le cas de tables de lit équipées de roulettes à freins multiples, une seule roulette à la fois peut être bloquée, ce qui vous permet de pousser la table de lit ; contrôlez également si au moins l'un des freins de chaque roulette fonctionne correctement. Si le frein ne fonctionne plus correctement à cause de l'usure ou de dommages aux roulettes, remplacez immédiatement celles-ci puis testez à nouveau le système de freinage.
10. Si le mécanisme du système de freinage des roulettes est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un vendeur agréé par notre compagnie. À chaque remplacement des freins, la performance des freins des roulettes doit être testée à nouveau.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.