



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

---

## **LETTINO 3 PEZZI POLIVALENTE**

## **3-SECTION MULTIFUNCTIONAL BED**

## **DIVAN POLYVALENT 3 PIÈCES**

## **CAMILLA 3 PIEZAS POLIVALENTE**

**Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual del usuario**

---

**ATTENZIONE:** *Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.*

**ATTENTION:** *The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.*

**AVIS:** *Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.*

**ATENCIÓN:** *Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.*



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy

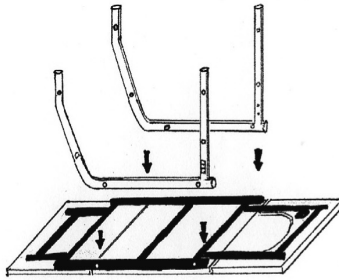


Fig. 1

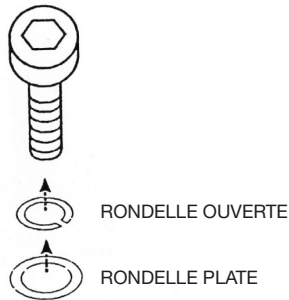


Fig. 2

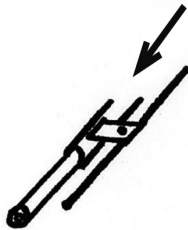


Fig. 3

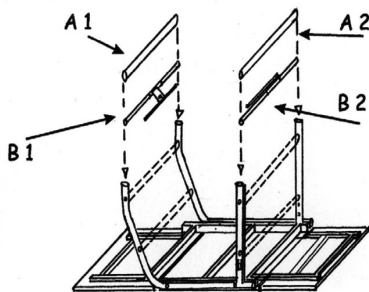


Fig. 4

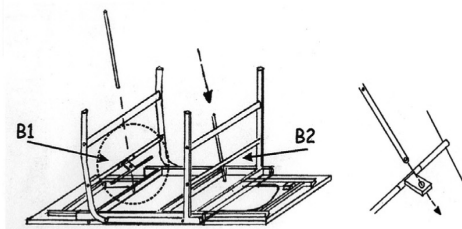


Fig. 5

Fig. 5.1

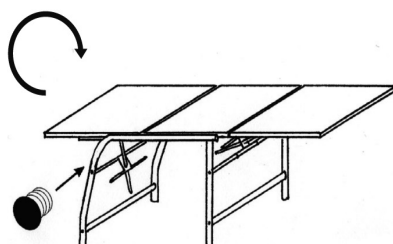


Fig. 6

**FRANÇOIS**

**Fig. 1**

- Enlever les pieds et les traverses de la boîte.
- Placer les pieds face aux bagues taraudées dans le châssis du plan rembourré en gardant le trou avec le diamètre plus grand à l'extérieur du divan.

**Fig. 2**

- Introduire les vis (en veillant à ce que leurs rondelles soient correctement introduites dans la clé six pans).

N.B.: en fin de montage, serrer les vis à fond.

**Fig. 3**

- Introduire l'accessoire pour le blocage des coussins dans la traverse chromée.

**Fig. 4**

- Placer les traverses comme sur le dessin:  
B1 blocage avec barre longue.  
B2 blocage avec barre courte
- Introduire les vis (fig.2).

N.B.: pour un fonctionnement optimal, placer la boussole chromée de b1 et b2 avec le diamètre majeur orienté vers le plan rembourré.

**Fig. 5**

- Placer la tige chromée longue dans B1 et la tige courte dans B2 (Fig. 5 et 5.1)
- Fixer les tiges sur les coussins avec les vis après avoir contrôlé que l'accessoire pour le blocage (Fig. 3) est tourné vers le centre du divan.

**Fig. 6**

N.B.: Pour mettre le divan en position de travail, il est nécessaire de le faire à deux, car le modèle 27505 est relativement lourd.

- Bien serrer les vis.
- Placer les 12 calottes en plastique à l'aide d'un marteau

N.B.: la rotation du divan pourrait provoquer de brusques mouvements aux coussins. Faire très attention.

