



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé
Biazi - 26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove de
Biazzì - 26038 Torre de' Picenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY

Mode d'emploi " T3000 "

Structure en tube d'acier verni époxy. Trois sections indépendantes et position Trendelenburg. Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable – ignifuge classe 1 IM. Pieds réglables en caoutchouc. Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables, un pair d'épaulières rembourrés, poignées de maintien, un porte rouleau et une cuvette en acier inox diam 32 cm. Démonté.

Dimensions : 181x60x80h cm. Portée : 150Kg

Tous les produits sont fabriqués en éliminant les sources de risques possibles pour l'utilisateur en cas de choc involontaire, tels que des bords coupants ou des bouts pointus.

Le produit est destiné à l'usage exclusif de la part d'un personnel médical spécialisé, instruit sur l'utilisation et l'entretien des instruments. L'utilisation à des fins non liées à sa destination n'est pas consentie. L'usage incorrect ou un mauvais ou insuffisant entretien peuvent détériorer rapidement les instruments.

- Vérifiez le serrage correct de toutes les pièces mobiles avant et pendant l'utilisation ;
- Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcools, produit de nettoyage à base de chlore, de désinfectants et de l'acétone : le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'utilisation de matériaux qui peuvent endommager la surface du produit ou des produits chimiques corrosifs utilisés pendant le nettoyage

CONDITIONS DE GARANTIE TITANOX

La garantie fournie de Titanox est de 12 mois de la date de la facture.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

REF T3000




	IT Fabbricante ENG Manufacturer FR Fabricant
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso ENG Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	IT Leggere le istruzioni per l'uso ENG Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation
	IT Conservare al riparo dalla luce solare ENG Keep away from sunlight FR Á conserver à l'abri de la lumière du soleil
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto ENG Keep in a cool, dry place FR Á conserver dans un endroit frais et sec
	IT Codice prodotto ENG Product code FR Code produit
	IT Numero di lotto ENG Lot number FR Numéro de lot
	IT Dispositivo medico ENG Medical Device FR Dispositif médical
	IT Il dispositivo è conforme ai requisiti del regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 ed è classificato come dispositivo medico di classe I ENG The product complies with the requirements of the regulation on medical devices (EU) 2017/745 and is classified as a Class I medical device FR Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et est classé comme dispositif médical de classe I

T3000


**LETTO PARTO
DELIVERY BED
LIT D'ACCOUCHEMENT**

- 1) Estrarre le gambe e i traversi dal cartone.
- 1) Take out legs and crossbars from the carton box.
- 1) Sortir les pieds et les traverses du carton.



- 2) Posizionare le gambe in corrispondenza dei fori delle viti presenti sul telaio (FIG.1).
- 2) Position the legs in correspondence with the screw holes on the frame (FIG.1).
- 2) Positionner les pieds en correspondance des trous des vis présents sur le chassis (FIG.1).

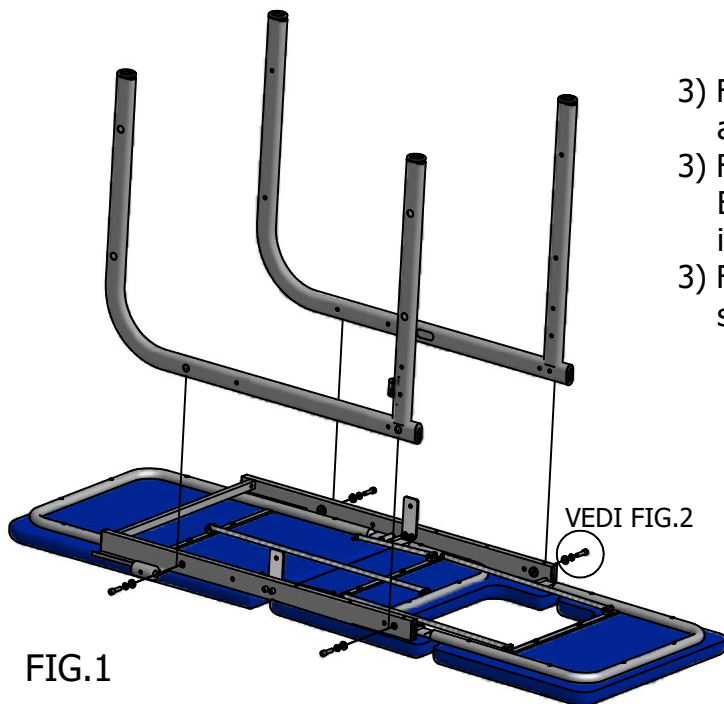

- 3) Fissare le gambe utilizzando le viti avvitate al telaio, assicurarsi di inserire le rondelle correttamente (FIG.2).
- 3) Fix the legs using the screws, screwed to the frame. Be sure that the rings of the screws are correctly inserted (FIG.2).
- 3) Fixer les pieds en employant les vis vissées au chassis, s'assurer d'insérer les rondelles correctement (FIG.2).

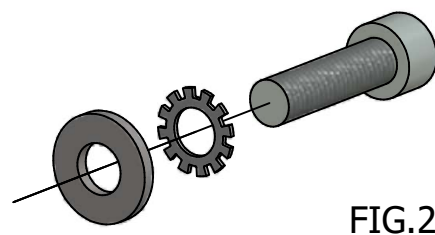

- 4) Inserire i traversi nel seguente ordine: B1, A1, B2, A2, C (FIG.3) e fissarli con le apposite viti.
- 4) Insert the crossbars in the following order: B1, A1, B2, A2, C (FIG.3) and secure them with the screws.
- 4) Introduire les traverses selon l'ordre suivant: B1, A1, B2, A2, C (FIG.3) et les fixer avec les vis spéciales.

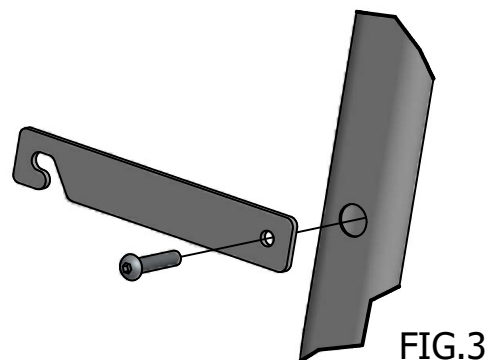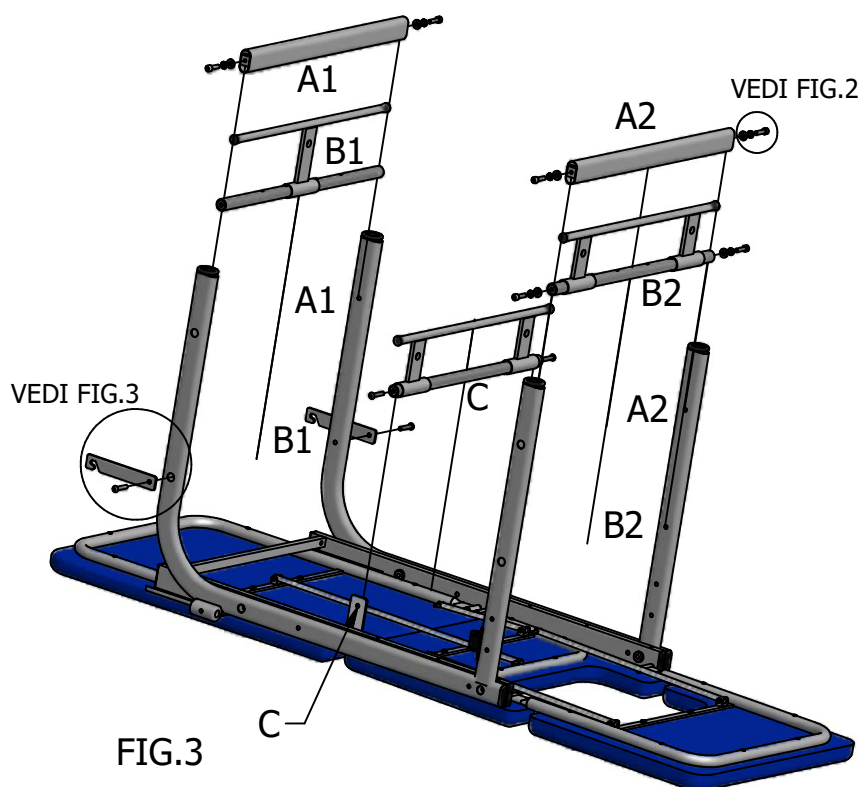


- 5) Nella posizione B1 va fissato il porta rotolo (FIG.4).
- 5) Fix the paper roll holder in position B1 (FIG.4).
- 5) A la position B1 il faut fixer le porte rouleau (FIG.4).

T3000

**LETTO PARTO
DELIVERY BED
LIT D'ACCOUCHEMENT**

- 6) Inserire il fermo lungo nella posizione D e i fermi corti nella posizione E e F con le apposite viti (FIG.5). Bisogna mantenere entrambe le leve arresto rivolte verso il centro del letto.
- 6) Insert the long rod into position D and the short rods into E and F position with the appropriate screws (FIG.5). You have to keep both levers directed towards the center of the bed.
- 6) Insérez la tige d'arrêt longue dans la position D et les tiges d'arrêt courte dans la position E et F avec les vis spéciales (FIG.6). Il faut maintenir les deux leviers d'arrets adressés vers le centre du divan.

FIG.5

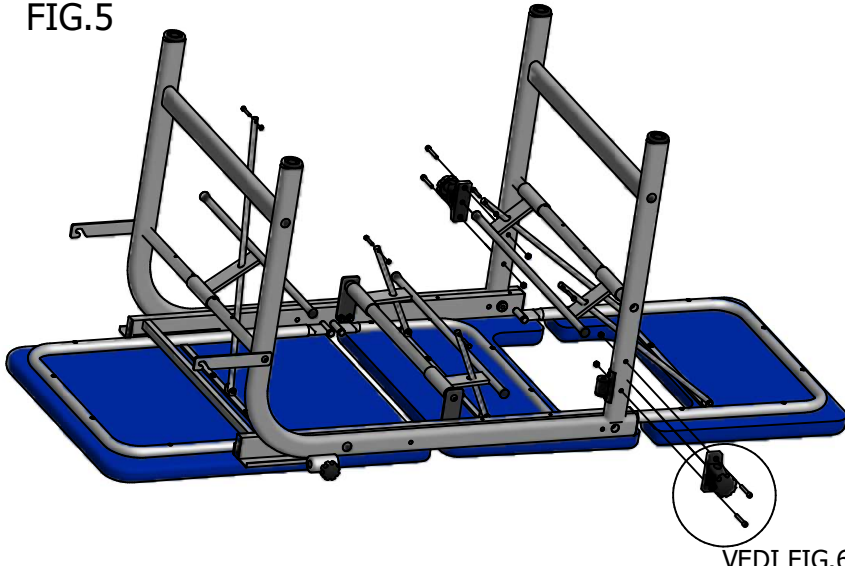

VEDI FIG.6

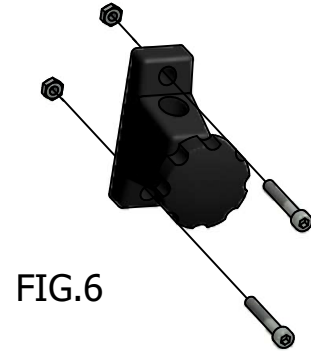


FIG.6

- 7) Fissare il supporto reggicoscia (FIG.6)
- 7) Fix the leg holder support (FIG.6)
- 7) Fixer le support de l'appui cuisse (FIG.6)

- 8) Girare il letto in posizione di lavoro. Sono necessarie due persone perchè l'art T2000 è pesante. Durante la rotazione, mantenere il letto in posizione longitudinale, per evitare che si apra.
- 8) Turn the bed in working position. Two persons are needed to put the examination couch in working position, because art T2000 is heavy. During the rotation, keep couch in longitudinal position, in order to avoid a sudden opening.
- 8) Tourner le divan en position de travail. Sont nécessaires deux personnes car l'article T2000 est lourd. Pendant la rotation, maintenir le divan en position longitudinale, pour éviter qu'il s'ouvre.

- 9) Fissare le viti.
- 9) Tighten the screws.
- 9) Visser les vis.

- 10) Fissare le maniglie e inserire col martello i 10 tappi coprifuco (FIG.7 - FIG.8).
- 10) Fix the handles and insert the 10 screw covers with a hammer (FIG.7 - FIG.8).
- 10) Visser les poignées et insérer les 10 bouchons couvre-trou avec le marteau (FIG.7 - FIG.8).

FIG.7


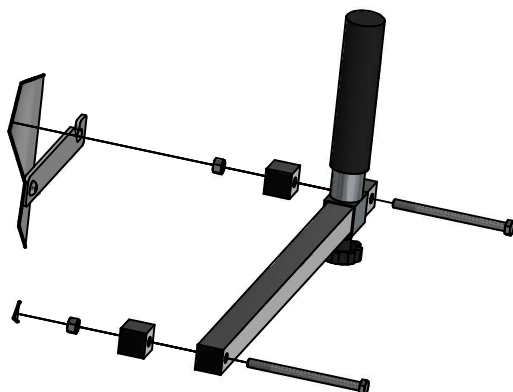


FIG.8

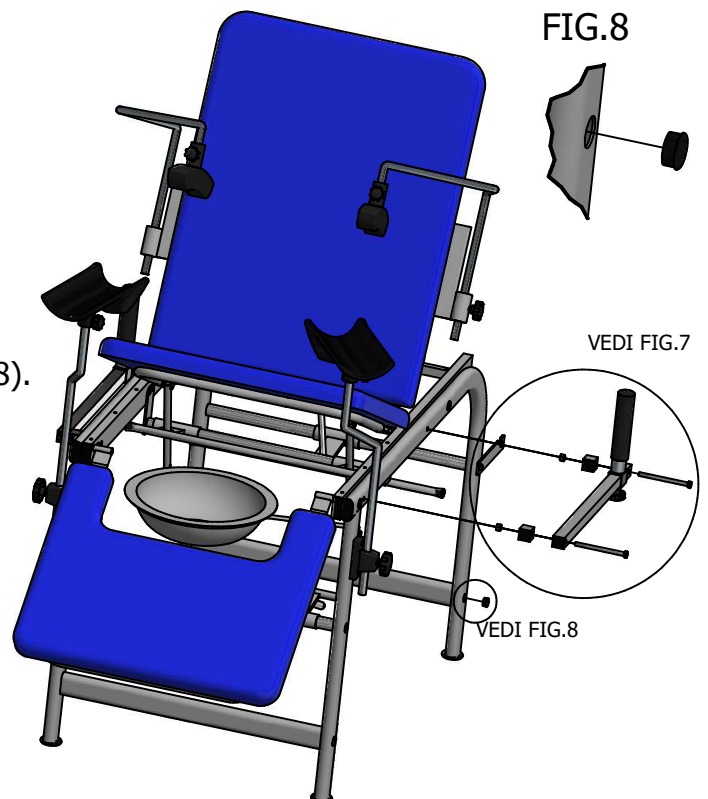

VEDI FIG.7

VEDI FIG.8