



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé
Biazzì -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé
Biazzì - 26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY

Mode d'emploi " T5000 "

Structure en tube d'acier verni époxy. Repose jambes réglable manuellement. Appui pieds en métal extractible manuellement. Repose bras avec articulations réglables manuellement en hauteur. Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable – ignifuge classe 1 IM. Main courante postérieure pour le déplacement. Encombrement du matelas : 170x55 cm. Hauteur du sol au siège : 56 cm. Quatre roues diam 100 mm, dont 2 directionnelles et 2 avec frein. Fourni avec support porte-documents et plateau pour couvertures équipé de courroies de fixage pour assurer la bouteille oxygène

Portée : 150Kg

Tous les produits sont fabriqués en éliminant les sources de risques possibles pour l'utilisateur en cas de choc involontaire, tels que des bords coupants ou des bouts pointus.

Le produit est destiné à l'usage exclusif de la part d'un personnel médical spécialisé, instruit sur l'utilisation et l'entretien des instruments. L'utilisation à des fins non liées à sa destination n'est pas consentie. L'usage incorrect ou un mauvais ou insuffisant entretien peuvent détériorer rapidement les instruments.

- Vérifiez le serrage correct de toutes les pièces mobiles avant et pendant l'utilisation ;
- Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcools, produit de nettoyage à base de chlore, de désinfectants et de l'acétone : le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'utilisation de matériaux qui peuvent endommager la surface du produit ou des produits chimiques corrosifs utilisés pendant le nettoyage

CONDITIONS DE GARANTIE TITANOX

La garantie fournie de Titanox est de 12 mois de la date de la facture.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

REF T5000



	IT Fabbricante ENG Manufacturer FR Fabricant
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso ENG Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	IT Leggere le istruzioni per l'uso ENG Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation
	IT Conservare al riparo dalla luce solare ENG Keep away from sunlight FR Á conserver à l'abri de la lumière du soleil
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto ENG Keep in a cool, dry place FR Á conserver dans un endroit frais et sec
	IT Codice prodotto ENG Product code FR Code produit
	IT Numero di lotto ENG Lot number FR Numéro de lot
	IT Dispositivo medico ENG Medical Device FR Dispositif médical
	IT Il dispositivo è conforme ai requisiti del regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 ed è classificato come dispositivo medico di classe I ENG The product complies with the requirements of the regulation on medical devices (EU) 2017/745 and is classified as a Class I medical device FR Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et est classé comme dispositif médical de classe I

T5000

MANIGLIA: CONTROLLARE SEMPRE CHE LA MANIGLIA NON SIA ALLENTATA, SE COSI' FOSSE STRINGERLA

HANDLE: ALWAYS CHECK THE HANDLE NOT BE LOOSE, IN CASE IT IS LOOSEN, TIGHTEN IT

POIGNEE: VERIFIEZ TOUJOURS QUE LA POIGNEE NE SOIT PAS DESSERREE, LE CAS ECHEANT IL FAUT LA SERRER

SPINGERE LA LEVA VERSO L'ALTO PER ABBASSARE LO SCHIENALE
(N.B. AIUTARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCHIENALE, SPINGENDO LEGGERMENTE CON UNA MANO SE LA PERSONA E' CORICATA SULLA POLTRONA STESSA)

PUSH THE LEVER UPWARD, TO LOWER THE BACKREST
(N.B. HELP THE POSITIONNING OF THE BACKREST, BY PUSHING SOFTLY WITH YOUR HAND IF A PERSON IS LYING ON THE COUCH)

POUSSER LE LEVIER VERS LE HAUT POUR ABAISSER LE DOSSIER
(N.B. AIDER LE POSITIONNEMENT DU DOSSIER, EN POUSSANT DOUCEMENT AVEC VOTRE MAIN SI UNE PERSONNE EST COUCHE SUR LE FAUTEUIL)

SPINGERE LA LEVA VERSO SINISTRA PER SOLLEVARE LO SCHIENALE
(N.B. AIUTARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCHIENALE, SPINGENDO LEGGERMENTE CON UNA MANO SE UNA PERSONA E' CORICATA SULLA POLTRONA STESSA)

PUSH THE LEVER TO THE LEFT TO LIFT THE BACKREST
(N.B. HELP THE POSITIONNING OF THE BACKREST, BY PUSHING SOFTLY WITH YOUR HAND IF A PERSON IS LYING ON THE COUCH)

POUSSER LE LEVIER VERS LA GAUCHE POUR SOULEVER LE DOSSIER
(N.B. AIDER LE POSITIONNEMENT DU DOSSIER, EN POUSSANT DOUCEMENT AVEC VOTRE MAIN SI UNE PERSONNE EST COUCHE SUR LE FAUTEUIL)

