



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

---

## **LETTINO VISITA KING EXAMINATION COUCH KING DIVAN D'EXAMEN KING CAMILLA VISITA KING**

**Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual del usuario**

---

**ATTENZIONE:** *Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.*

**ATTENTION:** *The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.*

**AVIS:** *Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.*

**ATENCIÓN:** *Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.*



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy

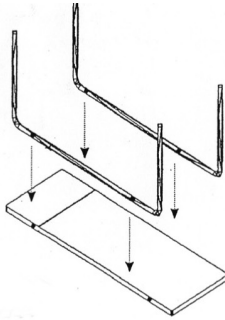


Fig. 1

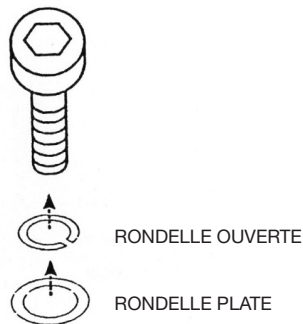


Fig. 2

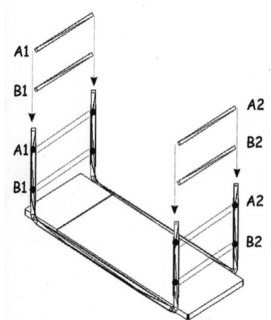


Fig. 3

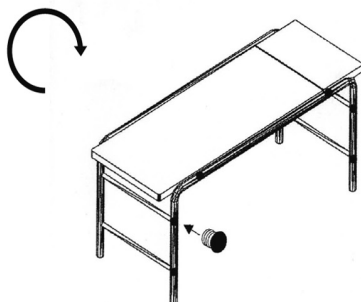


Fig.4

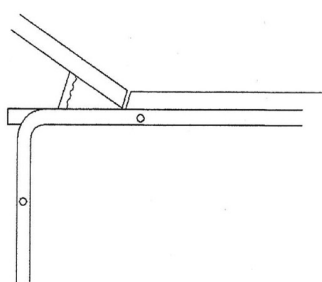


Fig. 5

**FRANÇOIS**

**Fig. 1**

- Enlever les pieds et les traverses de la boîte.
- Placer les pieds face aux bagues taraudées dans le châssis du plan rembourré en gardant le trou avec le diamètre plus grand à l'extérieur du divan.

**Fig. 2**

- Introduire les vis (en veillant à ce que leurs rondelles soient correctement introduites dans la clé six pans).

N.B.: en fin de montage, serrer les vis à fond.

**Fig. 3**

- Placer les traverses dans cet ordre: B1, A1, B2, A2 comme indiqué sur l'illustration.
- Introduire les vis (Fig. 3).

A1/A2 Tube ovale 50x25x1.5  
B1/B2 30x2

**Fig. 4**

N.B.: Pour mettre le divan en position de travail, il est nécessaire de le faire à deux, car le divan est relativement lourd. Pendant la rotation, l'appui-tête doit resté en position allongée pour éviter qu'il s'ouvre brusquement.

- Serrer le vis à fond.
- Placer les 12 calottes en plastique à l'aide d'un marteau (Fig. 4).

**Fig. 5**

**UTILISATION**

L'appui-tête se règle par une crémaillère. Après avoir placé l'appui-tête à la hauteur voulue, il est nécessaire, pour le remettre à l'horizontal que la crémaillère soit en fin de course (Fig. 5).

