



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINI PER CENTRI BENESSERE

BEAUTY BEDS

LITS DE SOINS ESTHÉTIQUES

CAMILLAS DE BELLEZA

REF 2205 (GIMA 28005, 28006)

Fabbricante / Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante

SILVERFOX CORPORATION LIMITED

No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District, JiangMen City, GuangDong Province, China

amy.liang@silverfox.cn

Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



1 À PROPOS DE CE MANUEL


Ce manuel devra être utilisé uniquement pour la référence de fonctionnement de ce modèle particulier. Si le manuel est utilisé à d'autres fins, nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles conséquences. Toutes les informations de ce manuel sont protégées par les droits d'auteur et toute reproduction ou traduction, même partielle, de ces spécifications, sans l'autorisation écrite du fabricant, est interdite.

2 MISES EN GARDE

- Ne pas tenir sur cet équipement.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'équipement et le placer dans un endroit où les enfants peuvent le toucher. Régler le dossier à la position la plus haute lorsque l'on part.
- Ne pas positionner le produit dans un environnement humide, afin de prévenir tout dysfonctionnement.
- Ne pas placer et utiliser l'équipement dans des endroits où il y a de la peinture ou une alimentation en oxygène.
- Les personnes ayant des handicaps physiques, des troubles tactiles, les troubles mentaux, un manque d'expérience, de bon sens ou les enfants ne peuvent pas utiliser l'équipement, sauf si ces personnes sont sous la surveillance ou suivent les instructions de personnes responsables de leur sécurité.
- S'assurer que la course n'est pas entravée pendant le fonctionnement du fauteuil.
- Le fauteuil doit être utilisé par du personnel dûment formé.

3 PRÉCAUTIONS

- L'équipement doit être pris en charge par une personne expérimentée qui doit connaître la structure, les performances et les méthodes d'utilisation du produit. Et effectuer régulièrement les interventions d'entretien.
- Lire ce manuel attentivement avant de l'installer, de l'utiliser et d'effectuer tout réglage. Le conserver dans un endroit sûr.
- Ce produit ne doit pas être utilisé en mettant tout le poids sur un seul côté ou sur un seul point.
- Respecter les normes de sécurité de fonctionnement, ne pas surcharger le produit, s'assurer que l'équipement de protection de la sécurité du produit est complet et fiable, pour éliminer à temps les facteurs de danger.
- Serrer régulièrement les boulons et les écrous pour éviter toute défaillance causée par des pièces desserrées, toute chute, vibration ou glissement.
- Pendant la maintenance, l'opérateur ne doit démonter arbitrairement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé s'il est défectueux. Si un phénomène anormal ou un son anormal est constaté, arrêter immédiatement d'utiliser le produit pour le contrôler ; reprendre le travail uniquement une fois que le problème a été résolu.
- L'opérateur doit connaître les précautions décrites dans chaque section du manuel pour assurer la sécurité des personnes et du produit.
- Utiliser l'équipement en respectant scrupuleusement l'étiquette d'avertissement présente sur le produit.
- L'entretien doit être confié à des professionnels dûment formés.
- Après chaque traitement, utiliser un produit nettoyant neutre pour éliminer la poussière et les pièces en cuir et en bois.
- Quand on règle le dossier, le coussin d'assise, le repose-pied ou quand on relève le fauteuil avec la télécommande ou avec la pédale, garder les mains, les pieds et la tête à distance de sécurité, comme le montre la flèche ci-dessous. (Voir image de droite)

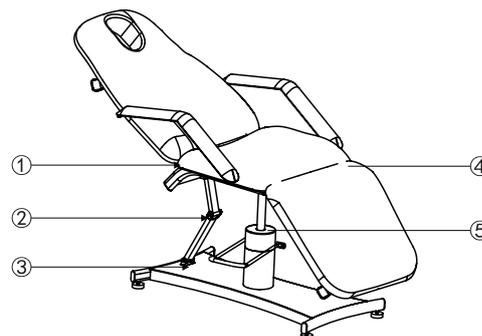

4 PLAGE APPLICABLE


Les lits esthétiques conviennent pour les traitements esthétiques, massages et la manucure.

5 INSTALLATION


1. Mettre le fauteuil dans un endroit approprié, selon la disposition, la lumière du jour ou l'éclairage artificiel et les conditions d'utilisation au salon ou à la maison. Et le conserver dans un environnement propre, sec et frais.
2. Ouvrir le carton d'emballage pour vérifier si le tabouret est intact et si les accessoires ou les pièces de rechange sont complets. Contacter le distributeur ou le fabricant en cas de problèmes.
3. Guide d'installation du lit esthétique
Placez le lit à la bonne position. Il convient de noter qu'il est inutile d'installer une vis supplémentaire sur le sol pour fixer le fauteuil, parce que la conception originale a pris en compte les performances de stabilité. Cependant, veuillez vous assurer que le lit est placé sur un sol ferme et plat, afin d'éviter tout accident. Si le lit tourne ou s'incline en raison d'un sol irrégulier, il est possible de régler les quatre pieds en plastique (M10 x 30) et les écrous (M10) à l'aide d'un lé à six pans, qui sont fixées sur le panneau inférieur, de manière à assurer la stabilité du lit.

Procédure d'installation sans moteur


Pic 1

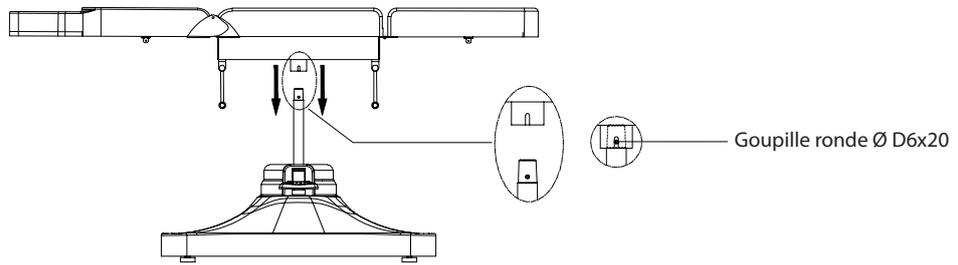


Pic 2

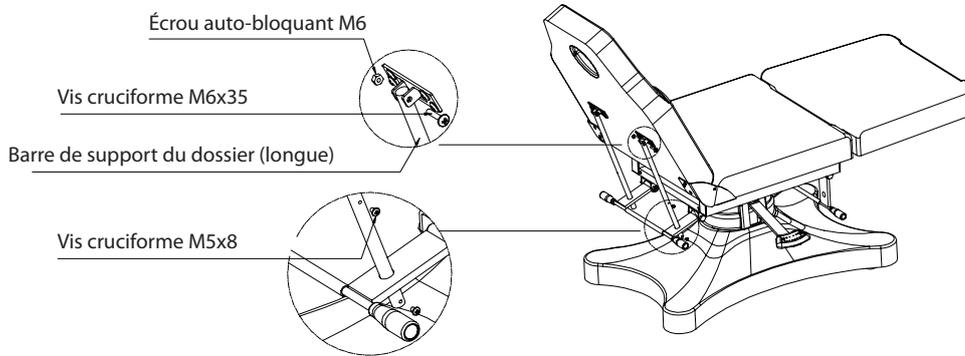


Pic 3

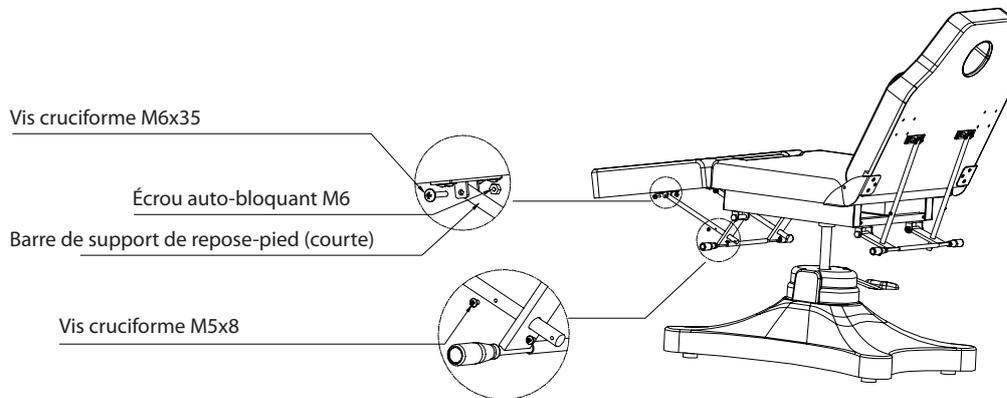

Pic 4

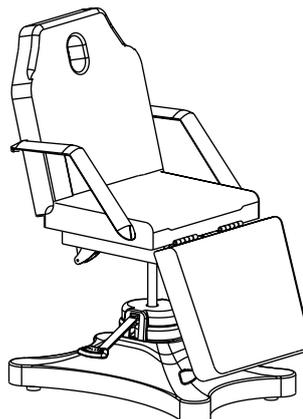


Installer l'accoudoir comme illustré ci-dessous.

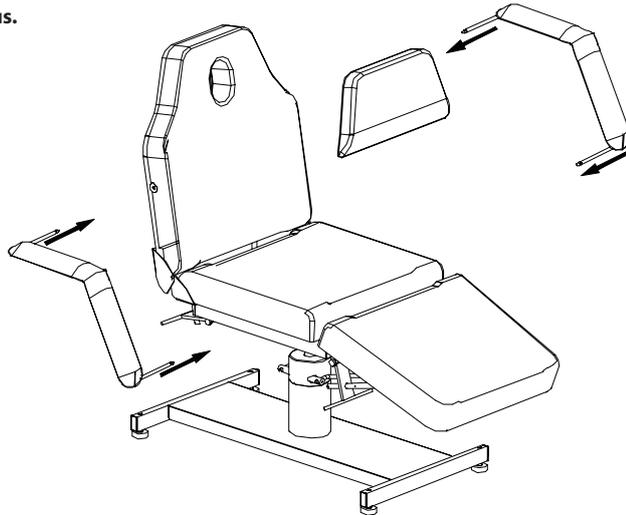

Réglage de hauteur



1. Appuyer sur la pédale légèrement pour relever tout le lit. Appuyer sur la pédale en continu pour abaisser tout le lit.
2. Appuyer sur la pédale pour arriver à la position la plus haute pour stabiliser le lit.

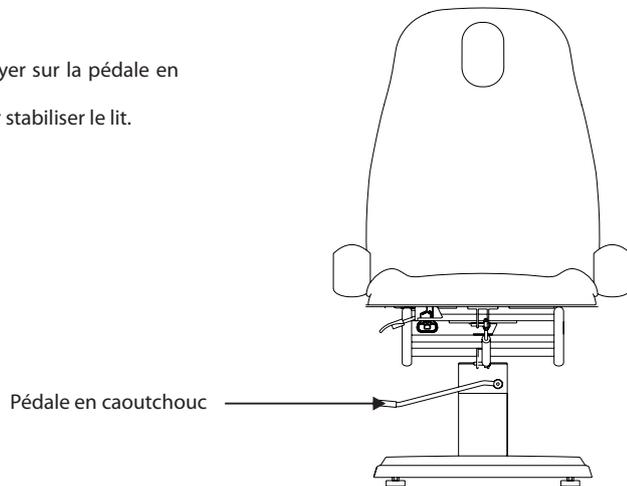

6 PARAMÈTRES TECHNIQUES

Température ambiante	0°C--40°C
Humidité relative	30%^90%
Charge nominale de levage	175 kg

Dimensions du colis

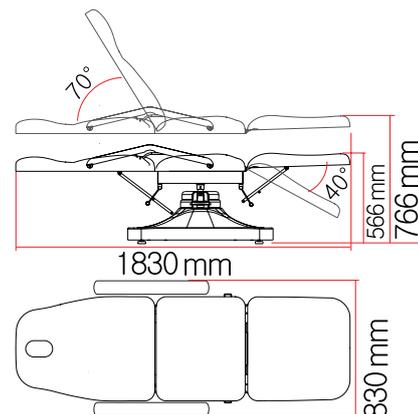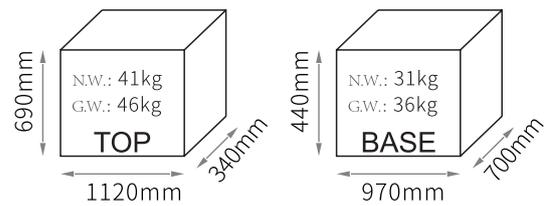

7 ENTRETIEN

1. Après chaque traitement, utiliser un produit nettoyant neutre pour éliminer la poussière, les taches sur le cuir ou le revêtement en plastique. Ceci pour éviter le vieillissement prématuré de la couverture en cuir et en plastique.
2. Lubrifier régulièrement les pièces mobiles (une fois par an)

8 RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Bruit anormal	1. Les pièces rotatives ne sont pas suffisamment lubrifiées	1. Ajouter de l'huile de lubrification
	2. Les pièces rotatives (telles que charnières) ne sont pas suffisamment lubrifiées	2. Ajouter de l'huile de lubrification

Si le problème n'est toujours pas résolu après les opérations ci-dessus, contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le résoudre.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.