

# CV2S2000



<b>MANUALE DI UTILIZZO</b>	<b>5</b>
<b>USER MANUAL</b>	<b>11</b>
<b>MANUAL DE USO</b>	<b>17</b>
<b>NOTICE D'UTILISATION</b>	<b>23</b>
<b>BENUTZERHANDBUCH</b>	<b>29</b>

## NOTICE D'UTILISATION

---

*MNPG368-00 Édition 25/08/2021*

# *CV2S2000*

# *Applicateur*

# *professionnel*

# *avec deux*

# *solénoïdes*

*I.A.C.E.R. Srl*

*[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)*

### **Introduction**

L'appareil **CV2S2000** est un applicateur professionnel à deux solénoïdes pour la magnétothérapie à basse fréquence.

Il s'adapte facilement à n'importe quelle partie du corps grâce à la présence de l'élastique thérapeutique.

Le dispositif est classé dans la classe I, conformément à la règle 1 (4.1) visée à l'annexe VIII du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.

UDI-DI de base : 8019781PEMFLFAPPP8


UDI-DI : (01)08019781472076

### Informations techniques

#### **Caractéristiques techniques :**

- Dimensions de l'applicateur : diamètre 11 cm + élastique de 115 cm ;
- Longueur du câble : 184 cm ;
- 2 solénoïdes professionnels ;
- 1 câble de connexion ;
- Compatible avec les modèles de la série MAG2000 et LaMagneto.

### Étiquette

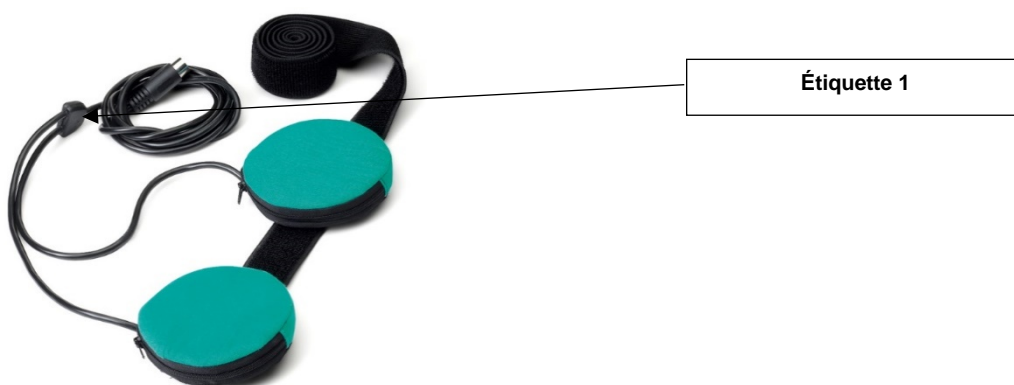


**Étiquette 1**







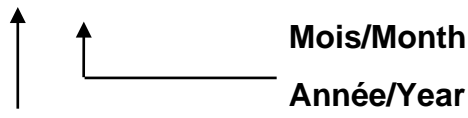


29x18.7mm

**Étiquette 2 - (Étiquette câble)**



**Symboles :**

Symbole	Signification
	Logo du fabricant.
	Conforme au règlement (UE) n° 2017/745
	Données du fabricant.

Symbole	Signification
	Date de fabrication (AAAA-MM).
	Suivre le mode d'emploi.
	Dispositif médical.
	Directive DEEE pour l'élimination des déchets électroniques.
	Partie appliquée type BF.
	Températures admises (température de stockage, sur confection)
	Humidité relative (humidité relative de stockage, sur confection)

## Transport et stockage

Aucune mesure particulière n'est à prendre pendant le transport. En ce qui concerne le stockage, l'appareil est protégé jusqu'aux conditions environnementales suivantes :

*température ambiante de +5 à + 40 °C*

*humidité relative de 15 à 93 %*

## Modalités d'utilisation

### **Mode d'emploi de CV2S2000**


*Respectez les consignes de la notice d'utilisation fournie avec votre appareil.*

*Respectez les avertissements donnés dans les notices d'utilisation des produits de la famille MAG2000 ou de la famille LaMagneto.*

**Nettoyage de CV2S2000**

Pour le nettoyage de CV2S2000, il est recommandé de débrancher l'applicateur à deux solénoïdes du dispositif avant d'effectuer toute opération. Nettoyez le tissu avec un chiffon imbibé d'eau simple et de savon neutre et attendez qu'il sèche complètement avant de réutiliser l'applicateur à deux solénoïdes pour une séance thérapeutique.

**Informations pour l'élimination**

Le produit est soumis à la norme DEEE (présence sur l'étiquette du symbole ) en matière de tri sélectif : pour l'élimination du produit, utiliser les lieux équipés pour la collecte de matériel électronique en contactant les autorités compétentes locales ou directement le fabricant.

**Maintenance et assistance**

Aucun entretien particulier n'est requis. Contactez le fabricant pour la vérification biannuelle du fonctionnement du dispositif.

Le fabricant a l'exclusivité concernant les interventions d'assistance technique sur l'applicateur CV2S2000. Pour toute intervention d'assistance technique, s'adresser à :

**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE)

Tél. +39 041.5401356 • Fax +39 041.5402684

**Garantie**

CV2S2000 est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie est nulle en cas d'altération, de négligence et d'utilisation inappropriée de l'applicateur et en cas d'intervention sur celui-ci par du personnel non autorisé par le fabricant ou le revendeur agréé.



## I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it) - PEC: [iacer@pec.it](mailto:iacer@pec.it) - Web: [www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)

