


ÉLECTRODES

Électrodes autocollantes pour électrostimulation

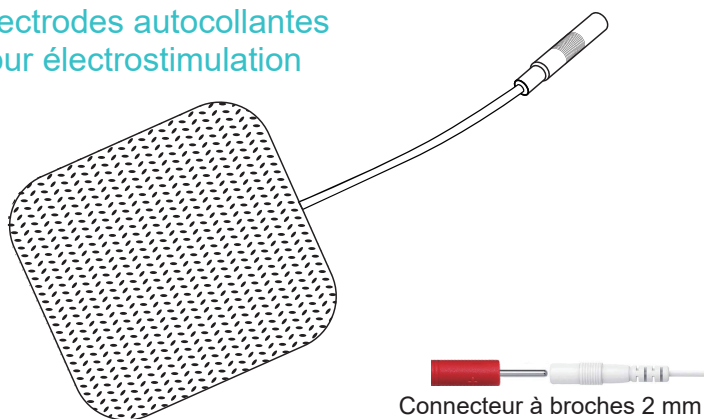

Connecteur à broches 2 mm

Usage prévu

Les électrodes autocollantes sont prévues comme interface adhésive, conductrice et réutilisable entre la peau du patient et les électrostimulateurs du commerce, tels que TENS (Neurostimulation Électrique Transcutanée), EMS (Stimulation Musculaire Électrique), IF ou OFC (Courant Interférentiel) ou PGF (Stimulation Galvanique Pulsée) pour la transmission du courant électrique, avec ou sans ordonnance.



LDPE

Mode d'emploi

Application

1. Nettoyer soigneusement la peau avant chaque application d'électrodes. Les électrodes ne collent pas bien s'il reste de la lotion, de l'huile, du maquillage, de la saleté, etc. sur la peau.
2. Éteindre le stimulateur avant d'appliquer les électrodes sur votre peau.
3. Insérer les broches du fil conducteur de l'appareil dans les connecteurs du fil d'électrode.
4. Retirer les électrodes de la doublure protectrice et appliquez-les fermement sur la peau.

Retrait


1. Éteindre le stimulateur avant de retirer les électrodes de la peau.
2. Soulever un coin de l'électrode, retirer l'électrode de la doublure protectrice, la décoller. Ne pas décoller l'électrode par fil.
3. Placer les électrodes sur la doublure et déconnecter le fil conducteur en tordant et en tirant sur les connecteurs du fil d'électrode.

Entretien et stockage

1. Entre les utilisations, ranger les électrodes dans le sachet refermable dans un endroit frais et sec.
2. La durée de vie des électrodes varie en fonction de l'état de la peau, du stockage, de la quantité d'utilisation, du type de stimulation et du site de stimulation. La durée de vie des électrodes peut être prolongée en suivant attentivement les instructions d'application ci-dessus et ci-dessous.
3. Éviter que les électrodes soient exposées à la lumière directe du soleil ou à une humidité extrême. Conditions de stockage recommandées: 5°C - 27°C, humidité relative: 40% - 70%.
4. NE PAS laisser les électrodes à découvert dans l'air car cela diminuera la viscosité et les performances du produit.

Mise en garde

1. Lire attentivement les instructions avant utilisation.
2. Les électrodes sont destinées à un usage unique sur un seul patient.
3. NE PAS appliquer sur une peau éraflée. En cas d'éruption cutanée, arrêtez l'utilisation et contactez un médecin. NE PAS utiliser en conduisant un véhicule motorisé ou en faisant fonctionner des machines.
4. NE PAS démonter ni modifier les électrodes.
5. À utiliser uniquement avec des appareils de type stimulation électrique.
6. NE PAS utiliser sur les enfants ou les nourrissons. Ces électrodes n'ont pas été évaluées pour un usage pédiatrique.

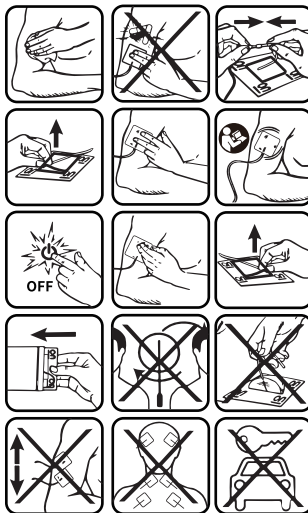

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



LOT

SANS
LATEX



Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.
202,2/F, Building 27, Dafa Industrial park, Longxi
Community, Longgang District, Shenzhen, China
Made in China