

FRANÇAIS

COUSSIN ANNULAIRE

AVERTISSEMENTS

Avant d'effectuer toute opération, vérifiez visuellement l'intégrité de l'appareil. Si le produit est défectueux, contactez immédiatement le point de vente où vous avez acheté le produit.

Erregi sas décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de l'appareil. En cas d'accident grave lié à l'utilisation du dispositif, veuillez signaler l'événement au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

DESCRIPTION

Coussins de prévention des escarres 100 % coton, avec rembourrage en fibre creuse siliconée. Certains dispositifs sont équipés d'une fermeture à Velcro. La haute résilience et la grande respirabilité permettent une action efficace dans la prévention de l'apparition des lésions de décubitus.

INDICATIONS

Prévention des escarres pour les patients en fauteuil roulant afin de réduire les pics de pression, de diminuer les forces de cisaillement et de friction et de favoriser la circulation de l'air

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Dispositif médical indiqué pour la prévention des escarres, à utiliser après évaluation clinique par un médecin spécialiste. Placez le coussin sur le siège du fauteuil roulant en veillant à ce que les attaches velcro, lorsqu'elles existent, soient positionnées du côté du dossier. Fixez ensuite le coussin au cadre rigide du fauteuil roulant à l'aide des attaches velcro. Bien que le dispositif soit indiqué pour la prévention des escarres, il ne permet pas de contrôler tous les facteurs qui en sont la cause. Il est donc recommandé de surveiller régulièrement la zone affectée, de mobiliser fréquemment le patient et d'accorder une attention particulière à l'hygiène. À cette fin, il est conseillé de consulter les protocoles et les lignes directrices pour la prévention des escarres. Utilisez toujours l'appareil en portant des vêtements de protection. Dispositif non ignifuge.






CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication n'a été identifiée, sauf en cas de sensibilité avérée aux matériaux des composants.

COMPOSITION

Intérieur : Fibre creuse en silicone
Doublure : 100 % coton

MODE DE LAVAGE

			
LAVAGE MAX 40°	PAS D'EAU DE JAVEL	NE PAS REPASSER	NE PAS UTILISER DE SÈCHE-LINGE
	UTILISER TOUS LES SOLVANTS SAUF LE TÉTRACHLORÉTHYLÈNE		

Le fabricant n'est pas responsable des éventuelles variations des caractéristiques techniques du dispositif en cas de non-respect des instructions de lavage

CONSERVATION











Stocker à l'abri de toute source de lumière, de chaleur et d'humidité.

DÉSINFECTION

Utilisez des produits à usage médico-chirurgical

ÉLIMINATION

Mettez l'appareil au rebut conformément aux règles de protection de l'environnement et à la collecte sélective des déchets

	Code produit		Dispositif médical
	Numéro de lot		Fabricant
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Consulter les instructions d'utilisation
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
	Date de fabrication		Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel

NE PAS retirer l'étiquette du dispositif médical, car elle permet la traçabilité du produit fourni (fabricant, UDI, numéro de lot, code produit).

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

REF 03/04 (Gima 28549)

 **Erregi S.a.s.**
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.ausilimedici.it
MADE IN ITALY



M28549-Rev.3-11.24