



## COUSSIN AVEC CENTRE CONCAVE EN FIBRE CREUSE SILICONÉE - CODE 28552

Dispositif non invasif appartenant à la classe I (directive 93/42/CEE, décret-loi 46/1997 et amendements et/ou intégrations successifs)

### MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

**DESCRIPTION:** Coussin avec centre concave réalisé en fibre creuse siliconée. La caractéristique principale de la fibre creuse est la capacité de revenir à la forme d'origine même après de fortes sollicitations et pression: ceci permet, au fil du temps, de conserver les caractéristiques de souplesse et d'élasticité. Ces caractéristiques permettent l'équirépartition du poids corporel en évitant l'occlusion veineuse qui est la cause de l'apparition des escarres. L'écrasement central stabilise la fibre et augmente le confort.

**COMPOSITION:** • Extérieur: tissu 100% coton. • Intérieur: fibre creuse de polyester siliconée.

**INDICATIONS:** Prévention des escarres.

**MISES EN GARDE:** Malgré la grande simplicité d'utilisation du dispositif, nous en recommandons l'usage à du personnel médical et paramédical adéquatement formé.

**PRÉCAUTIONS:** En ce qui concerne la réaction au feu, le dispositif n'est pas ignifuge.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:** La société **GIMA S.p.A. DÉCLARE** que le présent dispositif non invasif appartenant à la classe I est conforme à la directive européenne 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux (transposée par l'état italien avec le décret-loi du 24 février 1997 et amendements et/ou intégrations successifs).

**USAGE:** Le coussin a été conçu pour les fauteuils roulants et d'autres supports d'assise rigide pour prévenir les escarres. Nous conseillons de toujours faire asseoir et lever le patient avec un maximum de précaution et de délicatesse.

**ENTRETIEN:** Le dispositif peut être lavé avec un cycle délicat et des savons neutres à 30/40°C, il est également possible d'effectuer un lavage à sec avec perchloroéthylène, nous déconseillons par contre le blanchiment. Ne pas repasser.

En ce qui concerne le vieillissement des dispositifs, aucun phénomène particulier n'est à signaler, à l'exception de l'usure normale due à l'utilisation prolongée. Une utilisation correcte et des lavages délicats peuvent prolonger la durée de vie du dispositif.

**Le fabricant décline toute responsabilité pour les éventuelles variations des caractéristiques techniques du dispositif en cas de non-respect des modalités de lavage.**



**DÉSINFECTION:** Utiliser des produits désinfectants marqués "dispositif médical".

**CONSERVATION:** À conserver de préférence en position horizontale, à l'abri des sources de lumières, de la chaleur et de l'humidité.

**ÉLIMINATION:** Les dispositifs peuvent être considérés déchets non dangereux et peuvent être par conséquent éliminés de façon ordinaire.

La société **GIMA S.p.A.** décline toute responsabilité pour les dommages physiques ou matériels liés à un comportement incorrect ou à un usage non conforme.

Les éventuelles suggestions concernant le produit peuvent être communiquées à notre société, celles-ci seront certainement prises en considération si elles peuvent l'améliorer réellement.



Produit par: **GIMA S.p.A.** - Via Marconi, 1 - Gessate (MI) - Italie - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

REF

**28552**