

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Éviter de toucher le fourreau en latex avec des ongles coupants, des anneaux, etc. Le traiter avec douceur en l'extrayant de l'emballage.
- Placer le gel d'échographie dans le fourreau.
- Dérouler doucement le fourreau sur l'échographe.
- Le fourreau est à usage unique. Ne le laver jamais.
- Pour son lubrification utiliser seulement des gels d'échographie à base d'eau. Les lubrifiants huileux peuvent endommager le fourreau.
- Ce produit contient latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques.
- Respecter la date de péremption indiqué sur l'emballage.

INSTRUCTIONS DE CONSERVATION

- Stocker les fourreaux d'échographie dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Ne pas les sortir de son emballage jusqu'au moment de son utilisation.

INSTRUCTIONS POUR REJETER LE FOURREAU

- Après avoir utilisé le fourreau d'échographie, le rejeter dans un container de résidus sanitaires.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

- Evitar tocar la funda de látex con uñas afiladas, anillos, etc. Tratarla con suavidad al extraerla del envase.
- Colocar el gel de ecografía en el interior de la funda.
- Desenrollar suavemente la funda sobre el transductor o ecógrafo.
- La funda solo puede utilizarse una vez. No lavarla jamás.
- Para su lubricación utilice sólo geles de ecografía en base acuosa. Los lubricantes oleosos pueden dañar la funda de látex.
- Este producto contiene látex de goma natural que puede ocasionar reacciones alérgicas.
- Observar la fecha de caducidad impresa en el envase.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

- Guardar las fundas de ecografía en un lugar fresco y seco, apartadas de la luz solar y del calor.
- No sacarlas de su envase hasta el momento de su utilización.

INSTRUCCIONES DE DESECHO

- Después de utilizar la funda de ecografía, deséchela en un contenedor de residuos sanitarios.



CEX INTERNATIONAL - Barcelona - Spain C/Canigo, 6 - Llerona, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona - Spain