

FR - GIMA BRUSH: Brosse pour prélèvement cytologique endocervical

La brosse est en poils de nylon fixés par une bague métallique. Elle est montée sur une tige en plastique.

Elle est indiquée pour prélever des cellules dans le canal endocervical du col de l'utérus. Le dispositif ne doit être utilisé que par un personnel qualifié, formé et autorisé à effectuer le prélèvement pour le Frottis.

Ne pas mettre près des sources de chaleur, extraire le dispositif de la confection juste avant l'utilisation. Avant l'utilisation, contrôler que le dispositif est en parfait état.

UTILISATION PREVUE : GIMA BRUSH permet de prélever les cellules desquamées dans le canal endocervical du col de l'utérus.

INDICATIONS : Elle est également indiquée en cas de canal cervical sténosé

CONTRE-INDICATIONS: Elle est contre-indiquée en cas de grossesse

MODE D'EMPLOI: introduire le spéculum dans le vagin, afin de voir le col de l'utérus, extraire Endobrush de la confection en la tenant par la tige, l'introduire lentement dans le col de l'utérus, effectuer une rotation complète, retirer lentement, frotter et tourner plusieurs fois les poils sur la vitre porte-objet.



Biogyn S.r.l. Via volta, 14 – 41037 Mirandola Italy

Distributor: Gima S.p.a. Via Marconi, 1 – 20060 Gessate Italy



REF

EBR2 S01

CE 0476



MP 2005 002 rev08 del 07/21