

MODÈLES F7922/4

Câble de connexion avec borne mâle Ø 4,0 mm

MODÈLES F7922/24

Câble de connexion avec 2 bornes mâles Ø 4,0 mm

MODÈLES F7923/F

Câble de connexion embout de type Valleylab pour modèles Force 1-2-4-4B

MODE D'EMPLOI

Vérifier l'intégrité de l'emballage, des câbles et des connecteurs: en présence de détériorations ou de défauts visibles, ne pas utiliser le produit.

Connexion de câbles avec pince:

- relever le petit levier mobile placé sur la partie en plastique bleu de la pince.
- introduire la languette de la plaque à usage simple à l'intérieur du réceptacle présent au niveau de la partie en plastique bleu de la pince.
- reporter le petit levier dans sa position de repos.

Connexion de câbles avec fiches mâles de 4 mm de diamètre:

- Relier les fiches aux trous qui se trouvent sur la plaque.
- Durant l'insertion, la gaine de protection présente sur la pointe de la fiche se retire afin de permettre la connexion à la plaque.

ATTENTION

- relier la pince à la languette de la plaque à usage simple en prenant toutes les précautions afin de positionner la pince à l'extérieur de la zone recouverte par le gel.
- **Le produit n'est pas stérile.**
- Les appareillages et les plaques utilisés avec le produit présent doivent être conformes aux normes en vigueur.

NB: Les produits doivent être utilisés par du personnel médical qualifié.

- Ne pas tirer les câbles par le matériel isolant

NETTOYAGE

Les câbles peuvent être nettoyés par un drap souple avec de la solution désinfectante.

DURÉE DE VIE DU PRODUIT

La durée de vie de ces produits dépend du nombre de leur utilisation et du type d'entretien. Il faudra absolument les jeter si l'on note que le guipage est détérioré ou les attaches et les connecteurs sont oxydés.

STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine à des conditions environnementales (température et éventuelle humidité) spécifiées sur l'étiquette du sachet. En posant sur l'emballage des poids lourds, le produit pourrait s'abîmer.

REMARQUES GÉNÉRALES

Si, pendant ou après l'utilisation de ce dispositif, un grave incident a lieu, le rapporter au fabricant et à l'autorité nationale. Pour tout dysfonctionnement ou défaut de l'appareil, informez le Service Qualité du Fabricant.

ÉCOULEMENT DES DÉCHETS

Les déchets provenant de structures sanitaires doivent être éliminés selon les règles en vigueur.



MODE D'EMPLOI CÂBLES DE CONNEXION ENTRE PLAQUES ET BISTOURIS ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION ET INDICATIONS

La confection de vente du produit **N'EST PAS STÉRILE**.

CÂBLES DE CONNEXION POUR PLAQUES À USAGE UNIQUE POUR ÉLECTROCHIRURGIE AVEC EMBOUT À LANGUETTE.

Les câbles sont dotés d'embout à pince et de l'autre côté de divers connecteurs qui rendent les câbles compatibles avec de nombreux bistouris électriques.

MODÈLES F7902 – F7902-S – F7904 - F7902/3MT

Câble de connexion avec embout Jack mono Ø6,3 mm

MODÈLES F7903

Câble de connexion avec embout de type Valleylab

MODÈLES F7902/4

Câble de connexion avec borne mâle Ø 4,0 mm

MODÈLES F7902/24

Câble de connexion avec 2 bornes mâles Ø 4,0 mm

MODÈLES F7903/F

Câble de connexion avec embout de type Valleylab pour les modèles Force 1-2-4-4B

CÂBLES DE CONNEXION POUR PLAQUES RÉUTILISABLES POUR ÉLECTROCHIRURGIE AVEC EMBOUT FEMELLE 4MM

Les câbles sont dotés de bornes de sécurité 4mm pour la connexion aux plaques et de l'autre côté de divers connecteurs qui rendent les câbles compatibles avec de nombreux bistouris électriques.

MODÈLES F7922 – F7924

Câble de connexion avec embout Jack mono Ø 6,3 mm

MODÈLES F7923

Câble de connexion avec embout de type Valleylab

	IT	EN	FR	DE	ES	RU	PT	CS
	Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici	Compliant with current European legislation on Medical Devices	Conforme à la législation européenne en vigueur sur les dispositifs médicaux	Entspricht der aktuellen europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte	Cumple con la legislación europea vigente sobre dispositivos médicos	Соответствует действующему европейскому законодательству о медицинских устройствах	Em conformidade com a legislação europeia em vigor sobre Dispositivos Médicos	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích
	Dispositivo medico	Medical Device	Dispositif médical	Medizinprodukt	Producto sanitario	Медицинское устройство	Dispositivo médico	Zdravotnický prostředek
	Identificativo unico del dispositivo	Unique Device Identifier	Identifiant unique des dispositifs	Einmalige Produktkennung	Identificador único del producto	Уникальный идентификатор устройства	Identificação única do dispositivo	Jedinečným identifikátorem prostředku
	Attenzione, consultare la documentazione allegata	Caution, consult accompanying documents	Attention, lire attentivement les instructions	Achtung, Gebrauchsanweisung lesen	Atención, leer atentamente las instrucciones	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации	Atenção, ler atentamente as instruções	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Consultare le istruzioni d'uso	Consult instructions for use	Instructions d'utilisation	Gebrauchsanweisung lesen	Consulte las instrucciones de uso	Обратитесь к инструкции по применению	Consulte as instruções de utilização	Varování, čtěte průvodní dokumentaci
	Fabbricante	Manufacturer	Fabricant	Hersteller	Fabricante	Производитель	Fabricante	Výrobce
	Numero di catalogo	Catalogue number	Code de référence	Katalognummer	Número de Catálogo	Каталожный номер	Número de Catálogo	Katalogové číslo
	Numero di lotto	Batch code	Numéro de lot	Posten-Nummer	Número de Lote	Код партии	Número de Lote	Číslo šarže
	Data di produzione	Date of manufacture	Date de production	Herstellungsdatum	Fecha de Producción	Дата изготовления	Data de Fabrico	Datum výroby
	Scadenza	Use by	Date de péremption	Verfalldatum	Fecha de Caducidad	Использовать до	Prazo de Validade	Spotřebujte do
	Limiti di temperatura	Temperature limitation	Limites de température	Temperaturbereich	Límites de Temperatura	Температурные ограничения	Limites de Temperatura	Omezení teploty
	Limiti di umidità	Humidity limitation	Limites d'humidité	Feuchtigkeitsbereich	Límites de Humedad	Ограничения по влажности	Limites de Humidade	Omezení vlhkosti
	Numero di pezzi	Quantity of pieces	Nombre de pièces	Stückzahl	Cantidad de piezas	Количество штук	Quantidade de peças	Počet kusů