



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MANIPOLO MB MONOUSO SINGLE USE MB HANDLE PIECE A MAIN MB JETABLE MANGO MB DESCARTABLE

**Manuale d'uso - User manual
Instruction de fonctionnement - Manual de uso**

REF 30553



Tecno Instruments Pvt. Ltd.
316C Small Industrial Estate
Sialkot, 51340 (PAKISTAN)

EC REP

Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53
1030 Brussels (BELGIUM)

CE 1639



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



STERILE EO

DESCRIPTION / UTILISATION PRÉVUE:

Ces dispositifs médicaux sont jetables et livrés stériles. Contrôlez la fiche correspondante sur la base du générateur et passez au branchement. Appuyez sur CUT/ bouton jaune pour la coupe et le bouton COAG/bleu pour la coagulation.

CONTRE-INDICATIONS:

Ces appareils ne doivent jamais être utilisés dans les cas suivants:

- Dommages visibles sur la surface extérieure de l'appareil (par ex. plastique endommagé) ou endommagement du connecteur.
- Ces appareils ne passent pas le contrôle décrit ici.
- En présence de gaz, liquides et/ou environnements inflammables à l'oxygène enrichi.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- Utilisez le niveau de puissance le plus faible disponible sur l'unité électrochirurgicale afin d'obtenir l'effet chirurgical souhaité.
- Lors des opérations d'électrochirurgie, ne laissez pas les câbles connectés aux appareils en contact avec la peau du patient ou de l'opérateur.
- Ne laissez pas les câbles connectés à ces appareils à proximité des câbles d'autres dispositifs électriques.
- Placez toujours les accessoires non utilisés pour l'électrochirurgie dans un endroit isolé et sûr, comme une mallette.
- Vérifiez et testez chaque dispositif médical avant chaque utilisation.
- Remplacez les dispositifs médicaux en fin de vie.
- L'activation d'un dispositif électrochirurgical est susceptible de causer un couplage capacitif lorsqu'il n'est pas en contact avec le tissu cible ou dans une position en mesure d'électriser le tissu (électrocution).

INSPECTION:

Veillez inspecter ces dispositifs médicaux avant et après chaque utilisation. Inspectez visuellement les appareils à la recherche de dommages évidents, notamment:

- Pièces en plastique cassées ou endommagées.
- Rupture ou endommagement des contacts du connecteur.
- Dommages, telles que coupures, piqûres, coupures, abrasions, gonflements, décoloration importante.
- Endommagement, corrosion ou état de désalignement.

CONSERVATION ET UTILISATION:

Veillez conserver la pièce à main jetable stérile dans un endroit propre, frais et sec. Protéger des dommages mécaniques et des rayons directs du soleil. Faites très attention lors de l'utilisation.

	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec.		Limite de température
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE		Code produit
	Fabricant		Consulter les instructions d'utilisation		Numéro de lot
	Date de fabrication		Date d'échéance		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.