

# # FOOTSWITCH

REF 00305.06\_S

1-2 cut  
2-3 coag  
4-5 cc  
6 nc



LED SpA  
Via M.T.Cicerone 138  
03100 Frosinone (LT) - ITALY

IT EN ES FR DE PT PL

# SURGEON

IP 67  
WATER PROOF




EXPLOSION PROOF

cable 5 mt



MADE IN ITALY

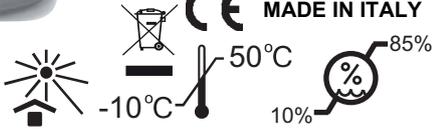

IA00305-06\_Sc\_ML1  
ed. 2022-1& 2022 (C) LED SpA

## (FR) PÉDALE DOUBLE ÉTANCHE (TOUCH / TOUCH HP 300-400)

Le produit est fourni pour le contrôle pédale d'unités électroniques compatibles.

Vérifier le status des produits avant de l'utilisation. Jeter les produits défectueux.

Ce produit est compatible avec les versions d'équipement qui en ont besoin, reportez-vous aux instructions de l'unité.

Les connexions doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Installation:

- Insérez le connecteur de produit sur connecteur spécifique de l'unité électronique, en accordant une attention à la direction d'insertion (fig. A - partie 1-2).
- pour verrouiller le produit, tournez la molette sur l'appareil (fig. A - partie 3).

Allumez l'appareil et effectuer des tests fonctionnels en agissant sur la pédale (fig. A - partie 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(FR) APPUYER = ACTIVATION / RELÂCHER = PAS D'ACTIVATION  
JAUNE = COUPE / BLEU = COAGULATION