

# LUXIFLEX LED PLUS

**MIMSAL**

**MIMSAL TRADE S.L.**

C. Mollet 17, Pol. Ind. Palou Nord - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain  
Tel. +34 930 139 860 - [mimsal@mimsal.com](mailto:mimsal@mimsal.com) - [www.mimsal.com](http://www.mimsal.com)



ver. 1

**MIMSAL**

## LUXIFLEX LED PLUS

cod. I0104NL

Luminaire très polyvalent, design, pour consultations et examens, grandes prestations, idéal pour les centres médicaux et vétérinaires.

La distance de travail optimale entre la source de lumière et l'objet éclairé est de 50 cm.

### 1. Installation

- Requiert un support MIMSAL, à installer avant de placer la lampe.
- Un support étrier de table AH est fourni et des accessoires tels que les supports muraux, de plafond ou une base roulante peuvent être fournis en option.
- MIMSAL ne peut garantir la vie et la fonctionnalité en cas d'utilisation d'accessoires de tiers.

### 2. Mises en garde

- Toujours débrancher le luminaire pour procéder au nettoyage ou à la maintenance.
- Nettoyage à sec ou avec un léger mélange d'eau et de savon normal. Éviter d'utiliser de l'alcool, des acides ou tout type de dissolvants organiques.
- Ne pas laisser le luminaire allumé plus de 8 heures d'affilée.

### 3. Résolution des problèmes et maintenance

- À réaliser uniquement par des installateurs électriques qualifiés ou tout autre personnel qualifié.

Pour tout autre problème, veuillez contacter votre représentant MIMSAL.

MIMSAL n'est responsable que de la maintenance, des réparations ou des modifications réalisées avec des pièces de rechange d'origine et par le personnel de MIMSAL.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

	LUXIFLEX LED PLUS
Source lumineuse	LED 10W
Durée de vie utile	> 50.000 h
Lux à 50 cm	35.000 lux
Température de couleur	4.500° K
Rendement couleur chromatique	97%
Classe de protection électrique	Classe II
Longueur du bras	72 cm
Couleur	Blanc
Puissance	110/230V
Fréquence	50/60 Hz