



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Distribué par - Distribuito por:

Gima S.p.A

Via Marconi, 1

20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com


www.gimaitaly.com

## ÉCRAN FACIAL GIMA - PANTALLA FACIAL GIMA

Remboussage frontal remplaçable  
Relleno frontal intercambiable

Visière basculante  
Visor abatible

Bande avec fermeture velcro  
Banda con cierre de velcro

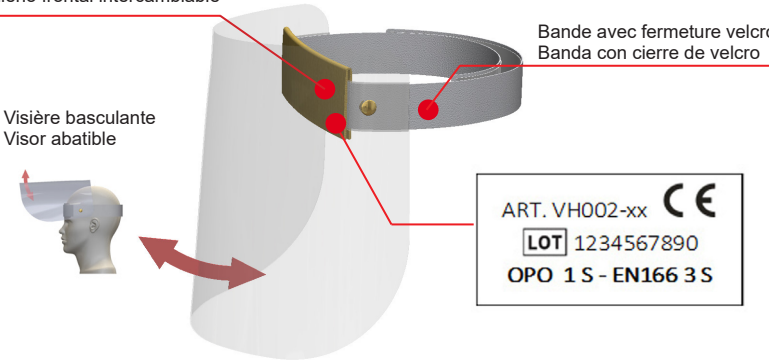

FR

### MARQUAGE ET SYMBOLOGIE

VH002: Modèle Produit, xx code couleur du ruban. **LOT** numéro de lot OPO: Identification du fabricant; 1: Classe optique; S: Symbole d'impact à basse énergie; -EN166 Norme technique de référence; 3: Symbole pour les liquides; S: Symbole d'impact à basse énergie; CE: Certification CE. L'écran est conforme au Règlement UE 2016/425 et a reçu la certification CE par l'Organisme Notifié N° 0426 (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milano) il est aussi conforme à la norme EN 166:2001. La déclaration de conformité CE est disponible sur le site web du fabricant et à l'adresse de Gima [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

### APPLICATION ET RÉGLAGE

- 1) Appliquez le rembourrage frontal et fixez-le par la fermeture velcro.
- 2) Placez l'écran sur le front en position centrale.
- 3) Tendez les sangles et fixez-les par la fermeture velcro dans la position souhaitée.

### ENTRETIEN ET RÉUTILISATION

Inspectez l'écran avant toute utilisation: vérifiez visuellement que l'écran est nettoyé, transparent et sans fissures ou rayures et que les soudures sont intactes. Vérifiez aussi que la bande serre-tête n'est pas usée et qu'elle ne se desserre pas une fois qu'elle est fixée à la tête. Remplacez l'écran s'il est endommagé.

- Nettoyez le produit en cas de contamination avec des matières étrangères.

- Remplacez le produit en cas d'endommagement ou en cas de contamination inamovible.

**Nettoyage:** L'EPI doit être nettoyé avec un détergent non agressif, de l'eau chaude utilisée avec un chiffon doux à utiliser également lors du rinçage. Utiliser des solutions de désinfection à base d'alcool pour les activités de désinfection.

Le support avant peut être lavé à la machine à 40° pour une hygiène normale, mais si un assainissement est nécessaire, il doit être remplacé.

**Réutilisation:** L'écran est réutilisable à condition qu'il soit préalablement hygiénisé et que le rembourrage frontal soit préalablement remplacé.

### CONSERVATION, STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT

#### CONSERVATION, STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT

Protéger de la lumière directe du soleil, des lampes fluorescentes, des rayons X et de l'ozone. Conserver dans un endroit sec à l'intérieur de leur emballage et les protéger de toute déformation. Température : +5 °C ÷ +40 °C, Humidité relative : < 60 %. Transporter dans une enveloppe scellée.

Date d'expiration : 5 ans à compter de la vente à l'utilisateur final, si stocké dans son emballage d'origine et dans les conditions décrites ci-dessus

### INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Les matériaux qui peuvent entrer en contact avec la peau du porteur pourraient causer des réactions allergiques aux individus sensibles.

L'écran facial, lorsqu'il est porté par-dessus des lunettes ophtalmiques de référence, peut transmettre des chocs, créant ainsi un danger pour le porteur.

Remplacer l'écran si l'oculaire est rayé ou endommagé

Le protecteur n'est pas adapté à la protection contre les particules à grande vitesse, que ce soit à température ambiante ou à des températures extrêmes.

