



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Distribué par - Distribuito por:

Gima S.p.A


Via Marconi, 1

20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com


www.gimaitaly.com

ÉCRAN FACIAL GIMA - PANTALLA FACIAL GIMA

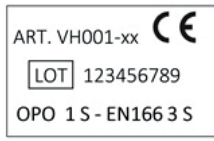

Bande avec fermeture velcro
Banda con cierre de velcro

Accessoire de verrouillage interchangeable
Accesorio de bloqueo intercambiable

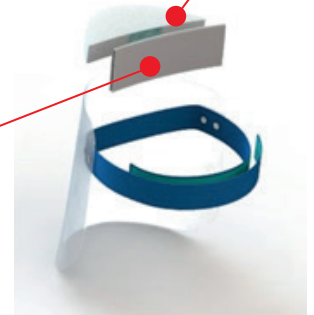

Remboussage frontal remplaçable
Relleno frontal intercambiable

FR

MARQUAGE ET SYMBOLOGIE

VH001: Modèle Produit, xx code couleur du ruban. [LOT]: numéro de lot OPO: Identification du fabricant; 1: Classe optique; S: Symbole d'impact à basse énergie; -EN166 Norme technique de référence; 3: Symbole pour les liquides; S: Symbole d'impact à basse énergie; CE: Certification CE. L'écran est conforme au Règlement UE 2016/425 et a reçu la certification CE par l'Organisme Notifié N° 0426 (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milano) il est aussi conforme à la norme EN 166:2001. La déclaration de conformité CE est disponible sur le site web du fabricant et à l'adresse de Gima www.gimaitaly.com

APPLICATION ET RÉGLAGE

- 1) Appliquez le rembourrage frontal et fixez-le par la fermeture velcro.
- 2) Placez l'écran sur le front en position centrale.
- 3) Tendez les sangles et fixez-les par la fermeture velcro dans la position souhaitée.

ENTRETIEN ET RÉUTILISATION

Inspectez l'écran avant toute utilisation: vérifiez visuellement que l'écran est nettoyé, transparent et sans fissures ou rayures et que les soudures sont intactes. Vérifiez aussi que la bande serre-tête n'est pas usée et qu'elle ne se desserre pas une fois qu'elle est fixée à la tête. Remplacez l'écran s'il est endommagé.

- Nettoyez le produit en cas de contamination avec des matières étrangères.

- Remplacez le produit en cas d'endommagement ou en cas de contamination inamovible.

Nettoyage: L'EPI doit être nettoyé avec un détergent non agressif, de l'eau chaude utilisée avec un chiffon doux à utiliser également lors du rinçage. Utiliser des solutions de désinfection à base d'alcool pour les activités de désinfection.

Le support avant peut être lavé à la machine à 40° pour une hygiène normale, mais si un assainissement est nécessaire, il doit être remplacé.

Réutilisation: L'écran est réutilisable à condition qu'il soit préalablement hygiénisé et que le rembourrage frontal soit préalablement remplacé et tout accessoire de fermeture optionnel.

CONSERVATION, STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT

CONSERVATION, STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT

Protéger de la lumière directe du soleil, des lampes fluorescentes, des rayons X et de l'ozone. Conserver dans un endroit sec à l'intérieur de leur emballage et les protéger de toute déformation. Température : +5 °C ÷ +40 °C, Humidité relative : < 60 %. Transporter dans une enveloppe scellée.

Date d'expiration : 5 ans à compter de la vente à l'utilisateur final, si stocké dans son emballage d'origine et dans les conditions décrites ci-dessus

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ



Les matériaux qui peuvent entrer en contact avec la peau du porteur pourraient causer des réactions allergiques aux individus sensibles.

L'écran facial, lorsqu'il est porté par-dessus des lunettes ophtalmiques de référence, peut transmettre un choc, créant ainsi un danger pour le porteur.

Remplacer l'écran si l'oculaire est rayé ou endommagé

Le protecteur n'est pas adapté à la protection contre les particules à grande vitesse, que ce soit à température ambiante ou à des températures extrêmes.



Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
(O.P.O srl). Società Unipersonale
Via Bellini, 33 40067 Rastignano - (Pianoro) BO Italy
www.opo.it
Made in Italy

REF 30846

Modèle/Modelo VH001

