



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

OFTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER
PARKER HALOGEN OPHTHALMOSCOPE
OPHTALMOSCOPE HALOGÈNE PARKER
PARKER HALOGEN OPHTALMOSKOP
OFTALMOSCOPIO HALÓGENO PARKER
OFTALMOSCÓPIO DE HALOGÊNIO PARKER
ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ PARKER

منظار قاع العين هالوجين باركر

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها

REF 31476



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan



Merci d'avoir acheté notre produit. Ce produit répond aux exigences les plus strictes en ce qui concerne la sélection des matériaux de fabrication et le contrôle final. Ce mode d'emploi concerne notre marque d'ophtalmoscopes. Ces instructions doivent être suivies pour garantir la durabilité de ce produit.

L'opérateur/utilisateur doit lire attentivement et bien comprendre ce manuel afin de préserver la performance durable et fiable plus longtemps.

Après l'ouverture des emballages, il est avant tout nécessaire de comparer toutes les pièces avec la configuration standard. Vérifiez qu'elles soient toutes présentes et en parfait état.

CARACTÉRISTIQUES

- 1) Excellent éclairage pour la couleur de la peau et un éclairage uniforme.
- 2) 24 verres de mise au point avec une distance de -25 à +40.
- 3) La fenêtre d'affichage de dioptrie permet la lecture directe des valeurs de dioptrie (valeurs positives en vert et négatives en rouge).
- 4) Des unités hermétiquement fermées gardent le produit propre.
- 5) L'appuie-front en caoutchouc évite tout risque de rayure des verres.
- 6) Tête de l'ophtalmoscope à fixation à baïonnette, avec une ampoule halogène.
- 7) Manche alimenté par deux piles de type « C » 1,5 V. Pour une performance optimale, il est vivement recommandé d'utiliser des piles alcalines.
* Ces ophtalmoscopes sont emballés dans une mallette en simili-cuir, pochettes et étuis en plastiques.



Fig. 1

- A - Fenêtre du verre de mise au point
B - Réflecteur
C - Cadran de sélection du verre
D - Appuie-front en caoutchouc
E - Fenêtre d'affichage des valeurs de dioptrie

MODE D'EMPLOI

Avant toute utilisation, il est nécessaire d'insérer les piles dans leur compartiment, tel que décrit dans la procédure de remplacement des piles.

Tenez le manche à piles et la tête dans chaque main et faites coïncider les rainures de la baïonnette sur la tête et le manche, enfoncez la tête vers le bas et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez que la connexion entre la tête et le manche soit parfaite et que le rhéostat fonctionne correctement. Appuyez sur le bouton blanc du manche et tournez le bouton noir vers la gauche. L'appareil est maintenant opérationnel. L'intensité de l'éclairage peut être ajustée en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

Placez délicatement l'appuie-front en caoutchouc près de votre œil. Puis dirigez le faisceau lumineux au centre des verres oculaires.

Avec votre index sur le cadran de sélection des verres, utilisez le bon verre et prenez des notes relatives au traitement.

Éteignez l'appareil afin de préserver la durée de vie des piles. Tournez le bouton noir vers la droite jusqu'à entendre un clic une fois que le bouton est positionné sur (0).

OPHTALMOSCOPE HALOGÈNE

L'ophtalmoscope est conçu pour l'examen de l'œil.

Les lentilles de précision fournissent 24 réglages dioptriques, de +D : 0, 1 à 6, ensuite 8, 10, 12, 15, 20 et 40, à -D : 0, 1 à 6, ensuite 8, 10, 15, 20 et 25. La molette des lentilles peut être tournée dans le sens horaire ou antihoraire

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Avant l'utilisation, vérifiez bien le produit et ses accessoires (si fournis), la même opération doit être effectuée après le nettoyage. Si l'éclairage est intermittent ou s'il ne s'allume pas, vérifiez l'ampoule, les

pires et les contacts électriques. Si l'ampoule ne fonctionne plus, il est possible de la remplacer avec la pièce de rechange d'origine. Pour remplacer l'ampoule, suivez les instructions de remplacement (voir aussi fig.3).

NETTOYAGE

Verre

Le verre peut être nettoyé en humidifiant un coton-tige avec de l'alcool ou une solution d'eau et un détergent doux.



N'utilisez pas de matériaux abrasifs pour nettoyer les verres, car ces derniers risquent d'endommager la surface vernie des verres.

Manche

Le manche peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.

Les piles du manche ne doivent pas être immergées dans l'eau. Retirez les composants des piles pendant le nettoyage.

Vérifiez régulièrement l'état des piles, en vous assurant qu'il n'existe aucun signe de corrosion ou d'oxydation. S'il est nécessaire de les remplacer, il est fortement recommandé d'utiliser de nouvelles piles alcalines. Pour le remplacement des piles voir fig.2.

REMPACEMENT DE L'AMPOULE



Avant de retirer l'ampoule, assurez-vous que le dispositif ait été éteint pendant quelques minutes afin d'éviter de vous brûler.

Retirez la tête de l'ophtalmoscope tel que recommandé dans le mode d'emploi (Voir fig.2). Saisissez l'embout de fermeture et retirez-le (le cas échéant, utilisez une lime à ongles ou un objet similaire) (Voir fig.3)

Insérez l'ampoule de rechange en faisant coïncider soigneusement la saillie à la base de l'ampoule avec la cannelle pratiquée dans la tête de l'ophtalmoscope. Poussez l'ampoule jusqu'à qu'elle soit bien positionnée.

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DES PILES



S'il est nécessaire de remplacer les piles, veillez à manipuler les piles car avec précaution car les liquides contenus à l'intérieur peuvent irriter la peau et les yeux. Il convient d'utiliser uniquement des piles alcalines pour le remplacement des piles.

- Ouvrez le compartiment des piles, pour cela, tournez l'embout de fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Une fois ouvert, insérez les piles en respectant les polarités (voir fig.2).
- Pour fermer le compartiment des piles, vissez l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre en vérifiant que les piles soient en contact avec les pôles.

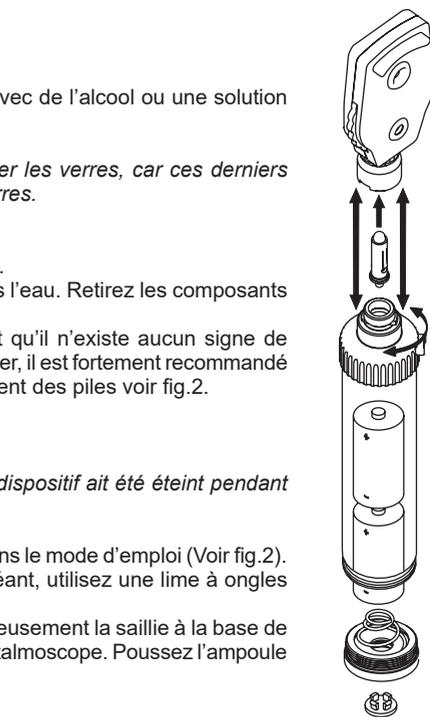


Fig. 2

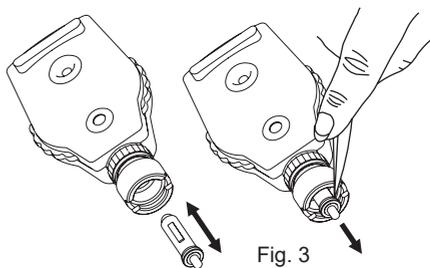


Fig. 3

RANGEMENT

Puisque le produit a été conçu avec des matériaux résistants à la corrosion et appropriés aux conditions ambiantes prévues pour son utilisation normale, il ne nécessite pas d'attention particulière. Cependant, il est nécessaire de le ranger dans un endroit fermé en s'assurant qu'il soit protégé de la poussière et de la saleté pour garantir ses propriétés d'hygiène. Rangez-le dans un environnement propre présentant une température normale.

PRÉCAUTIONS



Il doit être employé uniquement par un personnel médical qualifié.

Son utilisation est exclusivement réservée à un personnel médical qualifié. Pendant le nettoyage, assurez-vous que l'ampoule ou les piles ne soient pas imbibés d'eau.

N'utilisez pas de nettoyeurs ultrasoniques abrasifs, d'alcool ou d'autres produits chimiques qui pourraient détériorer le verre ou la qualité du miroir. Utilisez de l'eau tiède et du savon pour le verre. La stérilisation accélérée par autoclave du manche provoquera de graves dommages électriques. Évitez les réparations précaires. Les réparations doivent être uniquement effectuées avec des pièces de rechanges originales qui seront installées selon l'usage prévu.

Protégez la surface de l'ampoule contre les abrasions et rayures.

N'utilisez pas l'équipement en cas de dommage. Contactez votre vendeur.

	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Suivez les instructions d'utilisation
	À conserver dans un endroit frais et sec		À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Fabricant		Date de fabrication
	Code produit		Numéro de lot
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Appareil de type B
	Disposition DEEE		Dispositif médical
	Identifiant unique de l'appareil		



Élimination des déchets d'EEE: *Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.*

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.