


GUIDE D'UTILISATION DE L'ARMOIRE MURALE

Instruction pour le changement des piles

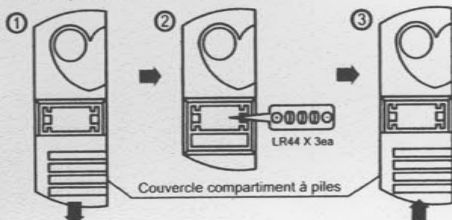

- ① Ouvrir le compartiment à piles
- ② Insérer les 3 piles LR44 comme indiqué sur la photo
Assurez-vous que le sens de polarité des piles soit respecté
- ③ Fermer le compartiment à piles

△ Attention : Changer les 3 piles en même temps.
Ne pas insérer des piles usagées avec des neuves.

- Les piles de l'alarme ont une autonomie de 30 minutes en utilisation continue (si la porte de l'armoire reste ouverte)
- Alimentation par 3 piles bouton type LR44 X 3EA
- Pour mettre l'alarme en service, baisser le bouton sur le boîtier de l'alarme puis fermer la porte.

 **CU Medical Systems, Inc.**

www.cu911.com

CE

• Head office

Dongwha Medical Instrument Complex
1647-1 Dongwha-ri, Munmak-eup, Wonju-si,
Gangwon-do, 220-801 Republic of Korea
TEL : +82 31 578 5725 / FAX : +82 31 578 5729

• Europe

Branch Office of CU Medical Systems, Inc. in Germany
Kuester Strasse 6, 30519 Hannover, Germany
TEL : +49 511 365 4353 / FAX : +49 511 848 6054

NF-OA12 : Armoire murale pour défibrillateur

French