

# Paramedic CU-ER Series

## CU-ER Series Infant ◊ Child Reduced Energy Defibrillator Pads

### Step-1




- Tear open the packaging of the pads

### Step-2



- Remove the pads from the packaging

### Step-3

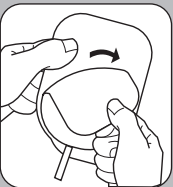


- Peel off the protective cover of the conducting gel of the pads

### Step-4

#### STICK TO BARE CHEST AND BACK

- Attach the pads to the patient. See the illustration at the back of the pads for proper placement

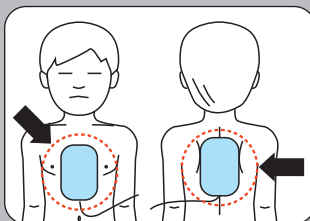

Paramedic CU-ER Series Infant / Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Paramedic CU-ER Series 영아/소아용 저에너지 패드

Palettes de défibrillation à énergie réduite Nourisson/Enfant de la gamme Paramedic CU-ER

Defibrillatorelektroden mit verminderter Energie für Kleinkinder / Kinder der Paramedic CU-ER Serie

Piastre pediatriche ad energia ridotta per defibrillatore Paramedic CU-ER

Дефибрилляторные электроды с пониженной энергоотдачей для младенцев/детей серии Paramedic CU-ER

Parches de desfibrilador con reducción de energía para bebés y niños Serie Paramedic CU-ER

Placas de desfibrilador de energia reduzida para bebés /crianças da Série CU-ER para paramédicos

Paramedic CU-ER Serie baby / kind verminderde energie defibrillatorkussens

Paramedic CU-ER シリーズ 小児用省エネ除細動パッド


Paramedic CU-ER Series 嬰兒/兒童型低耗能去顫器 (電擊器) 貼片

وسائد مزيل الرجفان التي تحتزل الطاقة Paramedic CU-ER للرضع/الأطفال

## Palettes de défibrillation à énergie réduite Nourrisson/Enfant de la gamme Paramedic CU-ER

Ces électrodes sont destinées à être utilisées avec les défibrillateurs de la Série Paramedic CU-ER utilisés en mode AED uniquement.  
A utiliser uniquement pour des enfants de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg.  
Ne pas retarder le traitement pour déterminer avec exactitude l'âge et le poids de l'enfant.  
Si l'enfant semble plus âgé ou avoir un poids supérieur, utiliser les palettes de défibrillation adulte de la gamme Paramedic CU-ER.

- Les défibrillateurs de la Série Paramedic CU-ER sont destinés à être utilisés sur les victimes d'arrêt cardiaque brusque présentant l'ensemble des symptômes suivants : non-réceptivité, absence de respiration normale et de pouls décelable. En cas de doute, appliquez les électrodes.
- Les défibrillateurs de la Série Paramedic CU-ER (mode AED) et les électrodes de défibrillation pédiatrique CUA0711P sont destinés à être utilisés par des personnes ayant été formées à leur utilisation. L'utilisateur doit également être qualifié de formation en Réanimation de base ou autre programme d'intervention médicale d'urgence autorisé par un médecin.

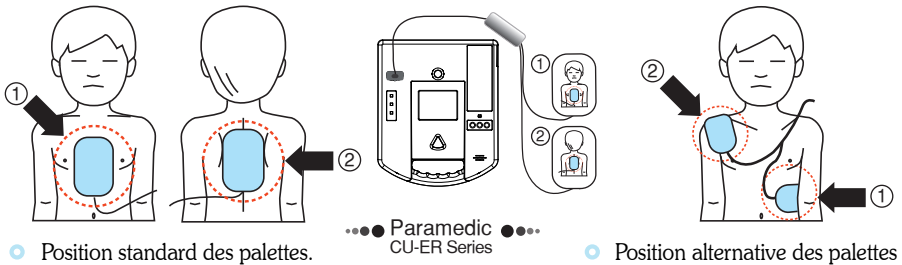

- Placez les palettes sur le patient.  
Consultez l'illustration à l'arrière des palettes pour un placement correct
- Si on désire utiliser la position alternative des électrodes :  
Placer l'électrode destinée au dos du patient sur la partie supérieure droite de la poitrine du patient.  
Placer l'électrode destinée à la poitrine du patient sur le torse du côté du patient.

### ► INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Mettez le défibrillateur sur MARCHE.
- Retirez les vêtements sur le haut du corps du patient.
- Assurez-vous que la peau est propre et sèche.
- Ouvrez l'étui de l'électrode.
- Branchez le connecteur des palettes au défibrillateur.
- Appliquez sur le patient comme indiqué sur le graphique à l'arrière des palettes.
- Appuyez les palettes sur la peau du patient.
- Reculez et appuyez sur le bouton SHOCK au moment requis.

---

## ► Ces PALETTES sont


- Uniquement à usage de défibrillation externe. Ne pas utiliser pour la stimulation, la cardioversion synchronisée ou la surveillance.
- Jetable et seulement à usage unique. Ne pas réutiliser.
- Autocollant avec un gel conducteur à base de polymère.
- A conserver dans un milieu frais et sec (de -12 ° C / 10 ° F à 43 ° C / 110 ° F)
- Non stérile

## ► PRECAUTIONS

- Ouvrir l'emballage au moment de l'utilisation des électrodes.
- N'appliquer aucune substance qui pourrait laisser des résidus sur la peau, par exemple des huiles, du gel, de l'eau, etc. S'assurer que la peau est sèche et essuyer l'eau sèche, la sueur, l'alcool, etc.
- Utiliser de nouvelles électrodes lorsque l'appareil indique que les électrodes utilisées n'adhèrent pas correctement.
- Pour une utilisation à long terme, utiliser de nouvelles électrodes toutes les 24 heures.
- L'adhésif est légèrement irritant sur la peau.
- Se débarrasser des électrodes et de leur emballage selon les règlements nationaux et locaux en la matière.

## ► MISES EN GARDE

- A utiliser uniquement avec la Série Paramedic CU-ER fonctionnant en mode AED ( la puissance du défibrillateur est de 150 Joules ; la puissance des électrodes est de 50 Joules, nominale ; )
- L'exposition à l'air pendant de longues périodes peut provoquer un dessèchement et atténuer la performance des électrodes.
- Ne pas utiliser si le gel conducteur à base de polymère est desséché.
- Les défibrillateurs et leurs accessoires contiennent des matières ferromagnétiques. Ils ne doivent pas être utilisés en présence d'un puissant champ magnétique créé par un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Ce puissant champ magnétique attirera le matériel avec une force capable de causer la mort ou des blessures corporelles graves aux personnes se trouvant entre le matériel et l'appareil d'IRM.
- La défibrillation peut causer le dysfonctionnement des prothèses électriques. Placer les électrodes loin des prothèses si possible.
- Pour éviter les risques d'incendie et d'explosion, ne pas utiliser un défibrillateur et ces électrodes en présence d'oxygène concentré et d'anesthésiques inflammables.
- La mauvaise application d'une électrode peut causer des brûlures chez le patient.

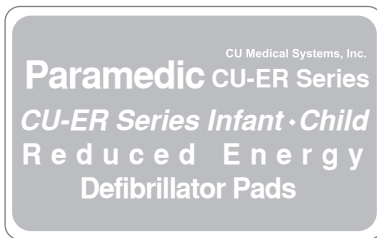

## Asia

CU Medical Systems, Inc.  
Dongwha Medical Instrument Complex  
1647-1, Dongwha, Munmak, Wonju, Gangwon,  
Republic of Korea  
Tel: +82 33 747 7657  
Fax: +82 33 747 7659

## Europe

EU Authorized Representative of CU Medical Systems, Inc.  
Medical Device Safety Service  
Schiffgraben 41,  
30175 Hannover, Germany  
TEL : +49 511 6262 8630  
FAX : +49 511 6262 8633

Branch Office of CU Medical Systems, Inc. in Germany  
Kuester Strasse 6, 30519 Hannover, Germany  
TEL:+49 511 365 4353  
FAX:+49 511 848 6054