

# CHAISE DE DEGAGEMENT code SED001

## Instructions et Entretien



Fig1



Fig2

### Comment ouvrir la chaise:

En position plier (fig 1), tenir points A et B et écarter les deux parties jusqu'à la mise en place de la chaise Fig. 2

### Comment préparer le patient pour le transport

Quand le patient est bien assis, abaisser les deux accoudoirs vers l'avant. Remonter les 2 bras arrière de portage de la chaise comme dans Fig. 3. Descendre les 2 bras avant de portage vers le bas jusqu'au « clic » de verrouillage fig.4. Vous pouvez rallonger les 4 bars de portages en poussant sur le bouton de verrouillage à côté des poignées. La chaise sera alors identique à la fig. 2.



Fig3




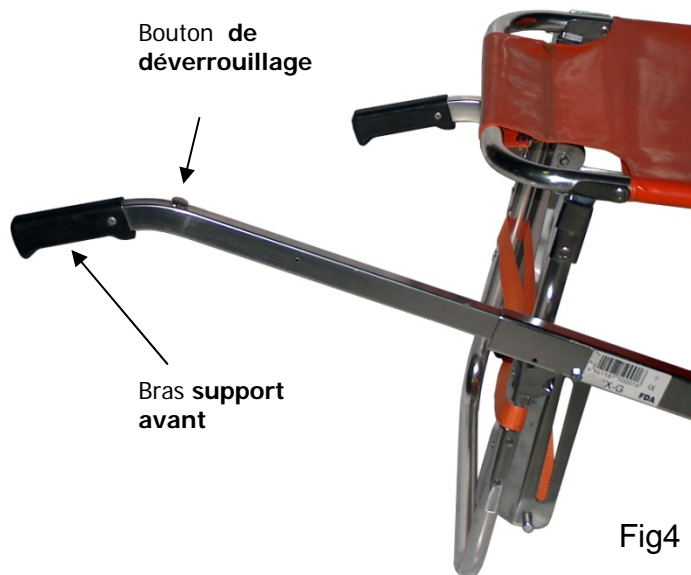


Fig4

## SYSTEME DE SECURITE

Pour obtenir une meilleure stabilité de la chaise en position ouverte, verrouiller la roue arrière gauche, fig. 5, pousser avec votre pied sur le point A. Pour déverrouiller le frein pousser avec votre pied sur point B.

**Pour avoir une position des deux bras avant de portage identique à la chaise fermée tenir le système de verrouillage fig. 6 dans la main et tirer vers l'avant pour le débloquer et relever le bras.** Des ceintures avec fermetures rapides sont fournies pour sécuriser le patient sur la chaise

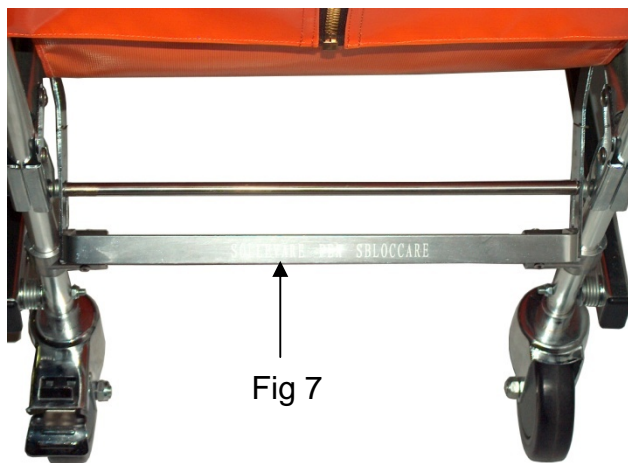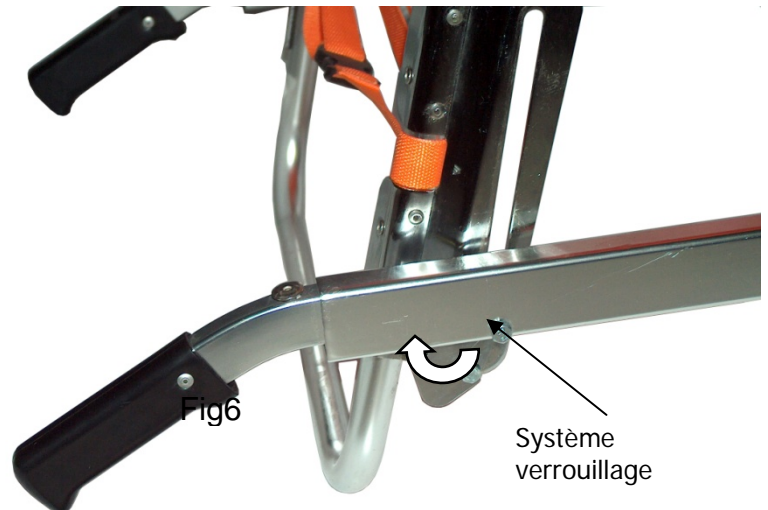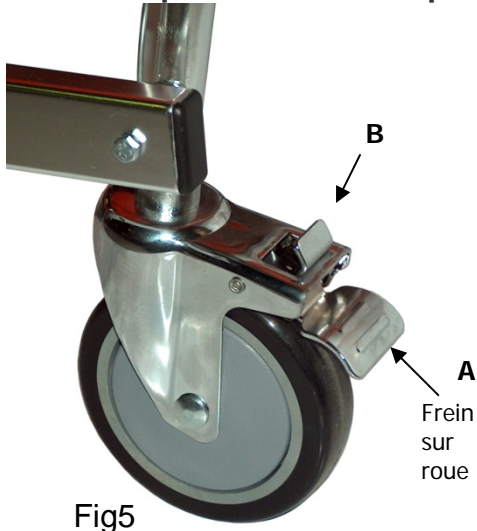

## Comment plier la chaise

Mettre tous les bras dans leurs positions initiales. Avec une main relever la barre comme fig., avec l'autre main tirer sur la partie avant de la chaise et plier l'ensemble au maximum pour retrouver fig. 1. Pour une meilleure sécurité la chaise est fournie avec une sangle qui empêche l'ouverture inopportune de la chaise.

## Nettoyage et rangement.

Utiliser un liquide désinfectant pour matériel médical. Ranger la chaise dans un endroit propre et sec, loin d'une source de chaleur.

## Dimensions:

Pliée mm.910H x 195P x 520L  
Ouverte mm.910H x 710P x 520L  
Poids : 8,50 Kg.  
Charge maxi: 150 Kg.