




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

TAVOLA SPINALE
SPINAL BOARD
PLANCHE DORSALE
TABLERO ESPINAL

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

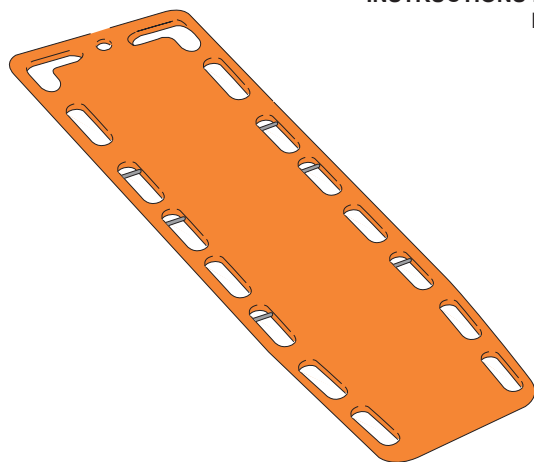


ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.



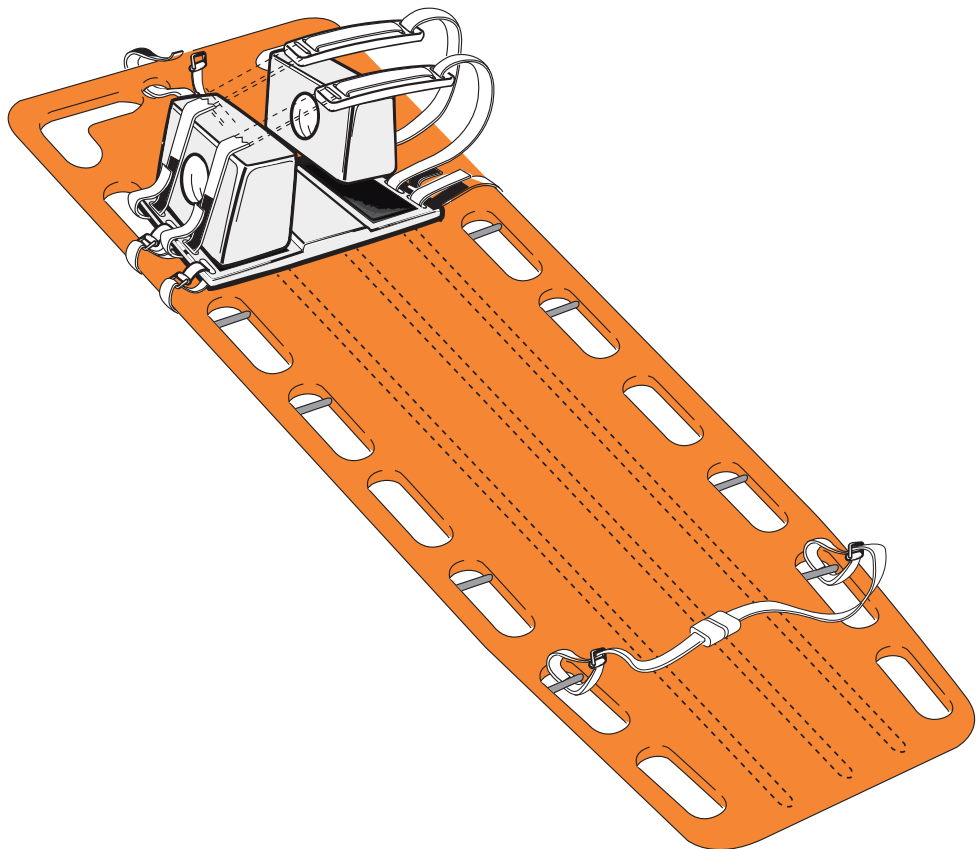

Cet article est réalisé en polyéthylène haute densité par moulage monobloc. Deux montants en plastique renforcé de fibre de carbone renforcent la planche.

La planche dorsale est utilisée pour transporter un patient ayant subi une lésion traumatique au niveau de la colonne vertébrale, mais également comme brancard ordinaire.

Dimensions: 183 cm X 46 cm X 5 cm

Poids: 7 kg

Capacité de charge: 200 kg



Recommandations!

La planche ne doit être manipulée que par du personnel compétent.

Le patient ne doit être déplacé et transporté que par du personnel compétent afin d'éviter tout risqué d'accident.

UTILISATION

1. Poser la planche sur un sol plat.
2. Déposer le patient sur la planche en position correcte.
3. Desserrer les sangles et enfiler l'une des extrémités de la sangle dans le trou de la poignée de la planche, puis serrer les sangles une à une.
4. La planche est équipée de poignées sur les côtés. Après avoir vérifié que le patient est correctement attaché, il sera possible de le déplacer en avant et en arrière ou vers la droite et la gauche.

NETTOYAGE

Laver avec de l'eau chaude et du savon ou utiliser un produit bactéricide.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu de manière à garantir des standards qualitatifs élevés tant en ce qui concerne le matériau utilisé que la fabrication. La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la fourniture GIMA.

Durant la période de validité de la garantie, la réparation et/ou la substitution de toutes les parties défectueuses pour causes de fabrication bien vérifiées, sera gratuite. Les frais de main d'œuvre ou d'un éventuel déplacement, ainsi que ceux relatifs au transport et à l'emballage sont exclus.

Sont également exclus de la garantie tous les composants sujets à usure.

La substitution ou réparation effectuées pendant la période de garantie ne comportent pas le prolongement de la durée de la garantie. La garantie n'est pas valable en cas de : réparation effectuée par un personnel non autorisé ou avec des pièces de rechange non d'origine, avaries ou vices causés par négligence, chocs ou usage impropre. GIMA ne répond pas des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques ou logiciels causés par l'action d'agents extérieurs tels que : sautes de courant, champs électromagnétiques, interférences radio, etc.

La garantie sera révoquée en cas de non respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule (si présent) résultera avoir été enlevé, effacé ou altéré. Les produits considérés défectueux doivent être rendus seulement et uniquement au revendeur auprès duquel l'achat a été effectué. Les expéditions qui